

**RU** русский язык **CE**  
**ВЕСЫ СО ШТАТИВОМ 7830/31**

#### ■ Ввод в эксплуатацию

Воткнуть провод сетевого блока питания, интегрированного в вилку, с задней стороны платформы, чтобы обеспечить питание весов током.

#### ■ Взвешивание

Просто стать на весы (включение или касание клавиши не требуется).

#### ■ Измерение длины с индикацией индекса массы тела (BMI)

Осторожно откинуть вверх измеритель длины и переместить его вверх. Затем положить верхнюю часть на голову пациента. На дисплее появится величина в сантиметрах, а затем автоматически – индекс массы тела.

#### ■ Тарированное взвешивание

С помощью функциональной клавиши на задней стороне дисплея весы могут тарироваться. Нажать клавишу, на дисплее появится «0,0 кг», и весы готовы к взвешиванию.

#### ■ Функция мать/ребенок

Взрослый человек становится на весы.

> Индикация, например, «47,6 кг»

• Нажмите функциональную клавишу.

> Индикация устанавливается на «0,0 кг»

• Мать может сойти с весов ...

> Индикация «-47,6 кг»

• ... и стать вместе с ребенком еще раз на весы.

> Вы получите вес ребенка, например, «5,1 кг»

Когда оба вновь покидают весы, на дисплее в примере отображается «-47,6 кг». С помощью функциональной клавиши Вы можете вновь установить весы на «0,0 кг». Весы не переходят автоматически на «0,0 кг», чтобы можно было провести последовательно несколько оттарированных взвешиваний.

#### ■ Выключение

Весы выключаются автоматически, когда индикация прибл. 15 секунд стоит на «0,0 кг».


#### ■ Переключение единиц измерения

Стандартно установлена единица измерения кг. Если Вы хотели бы переключить весы на другую единицу измерения, поступайте следующим образом.

- Вытащить сетевую вилку.
- Нажать функциональную клавишу, удерживать ее нажатой и одновременно воткнуть сетевую вилку.
- Индикация сменится на фунты (lb).

Чтобы вновь переключить индикацию на кг, просьба повторить описанный выше процесс

Lengtemeter met BMI-weergave  
 Højdemåler med BMI-display  
 Medición de altura con indicación de IMC  
 Misura di altezza con display BMI  
 Pituuden mittaus BMI-näytöllä  
 Längdmätning med BMI-indikering  
 Lengdemåling med BMI-visning  
 Μέτρηση ύψους με ένδειξη BMI (δείκτην μάζας σώματος)  
 BMI göstergesi ile boy ölçümü  
 Meranie výšky s údajom o BMI  
 Měření výšky s výpočtem BMI  
 Pomiar wzrostu i wskaźnik BMI  
 Измерение длины с индикацией индекса массы тела (BMI)

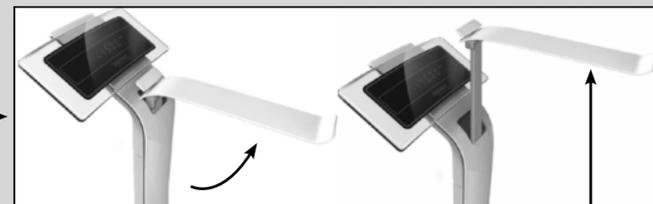

Functietoets  
 Funktionsknop  
 Tecla de función  
 Tasto funzione  
 Toimintopainike  
 Funktionsknapp  
 Funktionsstast  
 Πάκτρο λειτουργίας  
 Funkcion tušu  
 Funkčné tlačidlo  
 Funkční tlačítko  
 Przycisk funkcyjny  
 Функциональная клавиша



Resetttoets  
 Reset-knop  
 Tecla de reset  
 Tasto Reset  
 Nollauspainike  
 Reset-knapp  
 Resett-tast  
 Πάκτρο επανεφορής  
 Reset tušu  
 Tlačidlo Reset  
 Reset tlačítko  
 Przycisk reset  
 Кнопка сброса (Reset)

Service-interface. Opcie: USB-interface  
 Serviceinterface. Ekstraudstyr: USB-port  
 Interfaz de servicio. Opcional: Interfaz USB  
 Interfaccia di servizio. Opzione: Interfaccia USB  
 Huoltoiliitäntä. Lisävaruste: USB-liitäntä  
 Servicegränssnitt. Tillval: USB-gränssnitt  
 Servicegrensesnitt. Alternativ: USB-grensesnitt  
 Διεποφί οεββίς, Προορρετίκν: Διεποφί USB  
 Servis bağlantı yeri, İsteğe bağlı: USB bağlantı yeri  
 Servisné rozhranie. Alternativa: USB rozhranie  
 Servisni rozhrani, Option: USB rozhrani  
 Złącze serwisowe. Opcja: interfejs USB  
 Сервисный интерфейс, Опция: USB-интерфейс