

HU - HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELTARTHATÓ KARTON SZÁJDŰK

FELHASZNÁLÁSI RENDELTETÉS: az eldobható szájrészek a tüdőfunkciót vizsgáló berendezéssel együtt használhatók, és lehetővé teszik a páciens számára, hogy anélkül végezze el a vizsgálatot, hogy közvetlenül érintkezne a berendezéssel.

A páciens személyesen kezeli a szájrészt úgy, hogy behelyezi a berendezésbe. A szájrészeket csak ép, tiszta és egészséges bőrre szabad alkalmazni.

TERMÉK AZONOSÍTÁSA: az azonosító adatok (hivatkozás, tétel és gyártási dátum) a dobozon található címkén található.

HASZNÁLAT:

- Mindig kövesse a spirométer utasításait.
- Erőszak nélkül helyezze be a szájrészt a készülék érzékelőjébe (turbina vagy pneumotakométer). Soha ne használja újra a szájrészt, hogy elkerülje a beteg keresztzennyeződését.
- Használat előtt ne nyissa ki.
- Ne használja, ha a csomagolás sérült.
- A készülék nem alkalmas újszülött-gyermekgyógyászati használatra.
- Tárolja hűvös és száraz helyen.

ÁRTALMATLANÍTÁS ÉS BIZTONSÁG: használat után a terméket normál, nem mérgező szilárd hulladékot tartalmazó tartályokba vagy általános kórházi hulladékba kell dobni.



ELLENJAVALLATOK: a tapasztalatok és a különböző elemzések eredményei alapján a termék megfelelő használatának nincs káros hatása.

TÁROLÁS: hűvös és száraz helyen tárolandó.

FIGYELEM:

- Az egyedi hőlezárt borítékba (single wrap) törtető csomagolás garantálja a baktériummentességet, amit a gyártó minőségbiztosítási rendszere szerint rendszeresen ellenőrünk. Ha az orvostechnikai eszközt újra felhasználják, fennáll a keresztfertőzés veszélye az újrahasználó beteg számára.
- Ha az eszközt újrafelhasználják, fennáll a keresztfertőzés veszélye az újrahasználó beteg számára.

Manuale d'uso LUMED Rev. 4.0 01/09/2023

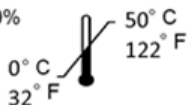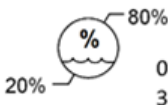

LUMED Srl
Via Staffora 18/9
20073 Opera ITALIA
www.lumed.com
tel +39 (0)2 57606750