

HU - EGYSZERREHASZNÁLHATÓ VÍRUS- ÉS BAKTERIÁLIS SZŰRŐ - UTASÍTÁSOK

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET: A páciensek fertőzésekkel és berendezések általi szennyeződésekkel szembeni védelmére tervezték, magas fokú védelmet nyújt a baktériumok és vírusok ellen, nagyon alacsony rezisztencia mellett a diagnosztikai eredmény pontosságának biztosítása érdekében. A szűrőt csak ép, tiszta és egészséges bőrre szabad alkalmazni.

TERMÉK AZONOSÍTÁSA: Az azonosító adatok (kód, tétel és gyártási dátum) a dobozon található címkén találhatóak.

HASZNÁLAT:

- Húzza ki a szűrőt, és ellenőrizze a készülék és a szűrőanyag épségét. Ellenkező esetben dobja ki, és folytassa egy másik eszközzel.

- Helyezze be a szűrőt a készülék érzékelőjébe tolóerő nélkül, mindig kövesse az eszköz gyártójának utasításait.

- Helyezze fel a szájrészt a megfelelő oldalra.

- Soha ne használja újra a szűrőt és a szájrészt más betegek számára, hogy elkerülje a keresztszennyeződést.

- Ez a készülék nem sterilizálható.

- Csak orvosi segítséggel használja.

- Ez az eszköz nem használható újszülött célokra.

ÁRTALMATLANÍTÁS ÉS BIZTONSÁG: Használat után a terméket normál, nem mérgező szilárd hulladékot tároló tartályokba vagy az általános kórházi hulladékokba kell dobni.

ELLENJAVALLATOK: A tapasztalatok és a különböző elemzések eredményei alapján a termék megfelelő használatának nincs káros hatása.

MEGJEGYZÉSEK: Az egyedi, hővel lezárt borítékba (singlewrap) történő csomagolás garantálja a baktériumok hiányát, amit a gyártó minőségbiztosítási rendszere szerint rendszeresen ellenőrzünk.

FT02_All.2.1 - Manuale d'uso LUMED Rev. 2.0 01/09/2023



LUMED Srl
Via Staffora 18/9
20073 Opera ITALIA
www.lumed.com
tel +39 (0)2 57606750