

## HU - EGYSZERREHASZNÁLHATÓ VÍRUS- ÉS BAKTERIÁLIS SZŰRŐ - UTASÍTÁSOK

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:** A páciensek fertőzésekkel és berendezések általi szennyeződésekkel szembeni védelmére tervezték, magas fokú védelmet nyújt a baktériumok és vírusok ellen, nagyon alacsony rezisztencia mellett a diagnosztikai eredmény pontosságának biztosítása érdekében. A szűrőt csak ép, tiszta és egészséges bőrre szabad alkalmazni.

**TERMÉK AZONOSÍTÁSA:** Az azonosító adatok (kód, tétel és gyártási dátum) a dobozon található címkén találhatóak.

### HASZNÁLAT:

- Húzza ki a szűrőt, és ellenőrizze a készülék és a szűrőanyag épségét. Ellenkező esetben dobja ki, és folytassa egy másik eszközzel.
- Helyezze be a szűrőt a készülék érzékelőjébe tolóerő nélkül, mindig kövesse az eszköz gyártójának utasításait.
- Helyezze fel a szájrészt a megfelelő oldalra.
- Soha ne használja újra a szűrőt és a szájrészt más betegek számára, hogy elkerülje a keresztszennyeződést.
- Ez a készülék nem sterilizálható.
- Csak orvosi segítséggel használja.
- Ez az eszköz nem használható újszülött célokra.

**ÁRTALMATLANÍTÁS ÉS BIZTONSÁG:** Használat után a terméket normál, nem mérgező szilárd hulladékot tároló tartályokba vagy az általános kórházi hulladékokba kell dobni.

**ELLENJAVALLATOK:** A tapasztalatok és a különböző elemzések eredményei alapján a termék megfelelő használatának nincs káros hatása.

**MEGJEGYZÉSEK:** Az egyedi, hővel lezárt borítékba (singlewrap) történő csomagolás garantálja a baktériumok hiányát, amit a gyártó minőségbiztosítási rendszere szerint rendszeresen ellenőrzünk..

Manuale d'uso LUMED Rev. 2.0 01/09/2023



**LUMED Srl**  
Via Staffora 18/9  
20073 Opera ITALIA  
www.lumed.com  
tel +39 (0)2 57606750