

FIGYELMEZTETÉSEK

Ha a készüléket a jelen utasításokkal ellentétben újra felhasználja, az a következőket veszélyekkel járhat:

- 1. Az eszköz szennyezettsége és biológiai maradványok esetleges jelenléte, amelyek keresztfertőzést okozhatnak.
- 2. Anyagok megváltozása.
- 3. A termék funkcióinak romlása a kiindulási paraméterekhez képest.
- Az oxigénforráshoz való csatlakoztatás előtt ellenőrizze annak működését.
- A csatlakozócső véletlen összenyomása vagy megtörése akadályozza az oxigén megfelelő áramlását, és a csatlakozó szétválását okozhatja. Ezért a felhasználónak óvatosan kell eljárnia.
- A 10 l/percnél nagyobb oxigénáramlás zavaró zajt okozhat a rendszerben. A párástóból folyadék szűrődhet a betegnek szállított keverékbe.
- Minden fenti modell eldobható, és nem használható folyamatosan 30 napnál hosszabb ideig.
- A koncentrált oxigén begyűjthetja az éghető anyagokat. A tűz- és robbanásveszély elkerülése érdekében tartsa távol a lehetséges gyújtóforrásoktól, és olvassa el az oxigénszállításhoz használt berendezések használatára vonatkozó óvintézkedéseket.

HULLADÉKELTÁVOLÍTÁS

Az egészségügyi struktúrákból származó hulladékokat a hatályos rendeleteknek megfelelően kell ártalmatlanítani.

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

Amennyiben az eszköz használata során vagy annak következtében súlyos incidens történik, jelentse azt a gyártónak és a nemzeti hatóságnak. A készülék bármilyen meghibásodása vagy meghibásodása esetén tájékoztassa a gyártó minőségügyi szervizét.

TERÁPIÁS MASZKOK OXIGÉNTERÁPIÁHOZ
HASZNÁLATI UTASÍTÁS


JAVASOLT FELHASZNÁLÁS:

Terápiás célú oxigénadás.

- MEGJEGYZÉS:** Eldobható termék - ne használja fel újra.
- Az oxigénforrásnak meg kell felelnie a hatályos előírásoknak.
 - A termékeket csak képzett egészségügyi személyzet használhatja fel.

ELŐKÉSZÍTÉS ÉS CSATLAKOZTATÁS
KÖZEPES KONCENTRÁCIÓJÚ OXIGENERÁPIÁS MASZK
Csatlakoztassa a csőcsatlakozót az oxigénforráshoz. Csatlakoztassa a másik végét a maszk műanyag kimenetéhez. A maszkot arra terveztük, hogy 5 és 10 l/perc közötti áramlási sebesség mellett 40% és 60% közötti oxigénáramlást szállítson.
OXYGEN THERAPY MASZK VÁLTOZKÓ KONCENTRÁCIÓBAN
Rögzített levegő-O₂ hígítók esetén (hét különböző színben) csatlakoztassa a kiválasztott hígítót a hullámcsőhöz; egyetlen levegő-O₂ hígító esetén válassza ki a koncentrációt és győződjön meg arról, hogy a szabályozó mozgatható része teljesen vissza van húzva a helyére, és csatlakoztassa a hígítót a hullámcsőhöz. Csatlakoztassa a csészeformájú maszkot a hígítóhoz. Csatlakoztassa a sure-flow csövet a hígítóhoz. Csatlakoztassa a másik végét a maszk műanyag kimenetéhez. Az ajánlott áramlási sebesség és a szállított oxigén ajánlott relatív százalékos aránya a hígítóra vagy a címkére van nyomtatva.

NAGY KONCENTRÁCIÓJÚ OXIGENERÁPIÁS MASZK
Lapítsa ki a műanyag zsákot. Csatlakoztassa a csőcsatlakozót az oxigénforráshoz. Csatlakoztassa a másik végét a maszk műanyag kimenetéhez. A kapacitást úgy állítsa be, hogy belégzés során a zsák legfeljebb csak félig ürüljön ki. A szállított oxigénáramlás 90% és 100% között van.
OXYGEN THERAPY MASZK AEROSZOLHOZ
Csavarja le a kupakot és adja hozzá a felírt gyógyszert. Csavarja vissza a kupakot. Rögzítse a maszkot a nebulizátor tetejére az ehhez biztosított nyílással. Csatlakoztassa a cső egyik végét a nebulizátor kimenetéhez, a másik végét pedig az oxigén- vagy sűrített levegő forráshoz. Ellenőrizze, hogy a csatlakozás megfelelően rögzítve van (az alábbiak szerint).

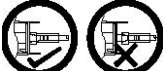

Az alkalmazás időtartamát az orvosi előírás alapján határozza meg. Az optimális porlasztáshoz az ajánlott áramlás 6 és 9 l/perc között van, 3,44 bar (344 kPa, ami 50 PSI-nek felel meg) nyomás mellett. A hatékony porlasztás 1,73 bar (173 kPa, ami 25 PSI-nek felel meg) nyomásig garantált.
MINDEN FENT EMLÍTETT MODELLNÉL: OXIGÉNÁRAMLÁS BEÁLLÍTÁSA ÉS A MASZK FELHELYEZÉSE
Győződjön meg róla, hogy a csövek biztonságosan rögzítve vannak az oxigénforráshoz. Az oxigén adagolását és az áramlás szabályozását az orvos által előírtak szerint végezze el. Helyezze a maszkot a beteg arcára, hogy az elfedje a száját és az orrot is. Emelje át a rugalmas pántot a páciens fején és fülén, és helyezze a nyakára. Állítsa be meghúzással a pánt feszességét, hogy a maszk a helyén maradjon. Igazítsa a fém orr részt a páciens arcához.

OXYGEN THERAPY MASZK A TRACHEOSTOMIÁHOZ
OXIGÉNTERÁPIÁS MASZK TRACHEOSTOMIÁHOZ VÁLTOZÓ KONCENTRÁCIÓBAN
Oxygen therapy maszk a tracheostomiához: az aeroszolcsővel (a csomag nem tartalmazza) csatlakoztassa a maszkot a gázforráshoz. Válassza ki a megfelelő l/perc áramlást a gázforrásnál, és ellenőrizze, hogy a gáz megfelelően áramlik a maszkon keresztül.
Oxigénterápiás maszk tracheostomiához változó koncentrációban: Csatlakoztassa az előírt hígítót a gégecsőhöz. Csatlakoztassa a csészeformájú maszkot a hígítóhoz. Csatlakoztassa a sure-flow csövet a hígítóhoz. Csatlakoztassa a másik végét a maszk műanyag kimenetéhez. Az ajánlott áramlási sebesség és a szállított oxigén ajánlott relatív százalékos aránya a hígítóra van nyomtatva.
Oxygen therapy maszk a tracheostomiához / Oxigénterápiás maszk tracheostomiához változó koncentrációban: helyezze a rugalmas pántot a nyak mögé, és óvatosan húzza meg a pánt végét, amíg a maszk biztonságosan a helyén nem marad. A maszk bemeneti csatlakozója 360°-ban elforog, így a csövek helyzete igazodik a fekvő vagy álló betegekhez. Ha szívást használ, lazítsa meg a maszkot (a pánt ellentétes irányba történő húzásával vagy a pánt egyik oldalának kioldásával), és vegye le a maszkot a szívási területről. Cserélje ki a maszkot a korábban leírtak szerint. Figyelem: Győződjön meg róla, hogy minden csatlakozó biztonságosan rögzítve van.

ELLENJAVALLATOK
Az oxigénterápiának nincsenek ellenjavallatai. Gyógyszer beadásakor olvassa el a gyógyszerhez mellékelt utasítást.

	BG	CS	HR	HU	LT	LV	RO	SR
	Съответства на действащото европейско законодателство относно медицинските изделия	Vyhovuje současně evropské legislativě o zdravotnických prostředcích	U skladu s važečím evropskim zakonodavstvom o medicinskim proizvodima	Megfelel az orvostechnikai eszközökre vonatkozó hatályos európai jogszabályoknak	Atitinka galiojančius Europos teisės aktus dėl medicinos priemonių	Atbilst pašreizējiem Eiropas tiesību aktiem par medicīnas ierīcēm	Conform cu legislația europeană în vigoare privind dispozitivele medicale	Usaglašeno sa tekućim evropskim propisima o medicinskim sredstvima
	Направете справка с инструкциите за употреба	Čtěte uživatelskou příručku	Proučite upute prije korištenja	Consult használati utasítást	Žr. naudojimo instrukcijas	Skatīt lietošanas instrukciju	Consultați instrucțiunile de utilizare	Konsultujte instrukcije za upotrebu
	Дата на производство	Datum výroby	Datum proizvodnje	Gyártás dátuma	Pagaminimo data	Ražošanas datums	Data de fabricație	Datum proizvodnje
	Производител	Výrobce	Proizvođač	Gyártó	Gamintojas	Ražotājs	Producător	Proizvođač
	Дистрибутор	Distributor	Distributer	Forgalmazó	Platintojas	Izplatītājs	Distribuitor	Distributer
	Каталоген номер	Katalogové číslo	Kataloški broj	Katalógusszám	Katalogo numeris	Kataloga numurs	Număr de catalog	Kataloški broj
	Партиден номер	Číslo šarže	LOT	Tételszám	Partijos kodas	Partijas kods	Numar de lot	Serijski broj
	Използвай при	Spotřebujte do	Lejāratī datūm	Lejāratī datūm	Tinka iki	Izmantošanai	Data limită de utilizare	Rok upotrebe
	Darabszám	Počet kusů	Količina komada	Darabszám	Dalių kiekis	Vienumu daudzums	Număr de bucăți	Količina komada
	Не се допуска повторна употреба	Nepoužívat opakovaně	Nemojte ponovno koristiti	Ne használja több alkalommal	Pakartotinai nenaudoti	Nelietot atkārtoti	A nu se reutiliza	Zabranjena ponovna upotreba
	Не съдържа естествен гумен латекс	Neobsahuje přírodní latex	Ne sadrži prirodnu gumu i lateks	Nem tartalmaz természetes latexgumit	Sudėtyje nėra latekso	Nesatur dabīgās gumijas lateksu	Nu conține cauciuc natural (latex)	Ne sadrži prirodnu gumu lateks
	Пазете от пряка слънчева светлина	Nevystavujte slunečnému záření	Štititi od direktnog sunčevog svjetla	Tartsa távol a napfénytől	Saugoti nuo saulės spindulių	Nepakļaut produkta atrašanās tiešā saules gaismā	A se feri de razele soarelui	Držati dalje od sunčeve svetlosti
	Не съдържа фталати: БЕЗ DEHP	Neobsahuje ftaláty: DEHP FREE	Ne sadrži ftalate: DEHP FREE	Nem tartalmaz ftalátokat: DEHP MENTES	Nesatur ftalātus: BEZ DEHP	Nesatur ftalātus: BEZ DEHP	Nu conține ftalati: FĂRĂ DEHP	Ne sadrži ftalate: BEZ DEHP
	Температурни ограничения	Omezení teploty	Temperaturni raspon	Hőmérséklet-határértékek	Temperatūros apribojimas	Temperatūras ierobežojums	Limite de temperatură	Ograničenje temperature
	Ограничения на влажността	Omezení vlhkosti	Raspon vlažnosti zraka	Páratartalom-határértékek	Drėgnio apribojimas	Mitruma ierobežojumi	Limite de umiditate	Ograničenje vlažnosti vazduha
	Медицинско изделие	Zdravotnický prostředek	Medicinski proizvod	Orvostechnikai eszköz	Medicinos priemonė	Medicīniska ierīce	Dispozitiv medical	Medicinsko sredstvo
	Уникален идентификатор на изделията	Jedinečným identifikátorem prostředku	Jedinstvena identifikacija proizvoda	Egyedi eszközazonosító	Unikalusis priemonės identifikatorius	Ierīces unikālais identifikators	Identificatorul unic al dispozitivului medical	Jedinstveni identifikator uređaja

