



Az oxigénforráshoz való csatlakoztatás előtt ellenőrizze annak működését. A csatlakozócső véletlen összenyomása akadályozza az oxigén megfelelő áramlását, és a csatlakozó szétválását okozhatja. Ezért a felhasználónak óvatosan kell eljárnia. Figyelni kell a sure-flow csővel szállított modelleknél is, amelyeknél a szétválás veszélye, bár kisebb mértékben, de ugyanúgy fennáll.

A termék ftalátokat (DEHP) tartalmaz. Bár az emberi egészséget érintő kockázatok nem bizonyítottak, az eszközök terhes/szoptatós anyákon vagy gyermekeken történő használatáról az orvosának kell döntenie.

Az orrkanülök használata vérzésre hajlamos és/vagy véralvadásgátló kezelés alatt álló személyeknél orrvérzést okozhat.

A koncentrált oxigén begyűjthetja az éghető anyagokat. A tűz- és robbanásveszély elkerülése érdekében tartsa távol a lehetséges gyújtóforrásoktól, és olvassa el az oxigénszállításhoz használt berendezések használatára vonatkozó óvintézkedéseket.

TÁROLÁS

A terméket eredeti csomagolásában kell tárolni olyan helyiségekben, ahol a hőmérséklet és a páratartalom a címkén feltüntetett értékeknek megfelelő. A csomagolásra került súlyok károsíthatják a terméket.

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

Amennyiben az eszköz használata során vagy annak következtében súlyos incidens történik, jelentse azt a gyártónak és a nemzeti hatóságnak. A készülék bármilyen meghibásodása vagy meghibásodása esetén tájékoztassa a gyártó minőségügyi szervizét.

HULLADÉKELTÁVOLÍTÁS

Az egészségügyi struktúrákból származó hulladékokat a hatályos rendeletnek megfelelően kell ártalmatlanítani.

HU ORRKANÜL OXIGÉNTERÁPIÁHOZ HASZNÁLATI UTASÍTÁS

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS

Terápiás oxigénadás orron keresztül.
Eldobható termék (egy beteg számára), legfeljebb 30 napig folyamatosan használható.
Az oxigénforrásnak meg kell felelnie a hatályos előírásoknak.
A termékeket csak képzett egészségügyi személyzet használhatja fel.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Óvatosan helyezze az orr elosztót a orrlyukakba, majd járjon el az adott orrkanül modellnél leírtak szerint.
Tartsa az orr elosztót a helyén, és vezesse a jobb és bal oldali csövet a fülek felett az állkapocs mentén az áll alá. Állítsa be a csövet a műanyag gyűrű segítségével.
Csatlakoztassa a csatlakozócső végét az oxigénforráshoz. A készülék megfelelő felhelyezése után adjon oxigént, és szükség szerint szabályozza az áramlási sebességet.

ELLENJAVALLATOK

Nincs ellenjavallat.

FIGYELMEZTETÉSEK

Ha a készüléket a jelen utasításokkal ellentétben újra felhasználja, az a következőket veszélyekkel járhat:

1. anyagok megváltozása
2. Az eszköz szennyezettsége és biológiai maradványok esetleges jelenléte, amelyek keresztfertőzést okozhatnak.
3. A termék funkcióinak romlása a kiindulási paraméterekhez képest.

СИМВОЛИ - VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ - ZNAČENJE SIMBOLA - JELMAGYARÁZAT - SIMBOLIŲ LEGENDA - SIMBOLU APZĪMĒJUMI - LEGENDĂ DE SIMBOLURI

	BG	CS	HR	HU	LT	LV	RO	SR
	Съответства на действащото европейско законодателство относно медицинските изделия	Vyhovuje současně evropské legislativě o zdravotnických prostředcích	U skladu s važečím evropskim zakonodavstvom o medicinskim proizvodima	Megfelel az orvosi eszközökre vonatkozó jelenlegi európai jogszabályoknak	Atitinka galiojančius Europos teisės aktus dėl medicinos priemonių	Atbilst pašreizējiem Eiropas tiesību aktiem par medicīnas ierīcēm	Conform cu legislația europeană în vigoare privind dispozitivele medicale	Usaglašeno sa tekućim evropskim propisima o medicinskim sredstvima
	Медицинско изделие	Zdravotnický prostředek	Medicinski proizvod	Orvosteknikai eszköz	Medicinos priemonė	Medicīniska ierīce	Aparat medical	Medicinsko sredstvo
	Уникален идентификатор на изделията	Jedinečným identifikátorem prostředku	Jedinstvena identifikacija proizvoda	Egyedi eszközazonosító	Unikalasis priemonės identifikatorius	Ierīces unikālais identifikators	Identificator unic al unui dispozitiv	Jedinstveni identifikator uređaja
	Направете справка с инструкциите за употреба	Čtěte uživatelskou příručku	Proučite upute prije korištenja	Consult használati utasítás	Žr. naudojimo instrukcijas	Skatīt lietošanas instrukciju	Consultați instrucțiunile de utilizare	Konsultujte instrukcije za upotrebu
	Производител	Výrobce	Proizvođač	Gyártó	Gamintojas	Ražotājs	Producător	Proizvođač
	Дистрибутор	Distributor	Distributer	Forgalmazó	Platintojas	Izplatītājs	Distribuito	Distributer
	Каталожен номер	Katalogové číslo	Kataloški broj	Katalógus száma	Katalogo numeris	Kataloga numurs	Număr de catalog	Kataloški broj
	Партиден номер	Číslo šarže	LOT	Batch kód	Partijos kodas	Partijas kods	Cod de Lot	Serijski broj
	Дата на производство	Datum výroby	Datum proizvodnje	Gyártás dátuma	Pagaminimo data	Ražošanas datums	Data de fabricație	Datum proizvodnje
	Използвай при	Spotřebujte do	Használata által	Használata által	Tinka iki	Izmantošanai	Data limită de utilizare	Rok upotrebe
	Температурни ограничения	Omezení teploty	Temperaturni raspon	Hőmérséklet korlátozás	Temperatūros apribojimas	Temperatūras ierobežojums	Limite de temperatură	Ograničenje temperature
	Ограничения на влажността	Omezení vlhkosti	Raspon vlažnosti zraka	Páratartalom korlátozás	Drėgnio apribojimas	Mitruma ierobežojumi	Limite de umiditate	Ograničenje vlažnosti vazduha
	Пазете от пряка слънчева светлина	Nevystavujte slunečnému záření	Štititi od direktnog sunčevog svjetla	Tartsa távol a napfénytől	Saugoti nuo saulės spindulių	Nepakļaut produkta atrašanās tiešā saules gaismā	A se feri de razele soarelui	Držati dalje od sunčeve svetlosti
	Mennyisége darabok	Počet kusů	Količina komada	Mennyisége darabok	Dalių kiekis	Vienumu daudzums	Număr de bucăți	Količina komada
	Не съдържа естествен гумен латекс	Neobsahuje přírodní latex	Ne sadrži prirodnu gumu i lateks	Nem tartalmaz természetes gumi latex	Sudėtyje nėra latekso	Nesatur dabīgās gumijas lateksu	Nu conține cauciuc natural (latex)	Ne sadrži prirodnu gumu lateks
	Не се допуска повторна употреба	Nepoužívat opakovaně	Nemojte ponovno koristiti	Ne használja újra	Pakartotinai nenaudoti	Nelietot atkārtoti	A nu se reutiliza	Zabranjena ponovna upotreba
	Съдържа фталати	obsahuje ftaláty	Sadrži ftalate	Tartalmazza ftalátok	Sudėtyje yra ftalatų	Satur ftalātus	Conține ftalați	Sadrži ftalate