

# Magyar:

Az Ambu Lifekey egy egyszer használatos, egyirányú szeleppel felszerelt védőmaszk, szájból szájba vagy szájból orrba történő lélegeztetéshez.

1. Bontsa ki maszkot.
2. A felirat a beteg felől nézve: „PATIENT”.  
A felirat az életmentő személyzet felől nézve: “TNƎITƎP”.  
Helyezze a maszkot a beteg arcára.
3. A pántokat húzza a beteg fülére.



Szájból  
orrba



Szájból  
szájba