

**DOB
TOP**

SANYLEGG[®]

M E D I C A L S T O C K I N G S

| | |
|----|--------------------------|
| IT | ISTRUZIONI PER L'USO |
| EN | INSTRUCTIONS FOR USE |
| ES | INSTRUCCIONES DE USO |
| PT | INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO |
| DE | GEBRAUCHSANWEISUNGEN |
| FR | MODE D'UTILISATION |
| HU | HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ |
| SK | NÁVOD NA POUŽÍVANIE |
| KR | 사용 방법 |
| EL | ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ |



SANYLEG[®]

MEDICAL STOCKINGS



| | |
|-----------|----|
| ITALIANO | 4 |
| ENGLISH | 6 |
| ESPAÑOL | 8 |
| PORTUGUÊS | 10 |
| DEUTSCH | 12 |
| FRANÇAIS | 14 |
| MAGYAR | 16 |
| SLOVENSKÝ | 18 |
| 한국어 | 20 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ | 22 |

Köszönjük, hogy Sanyleg terméket vásárolt, amely az elegancia és komfort, de mindenekelőtt a jólét szinonimája.

A könnyedség és jólét érzése a fokozatos kompresszió dinamikus hatásának köszönhető. Lágyan stimulálja a keringést, hogy elősegítse a vénás visszaáramlást. A kompresszió a bokától felfelé csökken.

A valós sarok lehetővé teszi:

- Hogy a sarok ténylegesen illeszkedjen a termék sarokrészébe, elősegítve a zokni nagyobb stabilitását,
- A maximális kompressziós pont megfelelő elhelyezését és jobb hordhatóságát és rugalmasságát a boka magasságában.

Jelölések

A Sanyleg termékek tényleges segítséget nyújtanak a vénás problémák megelőzésénél.

Különösen hatékonyak a fáradtság és a nehéz láb érzéssel szemben, és csökkentik a kései ödémát. Ha folyamatosan használja, akkor segít megelőzni vagy késleltetni a vénás billentyű elégtelenséget az erre hajlamos egyéneknél. Ajánljuk terhes nőknek, vagy felületes vénák disztális billentyűelégtelenségeinek korai megjelenésénél fiatal vagy középkorú személyeknél, akik sokat vannak talpon, vagy akik családban örökölték a hajlamot.

A Sanyleg zokni viseletére vonatkozó utasítások és tanácsok

Ajánlatos a zoknit közvetlenül felébredés után felvenni. Ügyeljen arra, hogy a zokni ne érintkezzen olajjal, krémekkel vagy egyéb kenőcsökkel, amelyeket orvosi előírásra vagy kozmetikai okokból használ. Érdes körmök vagy sarokgyűrűk károsíthatják a termék szemeit. Ha a bőre nedves, akkor hintőporozza be, így a zokni jobban csúszik.

1 - Fordítsa ki a zoknit a lábfej részén felül. Legjobb, ha a zoknit a sarkáig kifordítja.

- Két kézzel nyújtsa ki a lábfej részt és dugja bele a lábát a sarkáig.

- Fordítsa vissza ki a kifordított részt a lábára, a sarkát a megfelelő helyre téve.

2 - Térdig nyújtsa ki a lábát és húzza fel a zoknit a tenyerével. Soha ne húzza a zoknit közvetlenül a felső részénél

- Ha harisnyáról van szó, akkor az előző folyamatot addig végezze, amíg a harisnyát mindkét lábára térdig felhúzza.

3 - Tekerje vissza a harisnya fennmaradó részét a lába közégig, a tenyerével igazítsa helyre a harisnyát ellenőrizve, hogy a kompressziót egyenletesen elosztotta.

- A nyitott lábfejű zoknikat a csomagban található "zoknifelhúzó" segítségével vegye fel.



Abszolút ellenjavallatok

Előrehaladott állapotban levő perifériás artériás elzáródásos betegségek - Alsó végtagok kóros masszív ödémája - Szeptikus visszérgyulladás - Súlyos visszérgyulladás, mint a phlegmasia cerulea dolens - Nyirokérgyulladás - Periférikus neuropátia előrehaladott állapotban (pl. inzulinfüggő cukorbetegség) - A végtagérzékenység egyéb zavarai Intolerancia/allergia a kompresszív zoknik anyagára.

Relatív ellenjavallatok

Fekélyek és nyílt sebek - Nedves dermatózis - Immobilitás - Pangás miatti bőrgyulladás

Felületes és mélyvéna-rendszer komoly billentyű inkontinencia. - Akut mélyvénás trombózis vagy akut vénafalgyulladás - Vénafalgyulladást utáni szindróma - A szilikonfalú zoknik bőrirritációt okozhatnak az anyag-
ra való hiperérzékenység esetén,

Különleges figyelmeztetések

A Sanyleg kompressziós zoknikat csak a kezelőorvosa beleegyezése után viselje. A Sanyleg kompressziós zoknikat csak képezített személy áruhatja. Ha, a kompressziós zokni használata során fájdalmat vagy bőrirritációt észlel, akkor azonnal vegye le a zoknit és keresse fel a házi orvosát vagy az engedélyezett viszonteladót.

Anyagösszetétel

Minden egyes termék összetétele a csomag belsejében olvasható. A következőkben felsoroljuk a termékeinket felépítő anyagokat.

CO: Pamut - **EA:** Elasztán - **PA:** Poliamid - **WO:** Gyapjú - **PP:** Polipropilén

A termék élettartama

A Sanyleg kompressziós zoknikat legfeljebb 6 hónapon keresztül használhatja. Ne lépje túl a csomagoláson olvasható lejáratot.

Mosási utasítások

A Sanyleg zoknik kézzel és géppel is moshatók.

- **Kézi mosás:** használjon érzékeny szöveteknél használt tisztítószer. Öblítse ki gondosan. Ne vasalja. Levegőn szárítsa.
- **Gépi mosás:** a terméket tegye megfelelő zacskóba vagy ennek hiányában egy párnahuzatba. Ne hipózza. Ne szárítsa gépben.
- **Szárzisztításra nem alkalmas. Ne vasalja.**



Figyelem

A gyártó nem felel az olyan károkért/sérülésekért, amelyek a termék helytelen vagy az előírttól eltérő használata miatt keletkeznek.

SANYLEG⁺

MADE IN ITALY

Sanyleg S.r.l. Unipersonale
Via Albania, 1/3 - Castel Goffredo (Mantova) Italy



www.sanyleg.com

