

REF

KDB-699 (GIMA 43202)



Zhongshan Kangdebao(KDB) Rehabilitation Equipment Co.,Ltd.
Card 1, No.5, 24# Longcheng Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China
Made in China

EC

REP

SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT:

A komód szék beteg, sérült vagy fogyatékkal élők vécézésére szolgál, otthoni vagy kórházi használatra.

KEZELŐ

Az eszközt maga a felhasználó, az ápoló személyzet vagy a gondozó kezelheti

BETEGCSOPORTOK

Fogyatékkal élők, betegek és idősek.

ELLENJAVALLATOK

Felügyelje a gyermekeket, ha a komód széket használják.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Ez a termék összecsukható szerkezetű, használat előtt csak ki kell hajtani a keretet, és fel kell szerelni a szükséges alkatrészeket - például kerekeket -, rögzíteni kell a vödört és az ülésplanelt.
- Emelje fel az ülőkét, helyezze a vödört megfelelően a vödörkeretre, majd hajtsa le az ülőkét a használatához.
- Használat után zárja be a vödör fedelét, távolítsa el a vödörkeretről.
- A komód szék összecsukható, amikor nem használja, ez előnyös a tárolás szempontjából, és kevés helyet foglal.

KARBANTARTÁS

- A termék felületét ne karcolja meg illetve ne karcolja kemény tárggyal, hogy elkerülje az anyag sérülését.
- A komód széket ne tegye ki napra és esőbe, és minden használat után azonnal törölje szárazra.
- A mozgó alkatrészeket megkenheti néhány kiváló minőségű kenőanyaggal, ami segíti a jobb a használatot.
- Rendszeresen ellenőrizze a komód szék csatlakozásait, hogy elkerülje a kilazult és kieső részek miatti baleseteket.
- Gyakran ellenőrizze a teljes széket, hogy vannak-e repedések és egyéb hibák, amelyek kihatnak a szék használatára.
- Gyakran ellenőrizze, hogy az ülés kerete és az ülőke szilárdak-e.
- A szerkezeti károsodás elkerülése érdekében a terméket stabilan helyezze el, és ne rázza. A kerekes komód széket NE használja tolószékként, csupán kis távolságú mozdításhoz.
- Ne álljon a székre, ha le vannak szerelve a lábai, mert a termék felborulhat.

TÁROLÁS

A becsomagolt komód széket szellőző és száraz helyen tárolja, ahol korrozív gáz nélküli, szellőző és tiszta szobában. Szállítás közben kerülje a nedves, erős fényt, és tartsa távol hőforrásoktól.

ÁRTALMATLANÍTÁS

Az ártalmatlanítási korlátozások a használat során fellépő szennyeződéstől függenek, és a nemzeti vagy helyi jogszabályok hatálya alá tartoznak.

Minden, az általunk szolgáltatott orvostechnikai eszközzel kapcsolatos súlyos balesetet jelenteni kell a gyártó felé és annak a tagállamnak a hivatalos szerve felé, ahol az Ön székhelye található.

CÍMKÉK, CSOMAGOLÁS LOGÓTERVEZÉS:

Szimbólum	Jelentése	Szimbólum	Jelentése
	Az (EU) 2017/745 rendeletnek megfelelő orvostechnikai eszköz		Orvosi eszköz
	Gyártó		Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben
	Gyártási dátum		Tárolja napfénytől távol
	Tételszám		Nem steril
	Figyelmeztetés: Olvassa el és kövesse figyelmesen a használati utasításokat (figyelmeztetéseket).		Termék kódja
	Olvassa el a használati utasítást		Tárolja hűvös, száraz helyen
	Importált innen		

GIMA GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

A termékre a Gima szokásos, 12 hónapos B2B garanciája érvényes.

MAGYAR