

**BARELLA-SEDIA A ROTELLE PIEGHEVOLE
WHEELCHAIR FOLDING STRETCHER
CHARIOT-BRANCARD PLIABLE
ROLLSTUHL UND KLAPPBARE TRAGE
CAMILLA PLEGABLE PARA SILLAS DE RUEDAS
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΙΟ-ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ
НОСИЛКА-ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА С КОЛЕЛА, СГЪВАЩА СЕ
SKŁÁDACÍ NOSÍTKA PRO INVALIDNÍ VOZÍK
SAMMENKLAPPELIG KØRESTOLSBÅRE
KOKKUPANDAV RATASTEGA KANDERAAM-TOOL
TAITETTAVA PAARI-PYÖRÄTUOLI
SKLOPIVA INVALIDSKA KOLICA NOSILA
ÖSSZECSUKHATÓ KERKESSZÉK-ÖSSZECSUKHATÓ
SULANKSTOMAS NEJGALIOJO VEŽIMĖLIS – NEŠTUVAI
RATINĖKRĖSLA SALIEKAMĀS NESTUVES
INKLAPBARE ROLSTOELBRANCARD
NOSZE SKŁADANE W WÓZEK INWALIDZKI
TARGĀ PLIABILĀ TIP SCAUN CU ROTILE
ZLOŽLJIVA NOSILA ZA INVALIDSKI VOZIČEK
HOPFÄLLBAR SJUKBÅR FÖR RULLSTOL**

REF TD010113A (GIMA 56020)



Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd
No.999 Hongqi Road, Changyinsha
Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
Made in China



SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



A gyártónak, illetve a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának jelezni kell bármilyen olyan súlyos balesetet, amely az általunk szállított orvostechnikai eszközzel kapcsolatban történt.

Műszaki paraméterek:

1. méret (H*SZ*M): Méret nyitva: 196*50*18 (cm) Méret összecsukva: 106*50*15 (cm)
2. Méret kerekesszékre összecsukva: Háttámla magassága: 136cm Ülész magassága: 52cm
3. Nettó súly:9kg Bruttó súly:11kg
4. Teherbírás: 159 kg



Használati mód:

1. Az első ábra szerint: Amikor az alumínium kerekesszékes hordágyat nyitott állapotban használja, célszerű biztonsági övet használni, amikor a beteg a hordágyon van.
2. Csukja be kerekesszékes alkalmazásra a 2. ábra szerint, először hajtja össze, majd emelje fel a nyíl irányába, hogy a harmadik ábrán látható helyzetbe kerüljön. Rögzítse a biztonsági csapot (ügyeljen, hogy a 2-es rögzítő az 1-es biztonsági csavarra akaszkodjon).
3. A 3. ábra a támasztólábakat mutatja; eltérő típusú keréken is kapható. A termék teljesítménye, a használat, a rendeltetés mind egyező.
4. A hordágy, a 4. ábra szerinti becsukott konfigurációban, megkönnyíti a szállítást zárt környezetekben; (amikor a hordágy a 3. ábra szerinti konfigurációban található, akassza ki a rögzítő csapot, támassza a lábat a kerekek melletti rúdra, és emelje a háttámla kitömött rúdját felfelé, hogy visszaállítsa a hordágyat az 1. ábra szerinti konfigurációba; ezután össze lehet csukni).

Rendeltetés szerű használat:

A terméket használhatja keskeny bejárati folyosón, kanyargós folyosón vagy több emeletes lépcsőházban stb, nehezen hozzáférhető zárt területeken.

Karbantartás:

1. Rendszeresen tartsa tisztán (Beleértve a fertőtlenítést)
2. Gyakran vizsgálja át, hogy az alkatrészek nem lazultak-e meg.

Megjegyzés

Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a biztonsági öv jó állapotban legyen, és hogy a biztonsági csap megfelelően be legyen akasztva a biztonsági csavarba, amikor a hordágyat a kerekesszékes konfigurációban használja.

Tárolás és szállítás:

1. A terméket tartsa nedvességmentes, nem korrozív környezetben.
2. A terméket normál szállítóeszközökkel lehet szállítani.
3. A tároláshoz és a szállításhoz tartsa be a csomagolódobozon található utasításokat.

Csomagolás és kiegészítők:

1. A termék kartonba van csomagolva.
2. Kiegészítők: Megfelelőségi tanúsítvány, használati utasítás.

	Gyártó		Száraz, hűvös helyen tárolandó		Importálta:
	Termékkód		Nem steril		Figyelem: Figyelmesen olvassa el és kövesse a használati utasításokat (figyelmeztetéseket)
	Numero di lotto		Orvostechnikai eszköz		Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben
	Olvassa el a használati utasításokat		Gyártás dátuma		
	A 2017/745/EU rendeletnek megfelelő orvostechnikai eszköz				

GIMA GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

A termékre a Gima szokásos, 12 hónapos B2B garanciája érvényes.