



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**OROLOGI DA INFERMIERE  
WATCH FOR NURSES  
MONTRES INFIRMIÈRES  
RELOJ DE ENFERMERÍA  
RELÓGIOS PARA ENFERMEIROS  
KRANKENSCHWESTERUHREN  
ZEGARKI PIELĘGNIARSKIE  
ΡΟΛΟΙ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥΣ**

ساعات الممرضة

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guia de uso - Guia para utilização  
Gebrauchs- und instandhaltungsanleitung - Podręcznik obsługi i konserwacji  
Οδηγίες χρήσης -

- تعليمات الاستخدام والصيانة

GIMA	REF	GIMA	REF	GIMA	REF
20400	NS881WHITE	20421	NS881	20455	NS885
20401	NS881BLU	20422	NS881	20460	NS885
20402	NS881RED	20423	NS881	20461	NS885
20403	NS881VIOLET	20424	NS881	20462	NS885
20404	NS881PINK	20425	NS881	20463	NS885
20405	NS881BLACK	20410	NS881WBOX	20464	NS885
20420	NS881	20411	NS881BBOX	20465	NS885



Nox Industry Co., Limited  
603-5 NO.17-2 Wanghai Road, Siming District  
Xiamen, China, P.C. 361008  
info@noxtime.com  
Made in China



**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



## **Modo d'uso orologi da infermiere**

Vi ringraziamo per aver scelto il nostro modello di orologio da infermiere in silicone e ci auguriamo che il suo utilizzo vi darà piena soddisfazione.

Si può notare, prima della messa in funzione dell'orologio, l'eventuale movimento di uno degli aghi. Ciò è dovuto al fatto che l'azionamento del movimento non è ancora stato attivato. Una volta che la linguetta di protezione della batteria verrà rimossa, l'ago si muoverà solo in un unico senso.

Per mettere in funzione l'orologio, estrarlo dal suo corpo in silicone e rimuovere la linguetta di protezione sul meccanismo di ricarica. Tirare il meccanismo di ricarica, ruotarlo per impostare l'ora e riportare il meccanismo nel suo alloggiamento per bloccarlo. Rimettere il corpo dell'orologio dal lato opposto allo spillo di fissaggio.

### **Pulizia**

Rimuovere l'orologio dal suo supporto in silicone e pulire la parte in silicone con un panno imbevuto d'acqua e sapone o di alcool a 70°.

Per il corpo dell'orologio, passare un panno umido in quanto l'orologio è stagno.

**PESO:** 30 grammi.

**BATTERIA:** pila a bottone SR626SW (quando la batteria è scarica, buttarla nell'apposito contenitore di raccolta, fare riferimento alla procedura di raccolta delle batterie).

**DURATA DELLA BATTERIA:** 18 mesi.

**SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA:** sul retro dell'orologio si trova un intaglio per aprire la cassa e accedere alla batteria. Sollevare la parte posteriore con uno strumento appuntito e sottile.

Rimuovere la protezione bianca in plastica e togliere la batteria facendola scivolare sul lato. Inserire la nuova batteria rispettando la polarità, con il "+" verso l'alto. Rimettere la protezione bianca e richiudere la cassa.

### **CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA**

Ci congratuliamo con Voi per aver acquistato un nostro prodotto.

Questo prodotto risponde a standard qualitativi elevati sia nel materiale che nella fabbricazione. La garanzia è valida per il tempo di 12 mesi dalla data di fornitura GIMA. Durante il periodo di validità della garanzia si provvederà alla riparazione e/o sostituzione gratuita di tutte le parti difettose per cause di fabbricazione ben accertate, con esclusione delle spese di mano d'opera o eventuali trasferte, trasporti e imballaggi. Sono esclusi dalla garanzia tutti i componenti soggetti ad usura.

La sostituzione o riparazione effettuata durante il periodo di garanzia non hanno l'effetto di prolungare la durata della garanzia. La garanzia non è valida in caso di: riparazione effettuata da personale non autorizzato o con pezzi di ricambio non originali, avarie o vizi causati da negligenza, urti o uso improprio. GIMA non risponde

di malfunzionamenti su apparecchiature elettroniche o software derivati da agenti esterni quali: sbalzi di tensione, campi elettromagnetici, interferenze radio, ecc.  
La garanzia decade se non viene rispettato quanto sopra e se il numero di matricola (se presente) risulta asportato, cancellato o alterato. I prodotti ritenuti difettosi devono essere resi solo e soltanto al rivenditore presso il quale è avvenuto l'acquisto.  
Spedizioni inviate direttamente a GIMA verranno respinte.

Indice dei Simboli / Index of symbols / Liste des symboles / Symbole / Índice de símbolos /  
 Índice de Símbolos / Indeks symboli / Πίνακας συμβόλων / مؤشرات سوبولات

	<p><b>IT</b> - Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso  <b>GB</b> - Caution: read instructions (warnings) carefully  <b>FR</b> - Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)  <b>DE</b> - Achtung: Anweisungen (Warings) sorgfältig lesen  <b>ES</b> - Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente</p>	<p><b>PT</b> - Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente  <b>PL</b> - Ostrzeżenie - Zobacz instrukcję obsługi  <b>GR</b> - Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις)  <b>SA</b> - الحذر - قراءة التعليمات (التحذيرات) بعناية</p>
	<p><b>IT</b> - Conservare in luogo fresco ed asciutto  <b>GB</b> - Keep in a cool, dry place  <b>FR</b> - À conserver dans un endroit frais et sec.  <b>DE</b> - An einem kühlen und trockenen Ort lagern  <b>ES</b> - Conservar en un lugar fresco y seco</p>	<p><b>PT</b> - Armazenar em local fresco e seco  <b>PL</b> - Przechowywać w suchym miejscu  <b>GR</b> - Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον  <b>SA</b> - يحفظ في مكان بارد وجاف</p>
	<p><b>IT</b> - Seguire le istruzioni per l'uso  <b>GB</b> - Follow instructions for use  <b>FR</b> - Suivez les instructions d'utilisation  <b>DE</b> - Folgen Sie den Anweisungen  <b>ES</b> - Fabricante</p>	<p><b>PT</b> - Siga as instruções de uso  <b>PL</b> - Patrz podęcznik użytkownika  <b>GR</b> - Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης  <b>SA</b> - مستورد عن طريق</p>
	<p><b>IT</b> - Prodotto conforme alla Direttiva Europea  <b>GB</b> - Product complies with European Directive  <b>FR</b> - Ce produit est conforme à la directive européenne  <b>DE</b> - Produkt gemäß EU-Richtlinie  <b>ES</b> - Producto conforme a la Directiva Europea</p>	<p><b>PT</b> - Produto em conformidade com a Diretiva Europeia  <b>PL</b> - Produkt zgodny z Dyrektywą Europejską  <b>GR</b> - Προϊόν σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία  <b>SA</b> - المنتج متوافق مع التوجيه الأوروبي</p>
	<p><b>IT</b> - Codice prodotto  <b>GB</b> - Product code  <b>FR</b> - Code produit  <b>DE</b> - Erzeugniscode  <b>ES</b> - Código producto</p>	<p><b>PT</b> - Código produto  <b>PL</b> - Numer katalogowy  <b>GR</b> - Κωδικός προϊόντος  <b>SA</b> - كود المنتج</p>
	<p><b>IT</b> - Conservare al riparo dalla luce solare  <b>GB</b> - Keep away from sunlight  <b>FR</b> - À conserver à l'abri de la lumière du soleil  <b>DE</b> - Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern  <b>ES</b> - Conservar al amparo de la luz solar</p>	<p><b>PT</b> - Guardar ao abrigo da luz solar  <b>PL</b> - Przechowywać z dala od światła słonecznego  <b>GR</b> - Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία  <b>SA</b> - يحفظ بعيداً عن ضوء الشمس</p>
	<p><b>IT</b> - Numero di lotto  <b>GB</b> - Lot number  <b>FR</b> - Numéro de lot  <b>DE</b> - Chargennummer</p>	<p><b>ES</b> - Número de lote  <b>PT</b> - Número de lote  <b>PL</b> - Kod partii  <b>GR</b> - Αριθμός παρτίδας  <b>SA</b> - رقم الدفعة</p>
	<p><b>IT</b> - Smaltimento RAEE  <b>GB</b> - WEEE disposal  <b>FR</b> - Disposition DEEE  <b>DE</b> - Beseitigung WEEE  <b>ES</b> - Disposición WEEE</p>	<p><b>PT</b> - Disposição REEE  <b>PL</b> - Oddzielna zbiórka dla tego urządzenia.  <b>GR</b> - Διάθεση WEEE  <b>SA</b> - التخلص WEEE</p>
	<p><b>IT</b> - Importato da  <b>GB</b> - Imported by  <b>FR</b> - Importé par  <b>DE</b> - Eingeführt von  <b>ES</b> - Importado por</p>	<p><b>PT</b> - Importado por  <b>PL</b> - Importowane przez a  <b>GR</b> - Εισαγωγή από  <b>SA</b> - مستورد عن طريق</p>