



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Italia: tel. 199 400 401 - fax 199 400 403
Export: tel. +39 02 953854209/221/225 - fax +39 02 95380056
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

OROLOGIO DIGITALE PER INFERMIERI DIGITAL NURSE WATCH MONTRE D'INFIRMIÈRE DIGITALE RELOJ DIGITAL PARA ENFERMERA

**Manuale d'uso - User manual
Manuel de l'utilisateur - Guía de uso**




ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

REF 20480



Gima S.p.A.
Gessate (MI) - Italy
Made in China



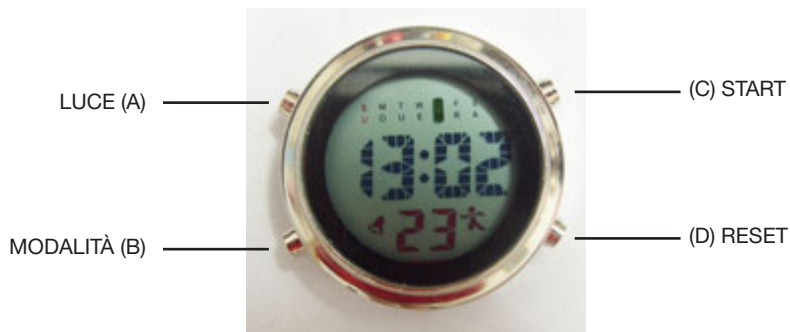

Funzioni

Display a 6 cifre: mese, data,
giorno della settimana, ore, minuti, secondi
Modalità cronografo
Impostazione 12/24 ore
Allarme
Retroilluminazione elettroluminescente.



Istruzioni

Impostazione dell'ora, della data e del giorno della settimana

Premere B 3 volte finché non lampeggiano i secondi, impostare l'ora premendo D, C, premere C per confermare e tornare al display in modalità normale.

Impostare l'ora con la procedura seguente:

Premere B 3 volte (Esempio: **13:02:23**).

I secondi (23) lampeggiano; premere D per aumentarli, C per tornare a 00 e una seconda volta per confermare.

I minuti (02) lampeggiano; premere D per aumentarli e C per confermare.

Le ore (13) lampeggiano; premere D per aumentarle e C per confermare.

A questo punto la data lampeggia; premere D per aumentare le cifre e C per confermare.

Il mese lampeggia; premere D per aumentare le cifre e C per confermare.

Le settimane lampeggiano; premere D finché non lampeggia il giorno esatto, poi premere B per confermare tutte le impostazioni e tornare alla modalità normale del display.



Modalità cronografo

Con il display in modalità normale, premere B una volta per entrare in modalità cronografo, premere D una volta per avviare o arrestare il conteggio del tempo. Premere C una volta per azzerare i dati. Premere B una volta per tornare alla modalità normale del display.



Impostazione formato 12/24 ore

Con il display in modalità normale, premere B 3 volte per entrare nella modalità di impostazione dell'ora, premere C 2 volte per entrare nella modalità di impostazione del formato 12/24 ore, premere D finché non compare 12/24. Premere B una volta per tornare alla modalità normale del display.

Retroilluminazione elettroluminescente

Premere A una volta; la retroilluminazione si accende per 3 secondi.

Impostazione dell'allarme

Con il display in modalità normale, premere B 2 volte per entrare nella modalità allarme: le ore lampeggiano; premere D per regolare le ore, poi premere C: i minuti lampeggiano; premere D per regolare i minuti, poi premere B per tornare alla modalità display normale.

Attivazione /disattivazione allarme

Tenere premuti C e D contemporaneamente per attivare o disattivare l'allarme. L'allarme dura un minuto.

Segnale acustico orario

Tenendo premuto C, premere B per attivare/disattivare il segnale acustico orario. Quando è attivo, sono visualizzati tutti i giorni della settimana. In caso contrario, il segnale acustico orario non è in funzione.

Sostituzione della batteria

Sul retro dell'orologio si trova un intaglio per aprire la cassa e accedere alla batteria. Sollevare la parte posteriore con uno strumento appuntito e sottile. Rimuovere il coperchio metallico e togliere la batteria facendola scivolare sul lato. Inserire la nuova batteria rispettando la polarità, con il "+" verso l'alto. Rimettere il coperchio metallico e richiudere la cassa.

Peso: 45g

Batteria: Batteria al litio 3V CR2025



Smaltimento: *Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per ulteriori informazioni sui luoghi di raccolta, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto. In caso di smaltimento errato potrebbero venire applicate delle penali, in base alle leggi nazionali.*

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Ci congratuliamo con Voi per aver acquistato un nostro prodotto.

Questo prodotto risponde a standard qualitativi elevati sia nel materiale che nella fabbricazione. La garanzia è valida per il tempo di 12 mesi dalla data di fornitura GIMA. Durante il periodo di validità della garanzia si provvederà alla riparazione e/o sostituzione gratuita di tutte le parti difettose per cause di fabbricazione ben accertate, con esclusione delle spese di mano d'opera o eventuali trasferte, trasporti e imballaggi. Sono esclusi dalla garanzia tutti i componenti soggetti ad usura.

La sostituzione o riparazione effettuata durante il periodo di garanzia non hanno l'effetto di prolungare la durata della garanzia. La garanzia non è valida in caso di: riparazione effettuata da personale non autorizzato o con pezzi di ricambio non originali, avarie o vizi causati da negligenza, urti o uso improprio. GIMA non risponde di malfunzionamenti su apparecchiature elettroniche o software derivati da agenti esterni quali: sbalzi di tensione, campi elettromagnetici, interferenze radio, ecc. La garanzia decade se non viene rispettato quanto sopra e se il numero di matricola (se presente) risulta asportato, cancellato o alterato. I prodotti ritenuti difettosi devono essere resi solo e soltanto al rivenditore presso il quale è avvenuto l'acquisto. Spedizioni inviate direttamente a GIMA verranno respinte.