

MASCHERINA DEFENCE FFP3 NR D

ISTRUZIONI PER L'USO

- La mancata osservanza di tutte le istruzioni e le limitazioni può comportare la riduzione dell'efficacia del respiratore, l'insorgenza di malesseri e lesioni o la morte.
- Un respiratore scelto correttamente è essenziale. Prima dell'impiego nell'attività professionale, l'utilizzatore deve essere istruito dal datore di lavoro sull'uso corretto del respiratore in conformità alle norme di sicurezza e sanitarie in vigore.
- Il prodotto non eroga ossigeno. Utilizzare solo in aree adeguatamente ventilate contenenti ossigeno in quantità sufficiente per la sopravvivenza.
- Scartare il respiratore e sostituirlo con uno nuovo se:
 - l'ostruzione eccessiva del respiratore rende difficoltosa la respirazione;
 - il respiratore viene danneggiato.
- Lasciare l'area contaminata in caso di vertigini, irritazione o altre forme di malessere.
- Conservare i respiratori nella scatola a dispenser al riparo dalla luce diretta del sole fino al loro uso.
- Prima di indossare il respiratore, gli utilizzatori devono essere sottoposti a fit test qualitativo o quantitativo in conformità alla norma 29CFR 1910.134.
- Prima di indossare il respiratore, gli utilizzatori devono verificare se sono presenti incrinature o macchie intorno alla zona di saldatura. In caso affermativo, la mascherina deve essere subito scartata e non può essere riutilizzata.
- Conservare i respiratori inutilizzati nella loro confezione chiusa, in un luogo asciutto e non contaminato, a una temperatura compresa tra +5°C e +38°C. La scadenza dalla data di produzione è 3 anni.

LIMITAZIONI ALL'USO

- NON usare il respiratore e NON entrare o rimanere in un'area contaminata nei seguenti casi:
 - l'atmosfera contiene meno del 19,5% di ossigeno;
 - si avverte odore o sapore di contaminanti;
 - per la protezione da gas o vapori;
 - i contaminanti o le loro concentrazioni non sono noti o costituiscono un pericolo immediato per la vita o per la salute;
 - le concentrazioni dei contaminanti superano le massime concentrazioni d'uso secondo gli standard OSHA vigenti o i regolamenti governativi vigenti oppure sono 50 volte superiori al Limite di Esposizione Ammissibile (PEL, Permissible Exposure Limit), se inferiore;
 - per la sabbiatura, la verniciatura a spruzzo e l'amianto;
 - per l'utilizzo in atmosfere esplosive.
- NON modificare o usare in modo improprio il respiratore.
- NON usare il respiratore in presenza di barba o altre condizioni che possano impedire una buona aderenza al viso.

Attenzione:


Il respiratore contribuisce alla protezione contro alcuni contaminanti del particolato, ma non elimina l'esposizione a malattie o infezioni o il rischio di contrarle. L'uso improprio può comportare malessere o decesso.

ISTRUZIONI PER INDOSSARE IL RESPIRATORE

- Appoggiare le dita all'interno del respiratore. Piegare il nasello intorno alle dita per dargli la forma del naso.
- Posizionare il respiratore sul naso e sulla bocca, con gli stringitesta intorno al dorso della mano. Tirare lo stringitesta inferiore al di sopra della testa e posizionarlo sul retro del collo.
- Tirare lo stringitesta superiore al di sopra della testa e posizionarlo al di sopra delle orecchie.
- Con entrambe le mani, adattare il nasello alla forma del naso e regolare i lacci stringitesta in modo da garantire una perfetta aderenza al viso.
- Verificare l'aderenza
 - Per verificare la tenuta di un respiratore senza valvola di espirazione, appoggiare entrambe le mani a coppa sul respiratore ed

espirare con forza.

- Per verificare la tenuta di un respiratore con valvola di espirazione, appoggiare entrambe le mani a coppa sulla maschera ed inspirare con forza: dovrebbe rilevarsi una pressione negativa all'interno del respiratore.
 - Se si avverte il passaggio dell'aria nell'area del naso, regolare/stringere il nasello.
 - Se si avverte il passaggio dell'aria intorno ai bordi del respiratore, riposizionare il respiratore/ i lacci stringitesta per ottenere un'aderenza migliore.
- Sostituire immediatamente il respiratore se la respirazione diventa difficile o il respiratore viene danneggiato o deformato.
 - Cambiare il respiratore se non si riesce a ottenere un'adeguata aderenza al viso.
 - La stretta osservanza di queste istruzioni è un fattore importante nell'uso sicuro del respiratore.

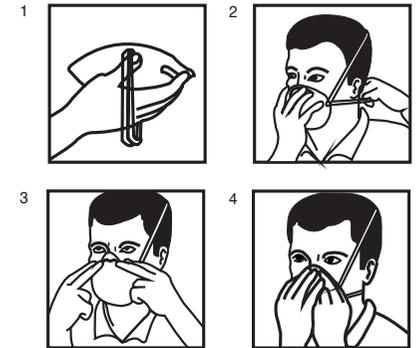

Indice dei simboli

	Non sterile		Leggere le istruzioni per l'uso
	Fabbricante		Data di fabbricazione
	Codice prodotto		Numero di lotto
	Data di scadenza		Conservare al riparo dalla luce solare
	Limite di umidità		Limite di temperatura
	Dispositivo monouso, non riutilizzare		Dispositivo di protezione individuale conforme al regolamento UE 2016/425