# iHealth

## Wireless Body Analysis Scale

- FR Balance d'Analyse Corporelle Connectée
- Báscula inalámbrica de análisis corporal
- Balança de Análise Corporal sem Fios
- Bilancia pesapersone con analisi corporea wireless
- DE Drahtlose Körperanalysewaage
- Draadloze weegschaal voor lichaamsanalyse



### OWNER'S MANUAL

- FR MANUEL DE L'UTILISATEUR
- MANUAL DE USUARIO
- MANUAL DO PROPRIETÁRIO
- MANUALE DI ISTRUZIONI
- DE BEDIENUNGSANLEITUNG
- NL GEBRUIKERSHANDLEIDING

GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

NOTE D'USO IMPORTANTI · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
CONTROINDICAZIONI · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
MEMORIA OFFLINE	2
SPECIFICHE · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2
SICUREZZA GENERALE E PRECAUZIONI ······	2
SIGNIFICATO DEI SIMBOLI · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3

DESTINAZIONE D'USO · · · · · · 1

#### DESTINAZIONE D'USO

La bilancia pesapersone con analisi corporea wireless è uno strumento elettronico di precisione destinato all'uso da parte di persone adulte. La bilancia impiega una metodologia completamente elettronica e dei sensori di pressione per misurare in modo automatico e non invasivo la composizione corporea. Le misurazioni sono visualizzate e memorizzate su iPod touch, iPhone o iPad con relativa data e ora.

#### NOTE D'USO IMPORTANTI

Prima di utilizzare questo prodotto, le donne in stato di gravidanza devono consultare il proprio medico curante. Alcune condizioni fisiche possono alterare i livelli di idratazione, causando risultati non precisi. Per maggiori informazioni consultare il medico curante. Conservare sempre la bilancia pesapersone con analisi corporea wireless iHealth in un luogo asciutto. Per garantire risultati precisi mantenere la bilancia al riparo da campi magnetici, in quanto potrebbero danneggiarla o alterarne il funzionamento.

#### CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare questo prodotto in concomitanza con:

- ♠ (1) Impianti medici elettronici quali pacemaker.
- ⚠ (2) Sistemi elettronici di supporto vitale quali cuore o polmoni artificiali.
- ⚠ (3) Dispositivi medici elettronici portatili quali elettrocardiografi.
  Questo prodotto può causare il malfunzionamento di tali dispositivi,
  mettendo a rischio la salute degli utenti.



1

#### MEMORIA OFFLINE

La bilancia è in grado di memorizzare fino a 200 risultati per utente. Quando la memoria è piena, i risultati più vecchi vengono sovrascritti.

#### **SPECIFICHE**

- Nome del prodotto: bilancia pesapersone con analisi corporea wireless iHealth
- 2. Modello: HS6
- Classificazione: alimentazione interna, parte applicata di tipo BF (quattro elettrodi)
- 4. Alimentazione: 4 batterie --- AAA da 1,5 V

  Durata delle batterie: circa 3 mesi in caso di utilizzo giornaliero
- 5. Intervalli di misurazione

Peso corporeo: 5-180 kg / 11-400 lb

Grasso corporeo: 5,0-65,0 %

Temperatura: 5-40 ℃ (41-104 °F)

Umidità: 20-85 % RH

Risoluzione: 0,1 kg / 0,2 lb

6. Precisione

Peso corporeo:  $\pm 0.5 \text{ kg} / 1.1 \text{ lb} (5-50 \text{ kg} / 11-110 \text{ lb});$ 

± 1 % (50-180 kg / 110-400 lb)

Grasso corporeo: ± 1 %

- 7. Temperatura di esercizio: 5-40 °C (41-104 °F)
- 8. Umidità di esercizio: 20-85 % RH
- 9. Temperatura di conservazione e trasporto: -20-55 °C (-4-131 °F)
- 10. Umidità di conservazione e trasporto: ≤ 90 % RH

#### SICUREZZA GENERALE E PRECAUZIONI

1. Non utilizzare la bilancia su pavimenti irregolari, superfici

- morbide o tappeti, ciò potrebbe compromettere l'affidabilità dei dati.
- 2. Questa bilancia pesapersone con analisi corporea wireless è stata progettata per l'uso da parte di persone adulte. Il prodotto non deve essere utilizzato da neonati, bambini o persone che non sono in grado di stare in piedi immobili senza assistenza.
- Mantenere la bilancia fuori dalla portata di apparecchi che possono creare campi magnetici forti, come ad esempio forni a micronde ecc.
- Le prestazioni e la sicurezza della bilancia rimangono ottimali per almeno 10.000 misurazioni o due anni di utilizzo.

#### INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Il produttore garantisce che la bilancia pesapersone con analisi corporea wireless è priva di difetti di fabbricazione e nei materiali per un anno dalla data di acquisto, se utilizzata seguendo le istruzioni fornite. Tale garanzia si estende solamente all'acquirente originale. Il produttore si riserva il diritto di riparare o sostituire a propria discrezione, senza costi aggiuntivi, i prodotti coperti da garanzia. La riparazione o la sostituzione sono l'unica responsabilità del produttore e l'unica soluzione per i prodotti in garanzia.

#### SIGNIFICATO DEI SIMBOLI



Simbolo di "CONSULTARE IL MANUALE DI ISTRUZIONI"



Simbolo di "ATTENZIONE"



Simbolo di "PARTI APPLICATE DI TIPO BF"



Simbolo di "PROTEZIONE DELL'AMBIENTE: i rifiuti di prodotti elettronici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Riciclare tali rifiuti nelle apposite strutture. Per consigli sullo smaltimento rivolgersi alle autorità locali o al rivenditore".



Simbolo di "PRODUTTORE"



Simbolo di "MANTENERE IN AMBIENTI ASCIUTTI"



Simbolo di "Anno di produzione"



Con la presente, [iHealth Lab Inc.], dichiara che questo [HS6 CORE] è in conformità con i requisiti essenziali e le altre disposizioni pertinenti della Direttiva 1999/5/EC. La dichiarazione di conformità della Direttiva 1999/5/EC possono essere scaricati dal seguente link: https://www.ihealthlabs.eu/support/certifications



ANDON HEALTH CO., LTD. No. 3 Jinping Street, YaAn Road, Nankai District, Tianjin 300190, China. Tel: 86-22-60526161

iHealth è un marchio di iHealth Lab Inc.

Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.