



iHealth[®] Edge

Motivati. Muoviti. Rileva



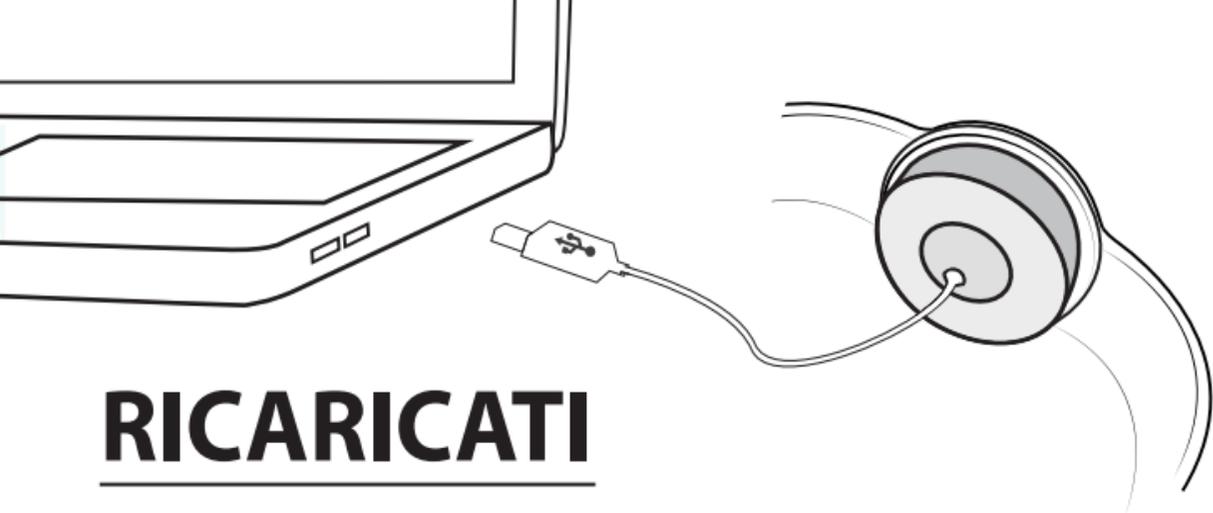


RICARICATI

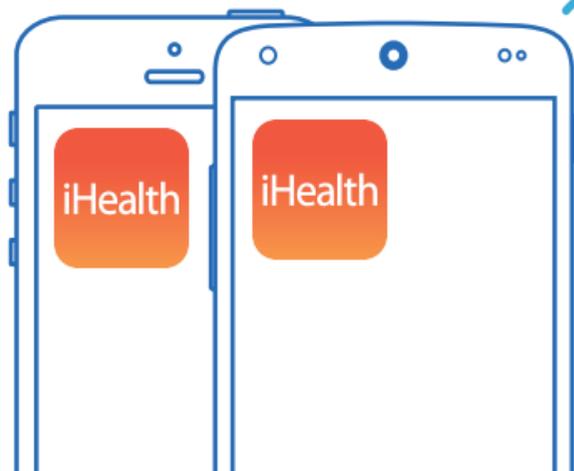


Il tuo dispositivo mobile è compatibile?
Verifica su www.ihealthlabs.com!

SCARICA L'APP

1 Abilita il Bluetooth

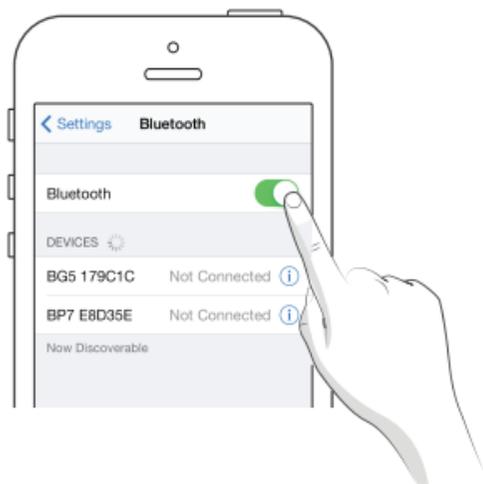


2 Apri app

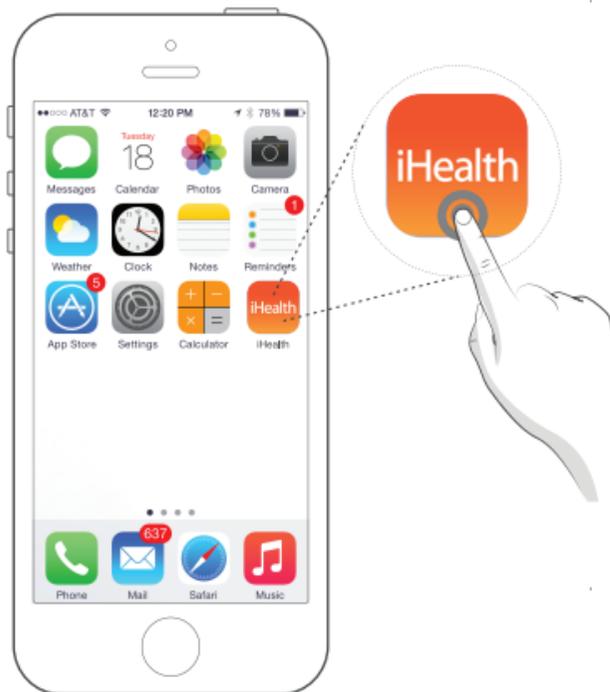


CONNETTITI


3 Seleziona l'attività nel menu


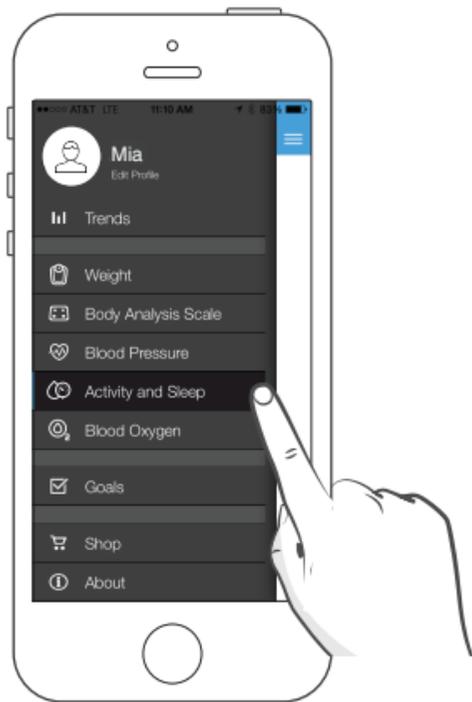


4 Fai clic sul pulsante “+”

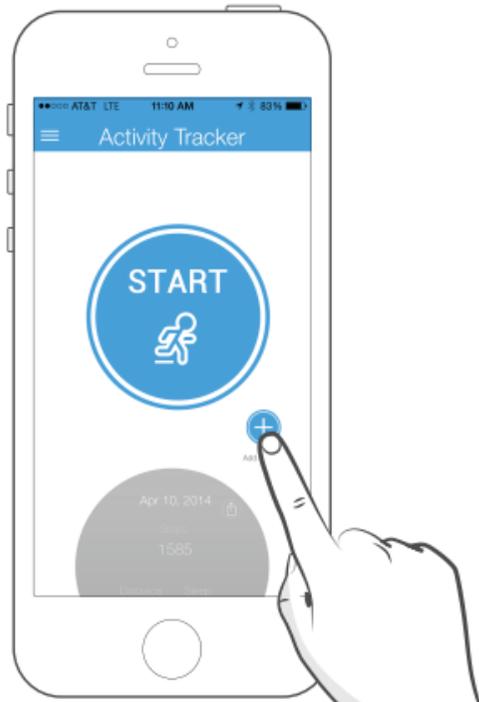


5 Seleziona Edge

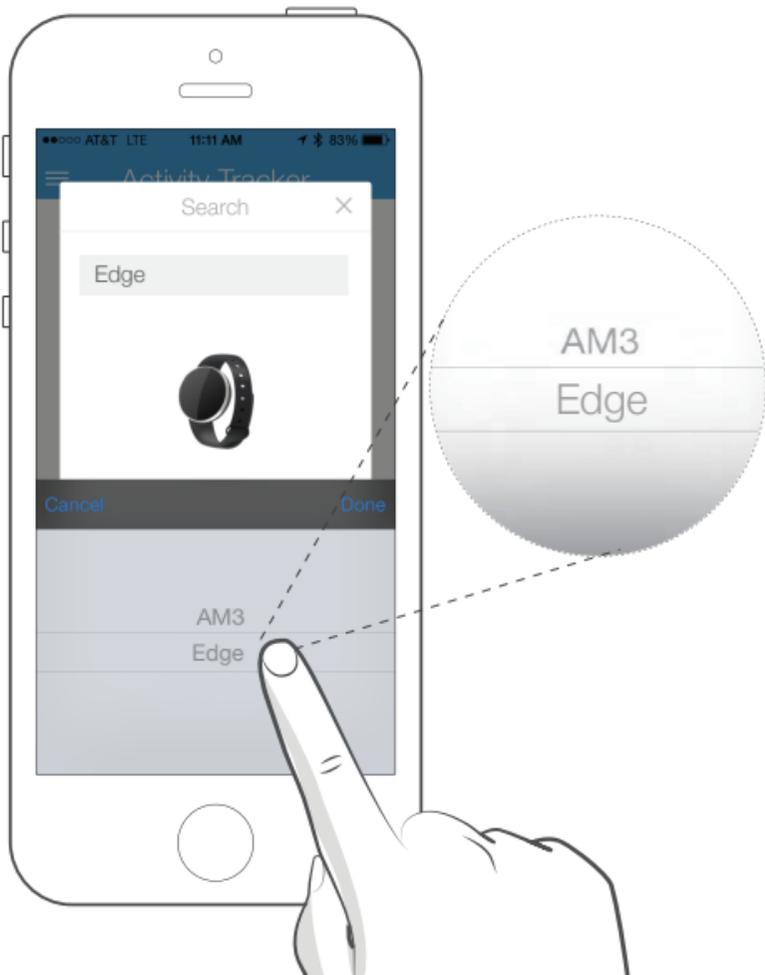

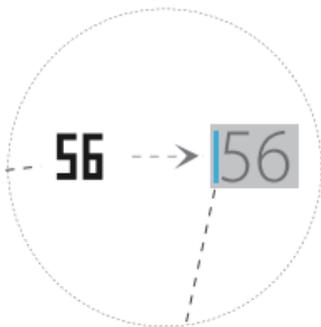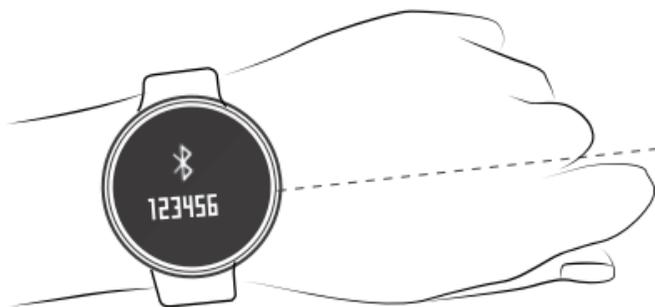


6 Inserisci le ultime 2 delle 6 cifre mostrate sul tracker

Se non vedi le 6 cifre, spegni il Bluetooth e riaccendilo nuovamente oppure fai doppio clic sul pulsante Home (iOS) oppure vai sul menu app (Android) e tocca l'app per chiuderla completamente. Ripeti i passaggi partendo dal passaggio 2.

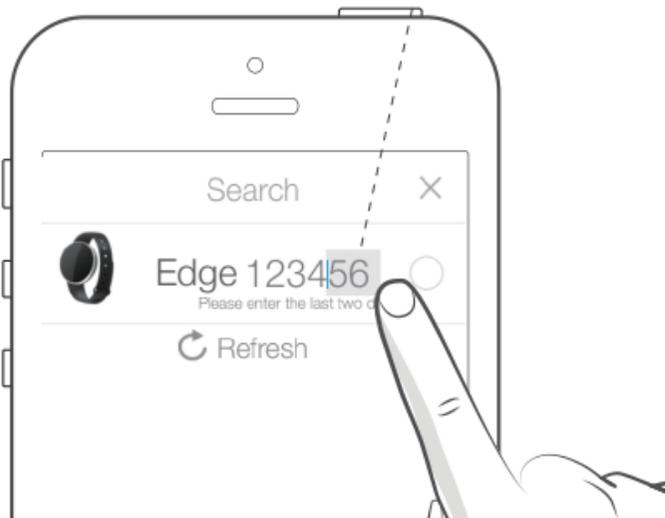

7 Abbinamento eseguito con successo

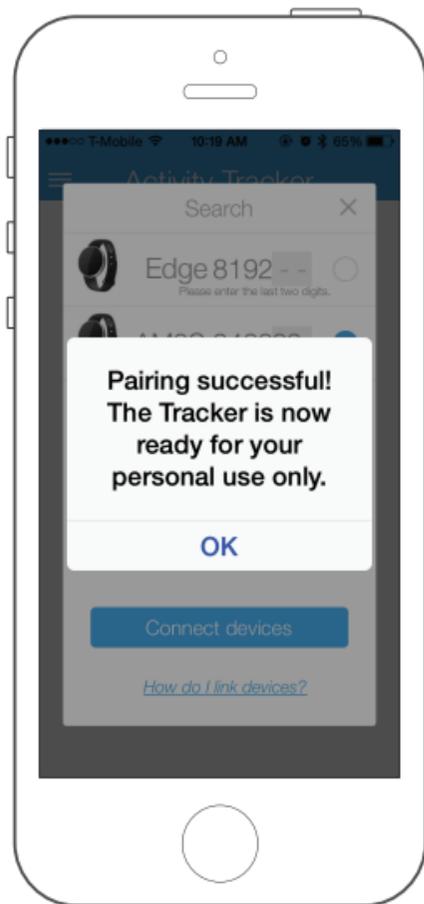

VISUALIZZA

Ora/Data

Mon 05-05
08:30 am

Obiettivo/Progresso



Numero di passi



Solleva il polso oppure
sganciato dalla vita
&
Tocca per navigare

Calorie bruciate



Distanza percorsa



MODALITÀ

Modalità sonno



Modalità allenamento



Rileva automaticamente la qualità del sonno e dell'allenamento.

PERSONALIZZA

Modalità sonno



Modalità allenamento



Sei di un umore diverso? Cambia il personaggio sul tracker direttamente dalle impostazioni dell'App.

INFORMAZIONI IMPORTANTI PREVISTE DALLE NORME FCC

Il presente dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il suo funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) Il presente dispositivo non deve causare interferenze dannose, e
- (2) il presente dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Cambiamenti e modifiche non espressamente approvate da iHealth Lab Inc. renderanno nulla l'autorità dell'utente a mettere in funzione il prodotto.

Nota: Il presente prodotto è stato testato e trovato essere conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono ideate per fornire una protezione ragionevole contro l'interferenza dannosa in un'installazione residenziale. Il presente prodotto, genera, usa e può irradiare energia in radio frequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, potrebbe causare interferenza dannosa alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che l'interferenza non si verificherà in una particolare installazione. In caso il presente prodotto cause interferenza dannosa alla ricezione radio o televisiva, che può essere determinate accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato e tentare di correggere l'interferenza mediante una o più delle seguenti misure:

- Orientare o posizionare nuovamente l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di un circuito differente da quello a cui il ricevitore è collegato.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV competente per assistenza.

Il dispositivo è conforme alla licenza Industry Canada (esente da standard RSS). Il funzionamento è conforme alle due seguenti condizioni:

- (1) il dispositivo potrebbe non causare interferenze, e
- (2) il dispositivo deve accettare le eventuali interferenze, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo



AVVERTENZA

RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA
CON UNA DI TIPO DI DIVERSO.
SMALTIRE LE BATTERIE USATE CONFORMEMENTE ALLE ISTRUZIONI.


Con la presente [iHealth Lab Inc.] dichiara che questo [AM3S EDGE] è conforme ai requisiti essenziali e altre disposizioni pertinenti della Direttiva 1999/5/EC. La Direttiva 1999/5/EC, dichiarazione di conformità e certificazioni di iHealth e i documenti normativi possono essere scaricati usando il seguente link <https://www.ihealthlabs.eu/support/certifications>

Contatti e numero di assistenza:

Prodotto per iHealth Lab Inc.

iHealth Lab Inc.

719N. Shoreline Blvd., Mountain View, CA 94043, USA

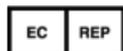

Prodotto per iHealth Lab Europe.

3 rue Tronchet, 75008, Paris, France

www.ihealthlabs.eu

Prodotto da iHealth Lab Inc..

No. 3 Jinping Street, YaAn Road, Nankai District, Tianjin 300190, China.

Per maggiori informazioni,
visita www.ihealthlabs.com

iHealth[®] Edge