

ISTRUZIONI PER L'USO

AGHI IPODERMICI CON MECCANISMO DI SICUREZZA

DESTINAZIONE D'USO:

Ago, monouso, sterile, atossico, apirogeno, per iniezioni e somministrazione di sostanze medicinali.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Prima dell'uso verificare la data di scadenza.

Verificare l'integrità della confezione prima dell'uso.

Aprire la confezione ed usare immediatamente.

Non utilizzare se la confezione è danneggiata.

In caso di riutilizzo è possibile l'instaurarsi di infezioni: consultare un medico.

Preparare con cura e asetticamente la zona.

Estrarre l'ago dal blister.

Procedere con la terapia.

Attivare il meccanismo di sicurezza.

Smaltire come rifiuto ospedaliero.

LATEX FREE:

Il dispositivo è totalmente privo di lattice.

METODO DI STERILIZZAZIONE:

Sterilizzazione ad Ossido di Etilene (EtO), quantità residua di gas secondo le normative vigenti

SMALTIMENTO:

Lo smaltimento deve essere effettuato in ottemperanza alle norme nazionali vigenti.

L'incenerimento o lo smaltimento in discarica devono essere svolti in condizioni controllate.

Il prodotto che non è venuto a contatto con agenti infettivi o altri materiali rischiosi, non può essere considerato rifiuto pericoloso.

CONSERVAZIONE:

Conservare in un luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore.

*Le suddette Istruzioni per l'Uso devono essere conservate
dall'utilizzatore per tutta la durata del DM.*



Health&Safety

RAYS SPA

via Francesco Crispi - 60027 Osimo (AN)

Tel. 071 2868935 - Fax 071 2868911 - www.rays.it - info@rays.it