

ISTRUZIONI PER L'USO

INJ-LIGHT SIRINGHE CON AGO IPODERMICO

DESTINAZIONE D'USO:

Siringa con ago ipodermico montato, monouso, sterile, atossica, apirogena, per iniezioni e somministrazione di sostanze.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Prima dell'uso verificare la data di scadenza. Verificare l'integrità della confezione prima dell'uso. Aprire la confezione ed usare immediatamente. Non utilizzare se la confezione è danneggiata. In caso di riutilizzo è possibile l'instaurarsi di infezioni: consultare un medico.

Preparare con cura e asetticamente la zona. Estrarre la siringa dal blister. Sfilare il cappuccio copri-ago. Procedere con la somministrazione. Smaltire come rifiuto ospedaliero.

LATEX FREE:

Il dispositivo è privo di lattice per evitare il rischio di reazioni allergiche.

METODO DI STERILIZZAZIONE:

Sterilizzazione ad Ossido di Etilene (EtO), quantità residua di gas secondo le normative vigenti

SMALTIMENTO:

Lo smaltimento deve essere effettuato in ottemperanza alle norme nazionali vigenti. L'incenerimento o lo smaltimento in discarica devono essere svolti in condizioni controllate. Il prodotto che non è venuto a contatto con agenti infettivi o altri materiali rischiosi, non può essere considerato rifiuto pericoloso.

CONSERVAZIONE:

Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore.

Le suddette Istruzioni per l'Uso devono essere conservate dall'utilizzatore per tutta la durata del DM.

Ed. 3 - Maggio 2023



Health&Safety

RAYS SPA

via Francesco Crispi - 60027 Osimo (AN)

Tel. 071 2868935 - Fax 071 2868911 - www.rays.it - info@rays.it