

# **ISTRUZIONI PER L'USO**

## **INJ-SAFE SIRINGHE CON AGO IPODERMICO DI SICUREZZA MONTATO**

### **DESTINAZIONE D'USO:**

Siringa con ago ipodermico di sicurezza montato, monouso, sterile, atossica, apirogena, per iniezioni e somministrazione di sostanze.

### **ISTRUZIONI PER L'USO:**

Prima dell'uso verificare la data di scadenza. Verificare l'integrità della confezione prima dell'uso. Aprire la confezione ed usare immediatamente. Non utilizzare se la confezione è danneggiata. In caso di riutilizzo è possibile l'instaurarsi di infezioni: consultare un medico.

Preparare con cura e asetticamente la zona. Estrarre la siringa dal blister.

Abbassare il dispositivo di protezione dell'ago, spingendo lateralmente lo stesso, fino ad avvertire il "click" di blocco in apertura. Sfilare il cappuccio copri- ago.

Procedere con la somministrazione. Al termine del processo, sollevare il dispositivo di protezione fino a coprire interamente l'ago avvertendo un "click" d'aggancio del dispositivo, oppure terminare l'operazione aiutandosi con un piano di appoggio per ultimare l'operazione di aggancio dello stesso senza neanche avvicinare la mano all'ago. Smaltire come rifiuto ospedaliero.

### **LATEX FREE:**

Il dispositivo è privo di lattice per evitare il rischio di reazioni allergiche.

### **METODO DI STERILIZZAZIONE:**

Sterilizzazione ad Ossido di Etilene (EtO), quantità residua di gas secondo le normative vigenti

### **SMALTIMENTO:**

Lo smaltimento deve essere effettuato in ottemperanza alle norme nazionali vigenti. L'incenerimento o lo smaltimento in discarica devono essere svolti in condizioni controllate. Il prodotto che non è venuto a contatto con agenti infettivi o altri materiali rischiosi, non può essere considerato rifiuto pericoloso.

### **CONSERVAZIONE:**

Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore.

*Le suddette Istruzioni per l'Uso devono essere conservate dall'utilizzatore per tutta la durata del DM.*

*Ed. 3 - Maggio 2023*



**Health&Safety**

**RAYS SPA**

via Francesco Crispi - 60027 Osimo (AN)

Tel. 071 2868935 - Fax 071 2868911 - [www.rays.it](http://www.rays.it) - [info@rays.it](mailto:info@rays.it)