



IT ⚠ **Attenzione!**

Indicazioni di sicurezza per la conservazione e l'utilizzo di microcuvette per emoglobina

Le microcuvette per emoglobina sono destinate esclusivamente al rilevamento di emoglobina nel sangue capillare e venoso e all'impiego con i seguenti dispositivi: Hemo_Control, Hemo_Control Manager, Hemo_Vet, Hemo_Vet Manager. Questi devono essere utilizzati solo da personale specializzato qualificato.

Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni per l'uso del rispettivo dispositivo.

Le cuvette devono essere conservate esclusivamente nella confezione originale ad una temperatura compresa tra 15°C e 30°C. I flaconi originali sigillati possono essere utilizzati fino alla data di scadenza stampata sulla confezione. Dopo l'apertura del flacone, le cuvette sono stabili per 3 mesi se utilizzate correttamente e conservate nelle specifiche condizioni.

Togliere dal flacone una cuvetta alla volta. Richiudere accuratamente il flacone subito dopo aver prelevato la cuvetta (**vedere fig. 1.**). Accertarsi che il coperchio del flacone delle cuvette sia sempre ben chiuso tutt'intorno (**vedere fig. 2.**).

Se il coperchio non è completamente chiuso (**vedere fig. 3.**), l'umidità può penetrare nel flacone e deteriorare i reagenti nella cuvetta. L'impiego di tali cuvette può portare a risultati errati. Non utilizzare cuvette di un flacone che non è stato chiuso correttamente!

