

---

**DISPOSITIVO ASPIRA VELENO**  
**POISON EXTRACTION TOOL**  
**POMPE À VENIN**  
**DISPOSITIVO PARA ASPIRACIÓN DE VENENO**

---

---

**ITALIANO**

Unstinger™ è una pompa a vuoto a funzionamento manuale di seconda generazione da utilizzare dopo morsi e punture di insetti comuni (api, zanzare, vespe).

**COME UTILIZZARE Unstinger™**

Dopo il morso, posizionare il prima possibile il vostro Unstinger™ sulla zona interessata e applicare una leggera pressione al fine di assicurare un'aderenza ottimale con la vostra pelle. Utilizzare solo la punta rossa dell'adattatore su tipo di morso o sulla zona interessata.

Avviare l'aspirazione tirando lentamente indietro le piccole ali dello stantuffo rosso e mantenere un vuoto costante: la sostanza iniettata nel vostro corpo con il morso (veleno, saliva, ecc.) verrà presto estratta. Una volta che lo stantuffo ha raggiunto il suo limite, è possibile eseguire l'azione più volte.

**AVVERTENZE E PRECAUZIONI**

- Unstinger™ non è un giocattolo e i suoi componenti di piccole dimensioni possono essere facilmente ingeriti dai bambini più piccoli: si consiglia pertanto di non lasciare il proprio Unstinger™ incustodito se e quando ci sono neonati o bambini piccoli in giro.
- L'uso di Unstinger™ non esclude mai la necessità di cercare assistenza medica se si soffre di allergie o se si è particolarmente sensibili alle punture di certi insetti/animali.

**CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA**

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

---

**REF** Unstinger™ (Gima 24395)

Distribuito da / Distributed by / Distribué par / Distribuido por:

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

[gima@gimaitaly.com](mailto:gima@gimaitaly.com) - [export@gimaitaly.com](mailto:export@gimaitaly.com)

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

Made in Denmark

---