

PETTINE ELETTRICO PER PIDOCCHI PEINE PARA PIOJOS

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

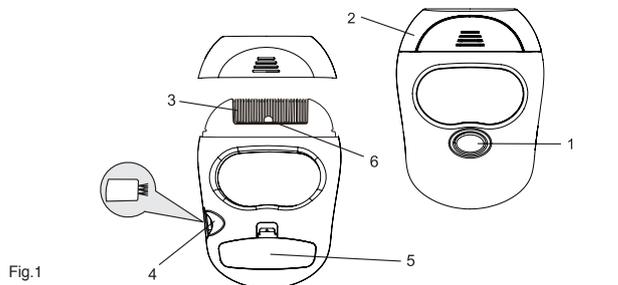


Fig.1

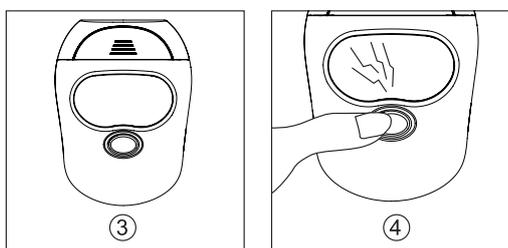


Fig.2

ITALIANO

USO PREVISTO

Il dispositivo è ideato per la rimozione dei pidocchi e delle loro uova (lendini) dai capelli.

RACCOMANDAZIONI PER UN USO EFFICACE

- Usare solo sui capelli asciutti.
- Assicurarsi che il prodotto non si bagni o inumidisca durante l'uso.
- Si raccomanda di applicare un trattamento repellente (crema, shampoo, ecc...) dopo l'uso del pettine elettrico, per evitare una nuova infestazione.

PRECAUZIONI PRIMA DELL'USO

Si raccomanda di seguire le istruzioni fornite e di osservare le seguenti norme di sicurezza per assicurare un uso ideale del pettine elettrico per pidocchi:

- L'uso del pettine elettrico deve essere evitato nei seguenti casi:
 - Non utilizzare su soggetti portatori di pacemaker.
 - Non utilizzare su soggetti con epilessia o malattie cardiache.
 - Non utilizzare su capelli bagnati o umidi.
 - Tenere il pettine fuori dalla portata dei bambini.
 - Non utilizzare il pettine su un'altra persona senza prima averlo disinfettato.
- Disinfettare il pettine elettrico dopo ogni uso, utilizzando un panno imbevuto in una soluzione al 70% di alcool (rimuovere le batterie prima di effettuare la pulizia). Attendere che il pettine sia completamente asciutto prima di riutilizzarlo.
- Non utilizzare il pettine se i denti sono deformati, in quanto ciò potrebbe causare un corto circuito del pettine.
- Utilizzare il pettine elettrico esclusivamente per lo scopo per il quale è stato progettato, seguendo le istruzioni fornite.
- Riposizionare la copertura protettiva dopo ogni uso per proteggere i denti del pettine.

ISTRUZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Per garantire la vostra sicurezza, si raccomanda di leggere attentamente la presente Guida Utente e di attenersi alle seguenti istruzioni.

- Utilizzare il dispositivo solo secondo l'uso previsto, rispettando le istruzioni fornite nella presente guida.
- Questo dispositivo elettrico non è un giocattolo; tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Questo dispositivo non è adatto per l'uso sui bambini di età inferiore ai 3 anni.
- L'utilizzo del dispositivo elettrico da parte dei bambini deve avvenire sotto la supervisione di un adulto.
- Consultare il medico prima di utilizzare il dispositivo se si è portatori di pacemaker o qualsiasi impianto elettronico, o se si hanno arti artificiali.
- Non utilizzare il dispositivo nelle vicinanze di un telefono cellulare, un forno a microonde aperto, o un televisore (mantenere una distanza non inferiore a 1 metro).
- I soggetti che soffrono di epilessia o malattie cardiache devono evitare di utilizzare questo dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo sui capelli umidi, con nodi o attorcigliati.
- Evitare di usare il dispositivo sulla pelle ferita, screpolata o secca, o il contatto diretto con orecchie, occhi e bocca.
- Evitare l'esposizione alla luce diretta del sole e non posizionare sopra superfici calde.
- Tenere il dispositivo al riparo dall'umidità ed evitare il contatto con qualsiasi liquido.
- Non utilizzare il dispositivo se la custodia esterna o il pettine sono danneggiati, se non funziona correttamente o se è stato immerso in un liquido.
- Per evitare incidenti o possibili danni, mantenere il dispositivo lontano da abiti, setole, cavi, lacci di scarpe, corde, fili, ecc.
- Spegner sempre il dispositivo quando non viene utilizzato.
- Rimuovere la batteria se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.

INTRODUZIONE

Il pettine elettrico per pidocchi è una valida opzione per estirpare i pidocchi e impedire che si diffondano ai capelli e al cuoio capelluto di altri membri della famiglia. Non è certo un segreto che un'infestazione di pidocchi può rendere la vita difficile a tutti in famiglia, ma grazie alla tecnologia moderna, come ad esempio l'uso di un pettine elettrico per pidocchi, è un po' più facile liberarsi da questi parassiti.

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO E DEGLI ACCESSORI FORNITI (Fig.1)

1. Interruttore On/Off (pulsante a pressione)
2. Coperchio di protezione
3. Denti elettrici
4. Spazzola per la pulizia
5. Vano batteria
6. Luce LED

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

Aprire il coperchio del vano batteria sollevando il punto "5". Inserire una batteria AAA rispettando la giusta polarità (+/-), come indicato sulla batteria e nel vano batteria. Posizionare le batterie in modo scorretto potrebbero danneggiare il dispositivo e invalidare la garanzia.

FUNZIONAMENTO (Fig.2)

1. Premere il pulsante On/Off "1" per due secondi per avviare il dispositivo. La luce LED si accenderà e verrà emesso un segnale acustico per tre secondi, per indicare che il dispositivo è in funzione.
2. Posizionare il dispositivo sulla testa, come un normale pettine. Assicurarsi di usare il dispositivo sui capelli asciutti. Svolgere i nodi dei capelli e le trecce prima dell'uso.
3. Quando il dispositivo è in funzione, il LED si accende e viene emesso un segnale acustico ogni tre secondi.
4. Il segnale acustico è breve e veloce e viene emesso tre volte al secondo, ogni volta che i denti entrano in contatto con un pidocchio o un uovo.
 - 4-1. La tensione dei denti eliminerà i parassiti.
 - 4-2. In caso di bassa tensione della batteria, il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 7 brevi segnali acustici e il LED lampeggerà.
 - 4-3. Il dispositivo si spegne automaticamente se non viene utilizzato per più di 3 minuti.
 - 4-4. Assicurarsi di pulire accuratamente il pettine con la spazzola per la pulizia dopo ogni utilizzo e di ripristinare continuamente il corretto uso del pettine.
5. Dopo ogni utilizzo, ricordarsi di spegnere e pulire accuratamente il pettine con la spazzola per la pulizia. Mantenere il coperchio di protezione "2" in posizione sul dispositivo quando non viene utilizzato.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Rimuovere la batteria prima di procedere alla pulizia del dispositivo.
2. Non strofinare liquidi o detergenti forti sul dispositivo.
3. Utilizzare un panno o un pezzo di carta morbida e asciutta per pulire il dispositivo. Per i denti, usare l'apposito accessorio della spazzola per la pulizia per rimuovere i depositi di sporco.
4. Non immergere il dispositivo in liquidi e assicurarsi che non penetri acqua all'interno dell'apparecchiatura.
5. Conservare il prodotto in un luogo pulito, asciutto e ben ventilato.
6. L'esposizione alla luce solare diretta può danneggiare il dispositivo.

SPECIFICHE TECNICHE

Nome del modello	24403
Alimentazione	Batterie AAA x 1
Tensione di uscita	100-250V
Durata della batteria	Otto ore con uso ininterrotto
Auto spegnimento	Sì
Dimensione	10,36 x 7,57 x 2,66 cm
Peso	1000 (batteria inclusa)
Certificato	CE, RoHS

AMBIENTE DI TRASPORTO E CONSERVAZIONE

Temperatura	Da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F)
Umidità	< 95% (senza condensa)
Pressione atmosferica	Da 525mmHg a 795mmHg (da 700 a 1060hPa)

AMBIENTE OPERATIVO

Temperatura	Da 5°C a 40°C (da 41°F a 104°F)
Umidità	< 95% (senza condensa)
Pressione atmosferica	Da 525mmHg a 795mmHg (da 700 a 1060hPa)

SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

1. Si prega di smaltire il prodotto e la batteria separatamente.
2. Il prodotto e la batteria non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici.
3. Si raccomanda di attenersi alle norme locali in materia di gestione dei rifiuti/riciclaggio/smaltimento delle batterie.

INFORMAZIONI SUI SIMBOLI

	Seguire le istruzioni per l'uso		Smaltimento RAEE
	Limite di umidità		Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso
	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Limite di temperatura
	Limite pressione atmosferica		Data di fabbricazione
	Codice prodotto		Fabbricante
	Numero di lotto		Riciclare
	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea		Dispositivo medico



Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA
Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses..

REF EL-1003 (Gima 24403)



Biocare Asia Co., LTD,
No. 260, Mayun Road,
New District Suzhou, Jiangsu, 215129
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Made in China



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Importato da / Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

