

# Manuale di servizio

## Sostituzione del modulo sensore precalibrato in fabbrica



Modello: AP-338  
Versione: 2018-09-06

L'etilometro può rimanere preciso per 1 anno di utilizzo. Più frequente è l'uso, più il dispositivo dovrà essere calibrato. Secondo DIN31051, si consiglia di ricalibrare ogni 12 mesi (o prima) per garantire la massima precisione. **In alternativa sostituire ogni 12 mesi (o prima) il modulo sensore precalibrato in fabbrica.**

Di seguito è riportata la procedura di sostituzione del modulo sensore precalibrato in fabbrica.

1. Spegner il dispositivo, premendo il tasto di accensione per 3 secondi.



2. Rimuovere le due viti presenti sul coperchio di protezione.



3. Estrarre il vecchio modulo sensore dal dispositivo.




4. Scollegare il cavo di comunicazione dal vecchio modulo sensore.



5. Collegare il nuovo modulo sensore precalibrato in fabbrica al dispositivo.



\*\* Assicurarsi che il modulo sia collegato bene e fissato al dispositivo.

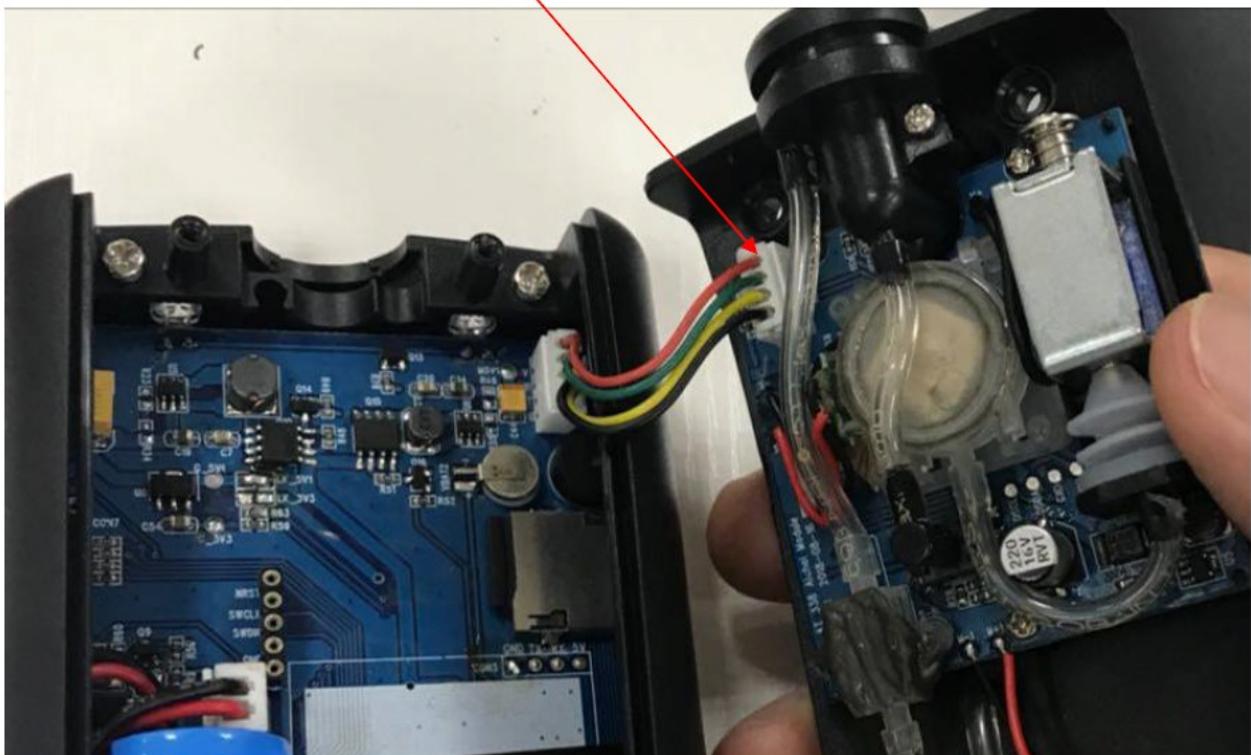

6. Installare il modulo sensore sull'alloggiamento del dispositivo.



7. Rimettere le due viti sul coperchio di protezione per ultimare la sostituzione.

