



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

## **GONIOMETRO DA 360 GRADI 14"** **14" 360 DEGREE GONIOMETER** **GONIOMÈTRE 360 DEGRÉS 14"** **GONIÓMETRO 360 GRADOS - 14"**

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guía de uso



Tipo di acciaio - Steel Type  
Type d'acier - Tipo de acero:  
**AISI 430**

Incrementi di 1°  
1° increments  
Incréments de 1 degré  
Intervalos de 1°

Le misure si intendono indicative  
The measures are intended as indicative  
Les mesures sont destinées à être indicatives  
Las medidas tienen carácter indicativo

### **GIMA 24903**

Fabbricante, Manufacturer, Fabricante, Fabricante:  
JIMCO INDUSTRIES  
4-KM Aimen Abad Road Near Akbar Abad Chowk Bhadal,  
Sialkot-51310-Punjab - Pakistan - info@jimcoind.com  
Made in Pakistan

**REF** RE-230-10

Importato da / Imported by / Importé par/ Importado por:  
Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



### IT - ISTRUZIONI PER L'USO

Il goniometro misura il campo di movimento (ROM) di varie articolazioni. La testa da 360° è marcata con incrementi di 1°. La tensione tra le braccia è controllata dalla manopola del pollice. Il Goniometro ha due scale opposte di 180° e una scala da 360°, tutte marcate con incrementi di 1°. Manopola di regolazione robusta, controllo della tensione delle braccia.

### INDICAZIONE PER L'USO E PRECAUZIONI

I dispositivi sono destinati all'uso professionale da parte di operatori qualificati con le necessarie competenze.

L'uso del prodotto comporta il contatto diretto con la cute del paziente; utilizzare sempre guanti protettivi, non usare su cute lesa, maneggiare con cura al fine di evitare abrasioni accidentali.

Pulire e sterilizzare prima di ogni utilizzo; utilizzare soluzione disinfettante non aggressiva a pH neutro (PH7), non utilizzare soluzioni contenenti ioni di cloruro o ad alto contenuto di alcol.

### CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi

#### Simboli / Symbols / Symboles / Simbolos

	<p><b>IT</b> Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso  <b>GB</b> Caution: read instructions (warnings) carefully  <b>FR</b> Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)  <b>ES</b> Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente</p>	 <p><b>IT</b> Conservare al riparo dalla luce solare  <b>GB</b> Keep away from sunlight  <b>FR</b> À conserver à l'abri de la lumière du soleil  <b>ES</b> Conservar al amparo de la luz solar</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"><b>LOT</b></div>	<p><b>IT</b> Numero di lotto  <b>GB</b> Lot number  <b>FR</b> Numéro de lot  <b>ES</b> Número de lote</p>
	<p><b>IT</b> Leggere le istruzioni per l'uso  <b>GB</b> Consult instructions for use  <b>FR</b> Consulter les instructions d'utilisation  <b>ES</b> Consultar las instrucciones de uso</p>	 <p><b>IT</b> Conservare in luogo fresco e asciutto  <b>GB</b> Keep in a cool, dry place  <b>FR</b> À conserver dans un endroit frais et sec  <b>ES</b> Conservar en un lugar fresco y seco</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"><b>REF</b></div>	<p><b>IT</b> Codice prodotto  <b>GB</b> Product code  <b>FR</b> Code produit  <b>ES</b> Código producto</p>