

TERMOMETRO DIGITALE RANA FROG DIGITAL THERMOMETER THERMOMÈTRE DIGITAL GRENOUILLE TERMÓMETRO DIGITAL RANA

Model: KD-702

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guía de uso

ITALIANO

⚠ Avvertenza:

- Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il termometro digitale.
- Pericolo di soffocamento: il tappo del termometro e la batteria possono essere fatali se ingeriti. Non permettere ai bambini di utilizzare questo dispositivo senza la supervisione dei genitori.
- Non utilizzare il termometro nelle orecchie. È destinato all'uso solo per via orale, rettale e ascellare.
- Non posizionare la batteria del termometro vicino a fonti di calore estremo poiché potrebbe esplodere.
- Nota: l'uso della guaina per sonda potrebbe generare una discrepanza di 0,1°C (0,2°F) dalla temperatura effettiva.
- Si raccomanda di verificarne la funzione ogni due anni.
- Rimuovere la batteria dal termometro quando non è in funzione per un lungo periodo di tempo.
- Il funzionamento del termometro potrebbe risentirne nel caso si verifichi uno dei seguenti avvenimenti:
 - a) funzione che esula dalla gamma di temperatura e umidità prevista;
 - b) conservazione che esula dalla gamma di temperatura e umidità prevista;
 - c) shock meccanico;
 - d) la temperatura del paziente è più bassa rispetto a quella ambientale.

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO


Questo termometro digitale fornisce una lettura rapida e altamente precisa della temperatura corporea di un individuo. Per comprendere al meglio le sue funzioni e garantire anni di risultati affidabili, si prega di leggere attentamente le istruzioni.

Questo termometro è stato prodotto in conformità al sistema di EN12470-3:2000+A1:2009, ASTM E1112-00. Il termometro è in conformità alla parte 15 delle norme della Commissione federale per le comunicazioni (FCC). Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il presente termometro non può causare interferenze dannose e (2) Il presente termometro deve accettare eventuali interferenze in ricezione, ivi comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. Il produttore detiene la certificazione ISO 13485:2003 + AC:2012.

CONTENUTO

1 termometro, 1 manuale utente, 1 custodia protettiva

ILLUSTRAZIONE DEL PRODOTTO

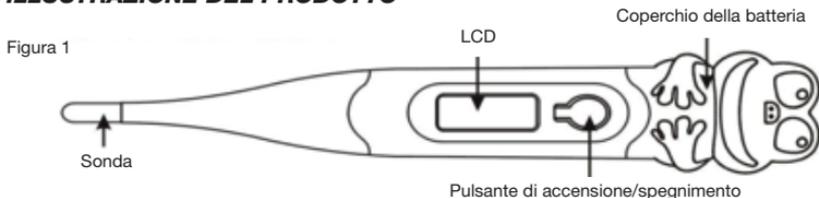

⚠ PRECAUZIONE

- Non piegare e non far cadere il termometro. Non è antiurto.
- Non bollire il dispositivo per disinfettarlo.
- Non esporlo alla luce diretta o in un ambiente soggetto a calore estremo.
- Non smontarlo. Vedasi SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA per sostituire la batteria. Non buttarlo nel cestino. Va riciclato o gestito come un rifiuto pericoloso. La batteria contiene mercurio.
- Evitare le forti interferenze elettromagnetiche come i forni a microonde o i cellulari.

SPECIFICHE

Intervallo:	32,0°C~42,9°C (90,0°F-109,9°F) (°C/°F stabiliti dal produttore)
Precisione:	±0,1°C, 35,5°C~42,0°C (±0,2°F, 95,9°F-107,6°F)
	±0,2°C sotto i 35,5°C o oltre i 42,0°C (±0,4°F sotto i 95,9°F o oltre i 107,6°F)
	con una temperatura ambientale standard da 18°C a 28°C (da 64,4°F a 82,4°F)

Display:	display a cristalli liquidi, 3 1/2"
Memoria:	per memorizzare l'ultimo valore misurato
Durata della batteria:	ca. 200 ore
Batteria:	Una batteria a bottone da 1,5 V DC (dimensione LR41 o SR41, UCC 392)
Dimensioni:	14,3cm x 2,8cm x 1,5cm (L x P x A)
Peso:	ca. 11 grammi, inclusa la batteria
Ambiente di utilizzo:	Temperatura: 5°C~40°C (41°F~104°F) - Umidità relativa ≤85%UR
Condizioni di stoccaggio e trasporto:	Temperatura: -10°C~-55°C (14°F~-131°F) Umidità relativa: ≤95%UR
Leva impermeabile:	Impermeabile all'acqua
Tempo di misurazione:	a) 30±10 secondi (per via orale) - b) 45±20 secondi (sotto il braccio) c) 45±20 secondi (per via rettale)
Classificazione:	Tipo BF 

INDICAZIONI

1. Strofinare o frizionare la sonda del termometro con alcol isopropilico per disinfettarlo.
2. Premere il pulsante On/Off accanto allo schermo LCD. Verrà emesso un suono mentre sullo schermo compare **1888.5**, seguito dall'ultima temperatura registrata. Dopo aver mostrato la temperatura

di auto-test, il termometro è pronto per la misurazione.

*Nota: Se la temperatura misurata è inferiore a 32°C o 90°F, lo schermo LCD visualizzerà Lo, se la temperatura misurata è superiore a 42,9°C o 109,9°F lo schermo LCD visualizzerà Hi.

3. Sistemare il termometro nella posizione desiderata (bocca, retto o ascella).
 - a) **Uso orale:** Posizionare il termometro sotto la lingua come indicato da "✓" nella Figura 2. Chiudere la bocca e respirare regolarmente attraverso il naso per evitare che la misurazione sia influenzata dall'aria inspirata/espirata. La temperatura normale è tra 35,7°C e 37,3°C (96,3°F e 99,1°F)
 - b) **Uso rettale:** per un facile inserimento, lubrificare la punta della sonda argentata con della vaselina. Inserire delicatamente il sensore per circa 1 cm (meno di 1/2") nel retto. La temperatura normale è tra 36,2°C e 37,7°C (97,2°F e 99,9°F).
 - c) **Utilizzo sotto l'ascella:** pulire e asciugare l'ascella. Posizionare la sonda sotto l'ascella e tenere premuto saldamente il braccio. Da un punto di vista medico questo metodo fornirà sempre risultati imprecisi e non dovrebbe essere utilizzato nel caso in cui siano necessarie misurazioni precise. La temperatura normale è tra 35,2°C e 36,7°C (95,4°F e 98,1°F).
4. Il simbolo dei gradi lampeggia durante tutto il test. Quando il lampeggio si arresta, viene emesso un allarme per circa 10 secondi. Allo stesso tempo, la misurazione comparirà sullo schermo LCD. La temperatura visualizzata non cambia quando il termometro viene rimosso dalla propria posizione di prova.

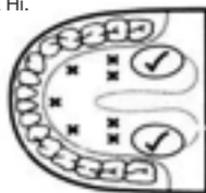


Figura 2

*Nota: In genere i suoni sono "Bi-Bi-Bi- Bi-"; l'allarme suona più rapidamente se la temperatura raggiunge i 37,8°C (100°F) o più e i suoni sono "Bi-Bi-Bi----- Bi-Bi-Bi----- Bi-Bi-Bi"

5. Per prolungare la vita della batteria premere il pulsante On/Off per spegnere l'unità dopo aver completato il test. Se non viene effettuata nessuna azione l'unità si spegnerà automaticamente dopo circa 10 minuti.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

1. Sostituire la batteria quando in basso a destra dello schermo LCD compare .
2. Sfilare il coperchio della batteria come mostrato nella Figura 3.
3. Utilizzare un oggetto appuntito, come una penna, per rimuovere la vecchia batteria. Smaltire la batteria secondo le disposizioni di legge. Sostituire con un nuovo tipo a bottone LR41 o SR41, UCC392, o equivalente da 1,5V DC. Assicurarsi che la batteria sia installata con la polarità "+" rivolta verso l'alto. (Vedasi Figure 4, 5)
4. Far scivolare il vano batteria nuovamente in posizione e fissare la copertura.

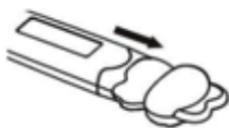


Figura 3



Figura 4



Figura 5

GARANZIA LIMITATA

Il termometro è garantito per un anno dalla data di acquisto. Se il termometro non funziona correttamente a causa di componenti difettosi o manodopera scadente, lo ripareremo o sostituiremo gratuitamente. Tutti i componenti sono coperti da questa garanzia, esclusa la batteria. La garanzia non copre danni al vostro termometro dovuti a uso improprio. Per ottenere il servizio di garanzia, è necessario un originale o una copia della ricevuta di vendita dal rivenditore originale.



Lo smaltimento di questo prodotto e delle batterie utilizzate deve avvenire in conformità ai regolamenti nazionali relativi allo smaltimento di prodotti elettronici.

Simboli - Symbols - Symboles - Símbolos

	Corrente diretta <i>Direct Current</i> Courant continu <i>Corriente Directa</i>		Leggere attentamente le istruzioni per l'uso <i>Please read instructions carefully</i> Lire attentivement la notice <i>Leer atentamente las instrucciones de uso</i>
	Tipo BF parte applicata <i>Type BF Applied Part</i> Parties appliquées de type BF <i>Pieza aplicada Tipo BF</i>		Non smaltire con i rifiuti domestici <i>Products should not be disposed of with household waste</i> Ne pas jeter avec les ordures ménagères <i>No eliminar con los residuos domésticos</i>
	Leggere e seguire attentamente le istruzioni per l'uso <i>Read instructions carefully</i> Lire et suivre attentivement la notice <i>Leer y seguir atentamente las instrucciones de uso</i>		Codice prodotto <i>Product code</i> Code produit <i>Código producto</i>
	Prodotto conforme alla Direttiva Europea <i>Product complies with European Directive</i> Ce produit est conforme à la directive européenne <i>Producto conforme a la Directiva Europea</i>		Fabbricante <i>Manufacturer</i> Fabricant <i>Fabricante</i>
	Conservare al riparo dalla luce solare <i>Keep away from sunlight</i> À conserver à l'abri de la lumière du soleil <i>Conservar al amparo de la luz solar</i>		Rappresentante autorizzato nella Comunità europea <i>Authorized representative in the European community</i> Représentant autorisé dans la Communauté européenne <i>Representante autorizado en la Comunidad Europea</i>
	Conservare in luogo fresco ed asciutto <i>Keep in a cool, dry place</i> À conserver dans un endroit frais et sec <i>Conservar en un lugar fresco y seco</i>		Data di fabbricazione <i>Date of manufacture</i> Date de fabrication <i>Fecha de fabricación</i>

REF 25544 / KD-702



Kelly Union Electronics Co. Ltd
NO.114 Five Star Village, Jiangkou Town Hanjiang District
351115 Putian, Fujian - Made in China (P.R.C.)



Landlink GmbH
Dorfstrasse 2/4, Emmendingen, 79312, Germany

