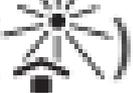


IT Istruzioni per l'uso ( **i**): Indicatore di temperatura corporea a cristalli liquidi microincapsulati (**MD**). Al primo utilizzo rimuovere la pellicola protettiva trasparente dal fronte dell'indicatore. Appoggiare l'indicatore per 15 secondi sulla fronte asciutta tenendolo per le estremità. Se compare la lettera N la temperatura è normale. Se appare un numero la temperatura corrisponde al valore visibile. Se sono visibili due numeri, la temperatura corrisponde a un valore intermedio. In caso di febbre consultare il medico. Eseguire il test a temperatura ambiente, con luminosità adeguata, sotto la sorveglianza di un adulto per bambini sotto i 13 anni. Pulire l'indicatore strofinandolo delicatamente con acqua saponata per almeno 30 secondi (senza immergerlo) o con disinfettanti per la pelle senza alcool. Uso esterno su cute sana. Non esporre ai raggi del sole () tenere lontano da fonti elevate di calore, alcool e solventi. (Emissione del 17 giugno 2020).

Legenda simboli:

  Marchio CE e identificazione ente notificato.  Identifica il nome del fabbricante (può essere seguito dalla data di fabbricazione).  Identifica la data di fabbricazione.  Identifica il nome del distributore.  Numero di lotto del prodotto.  Modello di dispositivo.  Consultare le istruzioni d'uso.  Non esporre ai raggi del sole o fonti UV.  Medical Device - Dispositivo medico.  Non disperdere nell'ambiente. Smaltire consapevolmente.  Materiale poliaccoppiato. Raccolta indifferenziata.  Gradi centigradi. **S1** Simbolo supporto