



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**SCHERMO FACCIALE ANTI-NEBBIA MONOUSO - ANTI-FOG DISPOSABLE FACE SHIELD - ÉCRAN FACIAL ANTI-BUÉE JETABLE - PANTALLA FACIAL DESECHABLE ANTINEBLA - PROTETOR FACIAL DESCARTÁVEL ANTI-FOG - ANTI-BESCHLAG-EINWEG-GESICHTSSCHILD - ΑΝΤΙΟΜΙΧΛΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - JEDNORAZOWA OSŁONA TWARZY ANTYFOGOWA - ECRAN FACIAL DE UNICĂ FOLOSINȚĂ ANTI-ABURIRE - JEDNORÁZOVÝ OBLIČEJOVÝ ŠTÍT PROTI ZAMLŽOVÁNÍ - ANSIKTSVISIR MED ANTI-IMBILDNINGSFUNKTION FR ENGÅNGSBRUK - KERTAKÄYTTÖINEN HUURTEENESTOKA-SVOSUOJA - JEDNORAZOVÝ TVÁROVÝ ŠTÍT ODOLNÝ VOČI ZAHMLIEVANIU - ANTICONDENS GELAATSSCHERM VOOR EENMALIG GEBRUIK - JEDNOKRATNI VIZIR PROTIV MAGLJENJA - PÁRAMENTES EGYSZER HASZNÁLATOS ARCVÉDŐ - PÁRAMENTES EGYSZER HASZNÁLATOS ARCVÉDŐ - DUGFRI ANSIGTSSKÆRM TIL ENGANGSBRUG - ЛИЦЕВ ЦИТ ПРОТИВ ЗАМЪГЛЯВАНЕ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА - NERASOJANTIS VIENKARTINIS APSAUGINIS VEIDO SKYDELIS - VIENREIZĒJĀS LIETOŠANAS PRETAIZSVĪŠANAS SEJAS AIZSARGS - UDUVASTANE ŪHEKORDNE NĀOKAITSE - TÅKEHEMMENDE ANSIKTSSKJERM TIL ENGANGSBRUK - دھچاو ڈرم لامعتس الل بابضلل داضم هج و ورد**

**ITALIANO** **Descrizione:** Lo schermo facciale antiappannante è composto da un pezzo in PET con pellicola protettiva, un supporto in schiuma e una fascia elastica.

**Indicazioni per l'uso:** Lo schermo facciale antiappannante serve a proteggere il viso dalla potenziale contaminazione da agenti patogeni del sangue, fluidi corporei o schizzi di sostanze chimiche pericolose durante le visite o i trattamenti.

**Controindicazioni:** Nessuna.

**Effetti collaterali del prodotto:** Questo prodotto non ha effetti collaterali.

**Avvertenze:**

1. L'esposizione ad un ambiente con un'elevata umidità può compromettere l'efficacia e l'effetto antiappannamento del prodotto.
2. Sospendere l'uso del prodotto se è danneggiato o se si allenta.
3. Non toccare al centro della visiera durante l'uso.
4. I materiali che entrano in contatto con la pelle dell'operatore possono causare reazioni allergiche nei soggetti sensibili.

**Funzionamento:**

Fase 1: Rimuovere la pellicola protettiva interna.

Fase 2: Tirare la fascia elastica e farla passare sulla testa.

**Conservazione:** Conservare il prodotto in un luogo asciutto ad una temperatura di 0-30°C.

Mantenere lontano dalla luce solare diretta

**CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA** Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi

