

# LACCI EMOSTATICI

super-tex

Modello Tubolare

Formato 200 pz



**Dispositivo medico - Classe I**

D. Lgs. 24/02/97 n° 46 attuazione della direttiva CEE 93/42

## ISTRUZIONI PER L'USO

### **Utilizzazioni tipiche:**

I lacci emostatici Supertex in puro lattice di gomma vengono utilizzati come barriera meccanica per la compressione dei vasi sanguigni durante i prelievi venosi o come barriera meccanica a monte delle ferite per fermare l'emorragia.

### **Istruzioni:**

Posizionare il laccio ed annodare. Prima di toglierlo allentare dolcemente.

### **Limitazioni all'uso:**

Non lasciare in posizione oltre 20 minuti. Non usare su persone che siano allergiche al lattice di gomma. Usare solo su braccio e coscia.

### **Conservazione:**

I lacci emostatici Supertex possono essere conservati secondo le normali tecniche di conservazione.

### **Smaltimento/eliminazione:**

I lacci emostatici Supertex possono essere inceneriti o smaltiti in discariche controllate senza che vi sia alcun rischio per l'ambiente.

**Scadenza:** 5 anni dalla data di produzione se correttamente conservati.  
Lotto.