



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BACINELLE IN PLASTICA AUTOCLAVABILI
AUTOCLAVABLE PLASTIC BASINS
CUVES EN PLASTIQUE STÉRILISABLES EN AUTOCLAVE
CUBETAS DE PLÁSTICO PARA AUTOCLAVE
BACIAS EM PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEIS
KUNSTSTOFFSCHALEN IN AUTOKLAVERN STERILISIERBAR
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ
أحواض بلاستيكية قابلة للتعقيم بالأوتوكلاف

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guía de uso - Guia para utilização
Gebrauchs- und instandhaltungsanleitung - Οδηγίες χρήσης - دليل الإستعمال والرعاية

Prima di procedere all'utilizzo del prodotto, procedere alla sterilizzazione.

ITALIANO

Il prodotto è autoclavabile fino ad una temperatura max di 137°C; ma prima di procedere con questa operazione si consiglia di lavarlo in lavastoviglie secondo le norme ISO 15883. Posizionare il prodotto pulito e libero in modo che sia nel lavaggio che durante la sterilizzazione non vi siano ostruzioni per la corretta circolazione di acqua e vapore. Evitare la sterilizzazione a secco e l'utilizzo di solventi o sostanze abrasive per la pulizia, utilizzare solo prodotti compatibili con polipropilene. Non conservare sotto i 4°C. Vita prodotto circa 36 mesi.



Al termine del ciclo di vita del prodotto attenersi alle normative vigenti in materia di smaltimento. Non disperdere nell'ambiente!

REF

26630 - 26631 - 26632 - 26633 - 26635
26636 - 26638 - 26639 - 26640



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) Italy
Made in UK

