

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO E PULIZIA di
BORSA MULTIBRACCIALE - per 3 bracciali pediatrici - 27177
BORSA MULTIBRACCIALE - per 3 bracciali – 27178
BORSA MULTIBRACCIALE - per 5 bracciali - 27179

MATERIALE

I prodotti sono composti principalmente da poliestere 600D.

PULIZIA

1. Per pulire la superficie del prodotto da piccole macchie, è possibile utilizzare un tampone imbevuto di alcol o un panno imbevuto di alcol.
2. Per disinfettare la superficie del prodotto, è possibile utilizzare un tampone imbevuto di alcol applicandolo sulla superficie del prodotto che si desidera disinfettare.
3. Non utilizzare candeggina o solventi.

LAVAGGIO

4. Per preservare l'aspetto del prodotto, si consiglia il lavaggio a mano.
5. Se si utilizza la lavatrice, impostare il ciclo di lavaggio più delicato. Assicurarsi per prima cosa che la chiusura a strappo sia chiusa e rimuovere la tracolla.
6. Utilizzare acqua fredda o a temperatura ambiente con un detergente delicato. Evitare la candeggina.
7. Strofinare delicatamente la superficie del prodotto, soprattutto sulle parti stampate.
8. Risciacquare abbondantemente con acqua fino a rimuovere tutti i residui di detersivo.
9. Appendere il prodotto ad asciugare. Evitare la luce solare diretta.