



ARTICOLI & APPARECCHI PER MEDICINA

REF 27259/6681

Bilancia veterinaria - grande

- Display LCD 1"
- Capacità: 100kg
- Sensibilità: 100g
- Spegnimento automatico
- Indicatore di sovraccarico automatico ("Err")
- Indicatore batteria quasi scarica ("Lo")
- Unità di misura Kg/lb/st selezionabile dall'utente

Manuale utente

1. Si prega di rimuovere la pellicola protettiva dalle batterie prima dell'utilizzo.
2. Posizionare la bilancia sul pavimento in posizione stabile e piana, se posizionata su una superficie morbida (es.: un tappeto) la bilancia potrebbe rilevare valori imprecisi.
3. Per accendere la bilancia, appoggiare un piede sulla pedana
4. La prima volta il display visualizza la scritta "8" ed in seguito "0,0" sarà visualizzato sul display.
5. Si prega di attendere la visualizzazione della scritta "0,0". A questo punto la bilancia è pronta per la misurazione.
6. Posizionare l'animale sulla bilancia.
7. Il peso dell'animale lampeggerà sul display due volte. Il risultato della misurazione sarà leggibile per dieci secondi circa.
8. Dopo la pesatura la bilancia si spegnerà automaticamente dopo circa 60 secondi.

Alimentazione:

La bilancia funziona con una batteria al litio sostituibile. (Tipo CR 2032) inclusa

Sostituzione delle batterie:

Quando la scritta "LO" compare sul display, si prega di sostituire le batterie.

Messaggi d'errore visualizzati dal display:

Se il carico supera i 100 kg, la bilancia visualizza sul display "ERR".
Per evitare guasti si prega di non sovraccaricare la bilancia! Se la bilancia è sottoposta ad un carico eccessivo potrebbe danneggiarsi. In questo caso la garanzia decade.

Condizioni ambientali:

La temperatura ambientale può influenzare significativamente la precisione di misurazione. Misurazioni corrette ed accurate possono essere ottenute ad una temperatura di utilizzo di (10°-40° C).

Note:

Si prega di non utilizzare la bilancia nelle immediate vicinanze di apparecchi che generano potenti emissioni elettromagnetiche (cellulari, forni a microonde). Per pulire la bilancia si raccomanda l'utilizzo di un panno inumidito senza utilizzare alcun solvente.



Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Condizioni di garanzia Gima

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

Manufacturer/Produttore/Fabricant/Fabricante:

Momert Co.Ltd.

2400 Dunaújváros - HUNGARY, Papírgyári út 12-14

Made in Hungary



Distribuito da/Distributed by/Distribué par/Distribuido por

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

M 27259 - IT - Rev. 2.02.2020