




GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

MISURATORE A NASTRO BODY TAPE MEASURE MESURE DU CORPS PAR RUBAN CINTA MÉTRICA DEL CUERPO FITA MÉTRICA CORPORAL MEZOYPA ΣΩΜΑΤΟΣ

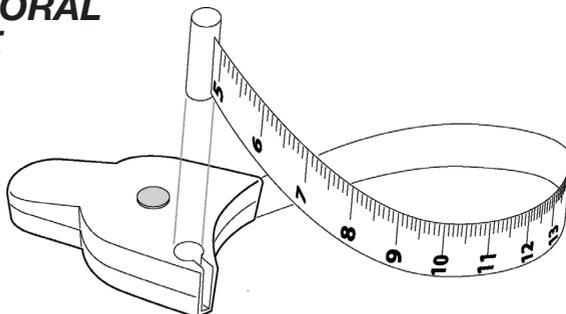

Il misuratore a nastro è uno strumento per la misurazione della circonferenza fino ad un massimo di 152 cm. Può essere utilizzato su ogni parte del corpo di forma circolare (addome, bicipiti, ecc.).

*Non tirare con violenza; poiché la molla o il nastro potrebbero rompersi o deformarsi.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.*

Tirare lentamente il nastro e avvolgerlo, senza attorcigliarlo, alla parte del corpo da misurare; premere il pulsante per facilitare il rilascio del nastro.

Inserire il terminale del nastro nell'apposita sede (foro rotondo) rispettando l'orientamento e premere il pulsante per riavvolgere il nastro fino a che sia ben teso.

Leggere la misura in corrispondenza della fessura di uscita del nastro.

Consigliamo di pulire lo strumento con un detergente delicato che non intacchi o rovini il nastro e la stampa.

Riavvolgere sempre il nastro al termine dell'uso.

Le misure si intendono puramente indicative.

REF 27343

Importato da / Imported by / Importé de / Importado de / Importado de / Εισαγόμενα από:

Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in China

