



GIMA

ARTICOLI & APPARECCHI PER MEDICINA

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Italia: tel. 199 400 401 - fax 199 400 403
Export: tel. +39 02 953854209/221/225 - fax +39 02 95380056
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

TAVOLO DI MAYO BASE IN ACCIAIO INOX E POMPA OLEODINAMICA



Manuale utente

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

La ringraziamo per la fiducia accordataci con l'acquisto dei nostri articoli. La preghiamo di leggere attentamente questo manuale, predisposto appositamente per informarla circa il suo corretto uso in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

NORMATIVE

Tutti i modelli sono realizzati nel rispetto delle vigenti normative UNI, eliminando fonti di eventuale rischio per l'utente in caso di urto involontario, come bordi taglienti, spigoli vivi, base di lavorazione.

SICUREZZA

Non è consentito l'utilizzo per scopi estranei alla sua destinazione.

Il costruttore declina ogni responsabilità per danni provocati da un utilizzo del prodotto in modo scorretto, improprio o non previsto nel presente manuale.

Sostituire tempestivamente, per ragioni di sicurezza, parti usurate o danneggiate.

MANUTENZIONE / PULIZIA

Il carrello non richiede particolari manutenzioni, tuttavia deve essere controllato il corretto serraggio di tutte le parti mobili, prima dell'impiego.

- Per la pulizia possono essere utilizzati normali detersivi, purché non contengano cloro e suoi composti. Al momento della pulizia è importante seguire il senso della satinatura dell'acciaio inossidabile, senza esercitare una pressione eccessiva.
- Nel caso di macchie persistenti provare con prodotti specifici per l'acciaio inox.

Attenzione:

Non usare per la pulizia pagliette in acciaio o altro che possa graffiare o smerigliare. Evitare l'uso di acido muriatico o candeggina. Non lasciare a lungo sul piano oggetti di ferro.

ASSISTENZA

Nel caso che qualche componente, fuori dall'ordinaria manutenzione, si dovesse deteriorare, rivolgersi al vostro distributore, saranno a vostra disposizione per qualsiasi problema consigliandovi la soluzione più opportuna.

GARANZIA

- Questo articolo è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di fatturazione.
- La Ditta costruttrice assicura la sostituzione di tutte quelle parti originali che, in condizioni di normale utilizzo e manutenzione dell'articolo (escludendo quindi qualunque uso professionale) risultassero, a giudizio insindacabile dei suoi tecnici, difettose per fabbricazione.
- Non sono coperte da tali garanzie :
 - Le parti danneggiate per normale usura e da cattivo uso / manutenzione dell'articolo;
 - Le parti danneggiate da montaggio ed utilizzo non conforme alle prescrizioni del presente libretto.
- Resta inteso che la garanzia verrebbe automaticamente a decadere qualora siano state effettuate delle modifiche sull'articolo senza assenso del costruttore, oppure siano stati montati sull'articolo dei particolari non originali.
- Il costruttore declina inoltre qualunque responsabilità in materia di responsabilità civile derivante da un utilizzo dell'articolo improprio o non conforme alle norme di uso e manutenzione.
- L'assistenza in garanzia sarà riconosciuta solo se la richiesta presso il rivenditore autorizzato sarà accompagnata dalla presentazione di questo libretto debitamente timbrato.

- Tutte le spese di manodopera e di trasporto, come per eventuali danni o perdite subite durante quest'ultimo, saranno a carico dell'utente, così come le eventuali spese di regolazione o di normale manutenzione.
- Si consiglia di verificare immediatamente dopo l'acquisto che il prodotto risulti visivamente in buono stato e di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'utilizzo.
- Ogni richiesta di parti di ricambio dovrà specificare il modello dell'articolo, data di acquisto ed il numero del particolare.

AVVERTENZE

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.
Smaltimento : il prodotto descritto in questo manuale deve essere consegnato a ditte specifiche per la rottamazione.

INFORMAZIONI GENERALI

Carrello servitore porta-strumenti regolabile in altezza; vassoio asportabile in acciaio inox AISI 304 finitura scotch brite; struttura porta vassoio in tubolare di acciaio inox fissato alla pompa; pompa con movimento idraulico per la regolazione in altezza del vassoio da cm 85 a cm 120 mediante pedale. Base in acciaio inox AISI 304 finitura scotch brite; con quattro ruote gemellate piroettanti diam. 50 mm. Modello smontato fornito in kit di montaggio.

SCHEDA DIMENSIONALE

Dimensione (L x P x H) Cm	70 x 45 x 85 / 120
Dim. Piano (L x P x H) Cm	70 x 45 x 1,8
Portata x piano Kg	40
Peso netto Kg	19,0
Peso lordo Kg	20,0
Volume mc	0,08
Numero colli	1
Imballo (L x P x H) Cm	60 x 17 x 77

