



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Italia: tel. 199 400 401 - fax 199 400 403
Export: tel. +39 02 953854209/221/225 - fax +39 02 95380056
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

LETTINO 3 PEZZI POLIVALENTE

3-SECTION MULTIFUNCTIONAL BED

DIVAN POLYVALENT 3 PIÈCES

CAMILLA 3 PIEZAS POLIVALENTE

Manuale utente - User manual - Notice d'utilisation - Manual del usuario

ATTENZIONE: *Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.*

ATTENTION: *The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.*

AVIS: *Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.*

ATENCIÓN: *Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.*



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) Italy

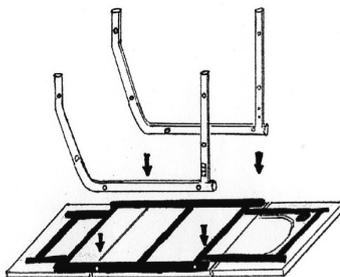


Fig. 1

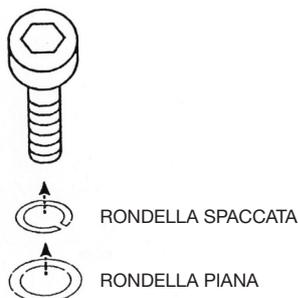


Fig. 2

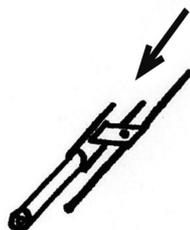


Fig. 3

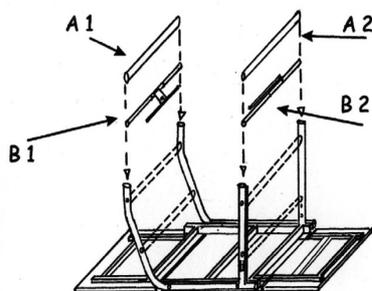


Fig. 4

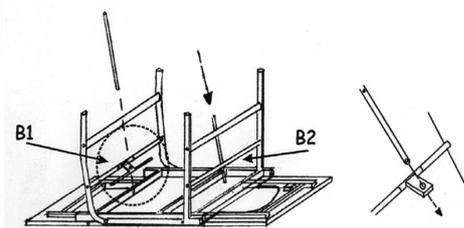


Fig. 5

Fig. 5.1

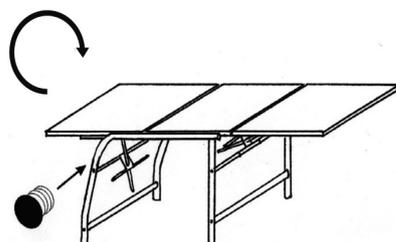


Fig. 6

ITALIANO

Fig. 1

- Estrarre dalla scatola le gambe e le traverse.
- Posizionare le gambe di fronte alle bussole filetate nel telaio del pianale imbottito tenendo il foro con diametro maggiore all'esterno del letto.

Fig. 2

- Procedere con l'inserimento delle viti (assicurandosi che le rondelle delle stesse siano a loro volta inserite correttamente nella brugola).
- N.B.: le viti vanno serrate energicamente a fine montaggio.

Fig. 3

- Inserire l'accessorio per il bloccaggio dei cuscini nella traversa cromata.

Fig. 4

- Posizionare le traverse come da disegno: B1 bloccaggio con piastra lunga. B2 bloccaggio con piastra corta.
- Procedere con l'inserimento delle viti (fig. 2).
- N.B.: si consiglia per un funzionamento ottimale di tenere la bussola cromata di b1 e b2 con il diametro maggiore rivolto verso il pianale imbottito.

Fig. 5

- Inserire l'asta cromata lunga in B1 e l'asta corta in B2 (Fig. 5 e 5.1)
- Bloccare le aste ai cuscini con le apposite viti dopo aver controllato che l'accessorio per il bloccaggio (Fig. 3) sia rivolto verso il centro del lettino.

Fig. 6

- N.B.: Per portare il lettino in posizione di lavoro è bene avvalersi dell'aiuto di una seconda persona poiché l'art. 27505 è di notevole peso.
- Serrare energicamente le viti.
- Inserire i 12 copritesta in plastica con l'ausilio di un martello
- N.B.: la rotazione del lettino potrebbe causare bruschi movimenti ai cuscini fare molta attenzione.

