



Via Dell'Artigianato 305/319
Castelbolognese – RA
Italy

Manuale istruzioni
Versione N° 00
del 08/01/2003



**MANUALE ISTRUZIONI
INSTRUCTION MANUAL**

Italiano/English



SPD



SPD/I



SPD/A



SPD/SPD-1/SPD-A



Leggere il presente manuale prima di utilizzare il seggiolino
Read this manual before operating the stool

| | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|
| VERSIONE/ VERSION N.00 | REDATTO/DREW BY <i>F. Marrone</i> | DATA/DATE 08/01/2006 | APPROVATO/ APPROVED BY <i>Maurilio Longo</i> | DATA/DATE 08/01/2006 |
|------------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|

Questo documento è realizzato da EUROCLINIC . È vietata la duplicazione e la divulgazione non autorizzata
This document has been made by EUROCLINIC . It is prohibited to double or divulge it without authorisation.

1. INTRODUZIONE

I seggiolini SPD, SPD-1 e SPD-A sono sedute per professionisti, con basamento pentapiede o circolare con ruote gommate autofrenanti e piroettanti a 360°. Altezza regolabile tramite pompa a gas ed appoggio dorsale registrabile in profondità e girevole a 180°. Le imbottiture sono a densità equilibrata e sono rivestite in Peltex (tessuto polivinilico spalmato ad alta resistenza) in colore a scelta. Tra i modelli: SPD, SPD/1, SPD/A e si differenziano solo dal tipo di basamento.

2. INSTALLAZIONE (Vedi schema seguente)

Aprire l'imballo contenente il seggiolino e seguire le seguenti istruzioni di montaggio:

1. Innestare il perno alle ruote
2. Innestare le ruote al basamento
3. Montare la colonna a gas sul basamento
4. Montare il meccanismo movimentazione alla colonna a gas
5. Infilare la lama dello schienale nel supporto apposito e stringere il pomello
6. Fissare le tappezzerie con le viti in dotazione


• SCHEMA DI MONTAGGIO E INSTALLAZIONE – INSTALLATION SCHEME



1+2



3

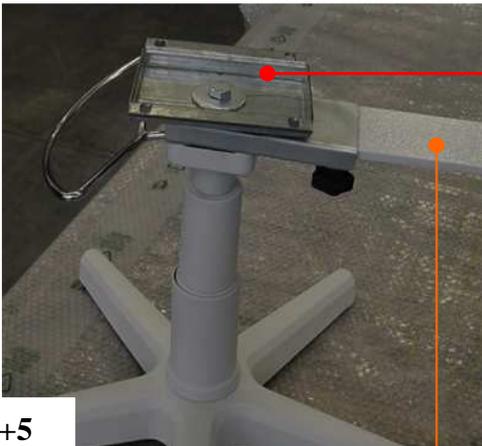

4+5



6




6

3. MOVIMENTAZIONE SEDILE

Sollevando verso l'alto la leva A si sblocca il movimento sia verso l'alto che verso il basso; per bloccare il seggiolino nella posizione desiderata e' sufficiente spingere verso il basso la stessa leva.

3. SEAT HANDLING

Lifting up the lever "A" the up/down movement is unblocked: to block the stool at the desired position it is enough to push down the same lever;

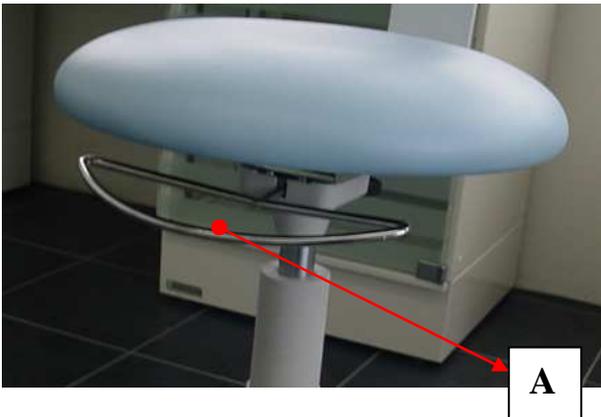


4. MOVIMENTAZIONE SCHIENALE

E' possibile spostare longitudinalmente lo schienale tramite il pomello B.

4. BACKREST HANDLING

It is possible to move longitudinally the backrest through knob B

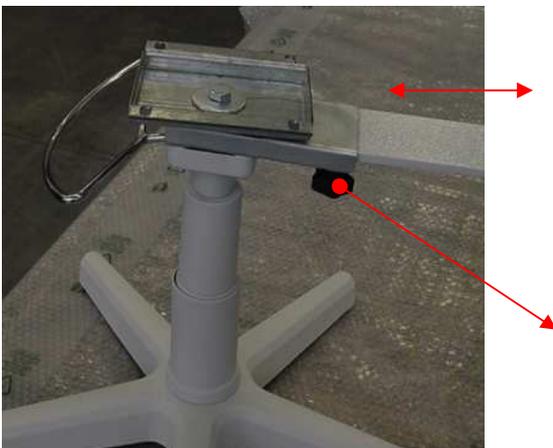

5. MANUTENZIONE. PULIZIA DEI SEGGIOLINI.

I materiali impiegati nella costruzione delle apparecchiature sono idonei a sopportare le operazioni di pulizia e disinfezione previste nelle presenti istruzioni.

La grande varietà di farmaci e prodotti chimici utilizzati nello studio medico possono danneggiare le superfici verniciate e le parti in materiale plastico.

Le prove e le ricerche effettuate hanno dimostrato che le superfici non possono essere completamente protette dall'aggressione di tutti i prodotti reperibili sul mercato.

Gli effetti di questi prodotti dipendono essenzialmente dal tempo di permanenza sulle superfici.

È importante rimuovere immediatamente con un panno umido tali sostanze dalle superfici dell'apparecchio.

Per pulire utilizzare un panno inumidito; non spruzzare i detergenti direttamente sull'apparecchio.

ATTENZIONE!

Non utilizzare prodotti contenenti alcool, ammoniaca, sostanze abrasive o benzolo. Le concentrazioni riportate in seguito sono le massime ammesse e non devono essere superate:

Ammonii quaternari: massimo 2%


Aldeide glutarica: massimo 2%

**La EUROCLINIC NON RISPONDE DEI DANNI
PROVOCATI DALL'USO DI DISINFETTANTI
CONTENENTI SOSTANZE ATTIVE DIVERSE
DA QUELLE SOPRA ELENATE**

6. SPARE PARTS LIST


Euroclinic

Tabella codici
SPD/A
codice struttura
25500702

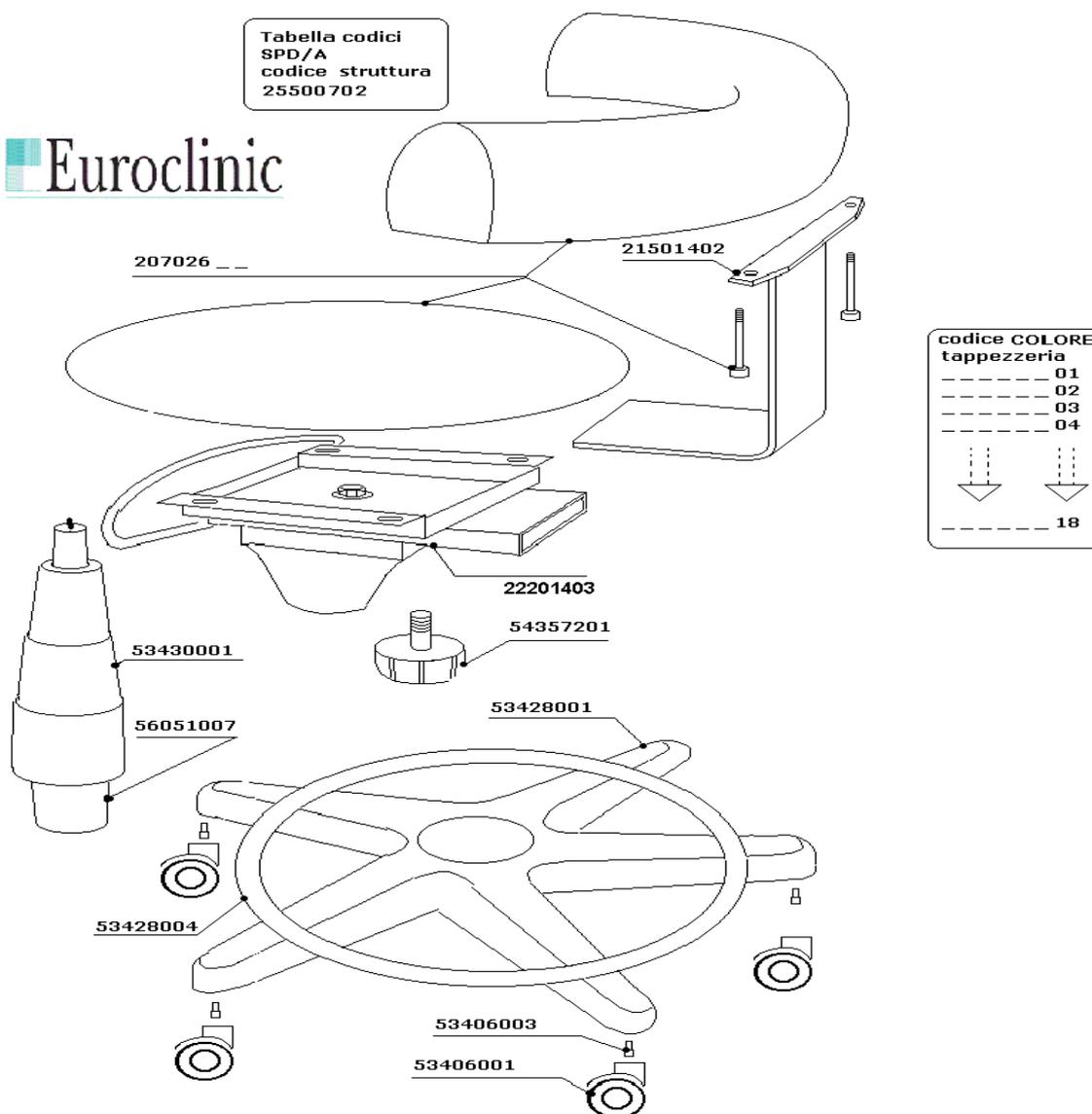

SPD

SPD/1

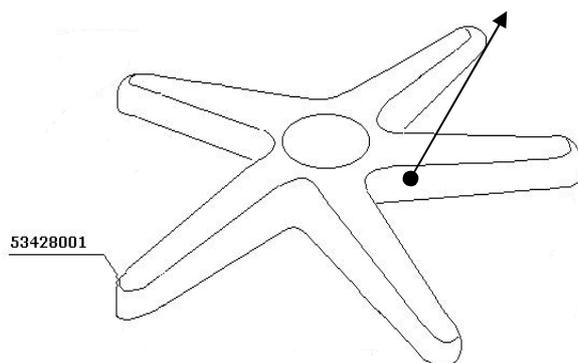

21501401

