



TITANOX s.r.l. - via Canove 2/A - Loc. Canove dé
Biazzì -26038 Torre dé Picenardi (CR) - Italy -
www.titanox.it info@titanox.it MADE IN ITALY

Manuale d'uso "T3000"

Struttura in tubo d'acciaio verniciato con polvere epossidica. Tre sezioni a controllo indipendente e posizione Trendelenburg. Imbottitura in schiuma poliuretanica ad alta densità ed ignifuga classe 1 IM, copertura in tessuto spalmato, lavabile ed ignifuga classe 1 IM. Piedini regolabili in gomma. Completo di aste reggi coscia in acciaio zincato, reggi coscia imbottiti anatomici, reggi spalle, manopole, portarotolo e catino in acciaio inox diam 3 cm. Smontato.

Dimensioni: 181x60x80h cm. Portata: 150Kg

Tutti i prodotti sono realizzati eliminando fonti di eventuale rischio per l'utente in caso di urto involontario, come bordi taglienti o spigoli vivi

Il prodotto è destinato all'uso esclusivo da parte di personale medico specializzato istruito su utilizzo e cura degli strumenti. Non è consentito l'utilizzo per scopi estranei alla sua destinazione. L'uso scorretto o la scarsa o non appropriata manutenzione possono far deteriorare rapidamente gli strumenti.

- Controllare il corretto serraggio di tutte le parti mobili prima e durante l'uso;
- Per la pulizia non utilizzare sostanze abrasive, acidi, alcool, detergenti a base di cloro, disinfettanti ed acetone: il fabbricante non sarà responsabile per il danneggiamento causato dall'utilizzo di materiali che possano deteriorare la superficie del prodotto o da corrosivi chimici utilizzati durante la pulizia.

CONDIZIONI DI GARANZIA TITANOX

Si applica la garanzia Titanox di 12 mesi dalla data di fatturazione.

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.



TITANOX s.r.l. - via Canove 2/A - Loc. Canove dé
Biazzì - 26038 Torre dé Pícenardi (CR) - Italy -
www.titanox.it info@titanox.it MADE IN ITALY

REF T3000




	IT Fabbricante ENG Manufacturer FR Fabricant
	IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso ENG Caution: read instructions (warnings) carefully FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)
	IT Leggere le istruzioni per l'uso ENG Consult instructions for use FR Consulter les instructions d'utilisation
	IT Conservare al riparo dalla luce solare ENG Keep away from sunlight FR Á conserver à l'abri de la lumière du soleil
	IT Conservare in luogo fresco ed asciutto ENG Keep in a cool, dry place FR Á conserver dans un endroit frais et sec
	IT Codice prodotto ENG Product code FR Code produit
	IT Numero di lotto ENG Lot number FR Numéro de lot
	IT Dispositivo medico ENG Medical Device FR Dispositif médical
	IT Il dispositivo è conforme ai requisiti del regolamento sui dispositivi medici (UE) 2017/745 ed è classificato come dispositivo medico di classe I ENG The product complies with the requirements of the regulation on medical devices (EU) 2017/745 and is classified as a Class I medical device FR Le produit est conforme aux exigences du règlement sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745 et est classé comme dispositif médical de classe I

T3000


**LETTO PARTO
DELIVERY BED
LIT D'ACCOUCHEMENT**

- 1) Estrarre le gambe e i traversi dal cartone.
- 1) Take out legs and crossbars from the carton box.
- 1) Sortir les pieds et les traverses du carton.



- 2) Posizionare le gambe in corrispondenza dei fori delle viti presenti sul telaio (FIG.1).
- 2) Position the legs in correspondence with the screw holes on the frame (FIG.1).
- 2) Positionner les pieds en correspondance des trous des vis présents sur le chassis (FIG.1).

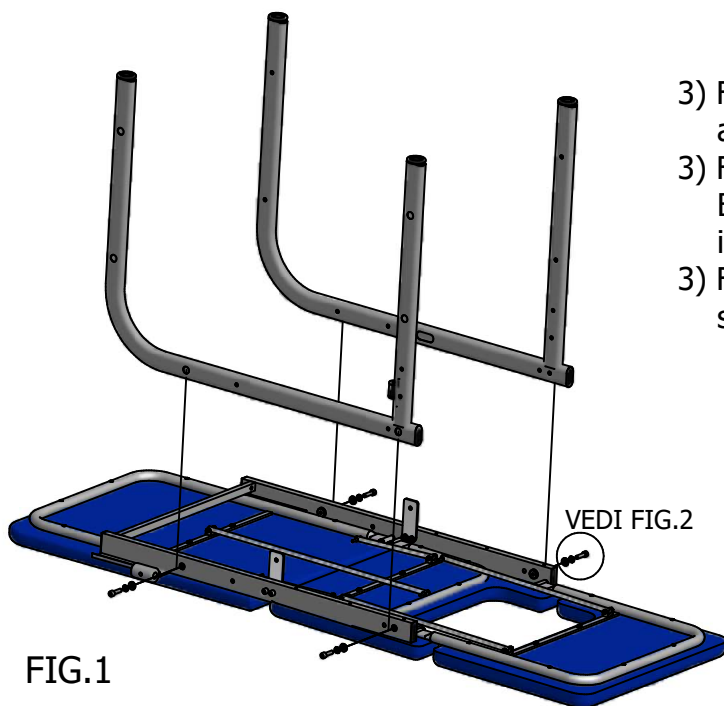

- 3) Fissare le gambe utilizzando le viti avvitate al telaio, assicurarsi di inserire le rondelle correttamente (FIG.2).
- 3) Fix the legs using the screws, screwed to the frame. Be sure that the rings of the screws are correctly inserted (FIG.2).
- 3) Fixer les pieds en employant les vis vissées au chassis, s'assurer d'insérer les rondelles correctement (FIG.2).

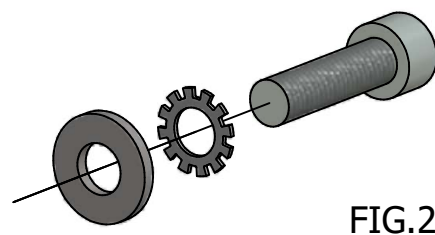

- 4) Inserire i traversi nel seguente ordine: B1, A1, B2, A2, C (FIG.3) e fissarli con le apposite viti.
- 4) Insert the crossbars in the following order: B1, A1, B2, A2, C (FIG.3) and secure them with the screws.
- 4) Introduire les traverses selon l'ordre suivant: B1, A1, B2, A2, C (FIG.3) et les fixer avec les vis spéciales.

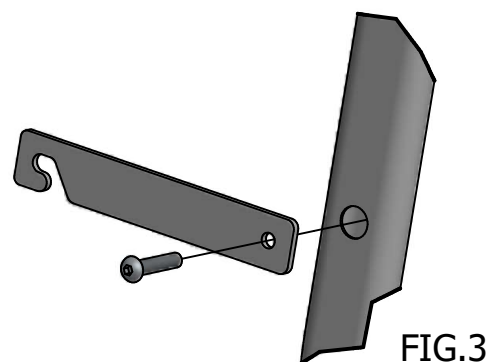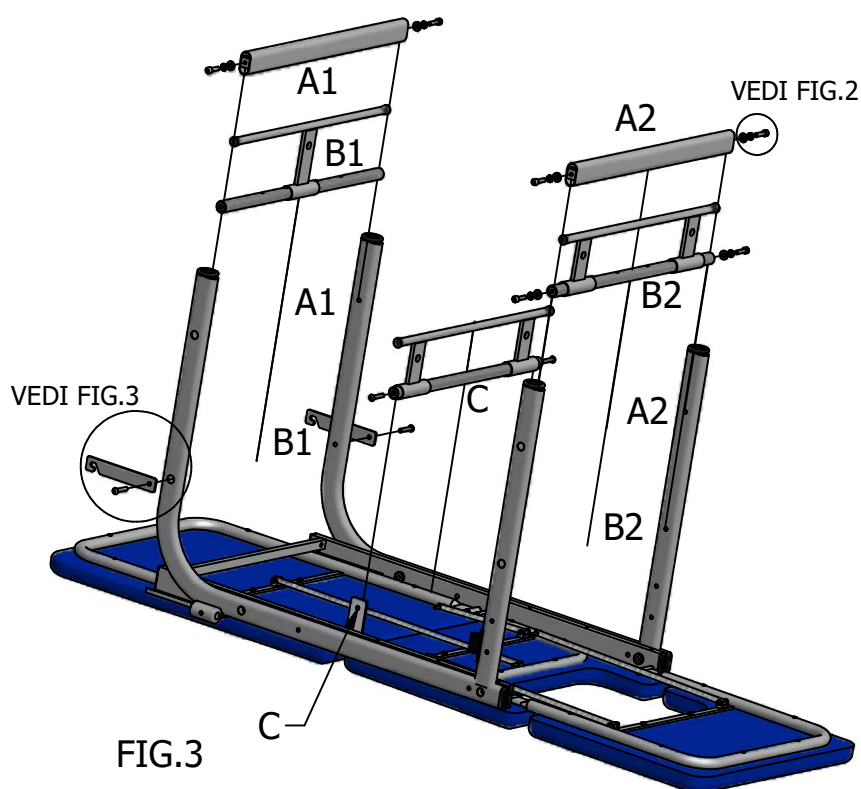

- 5) Nella posizione B1 va fissato il porta rotolo (FIG.4).
- 5) Fix the paper roll holder in position B1 (FIG.4).
- 5) A la position B1 il faut fixer le porte rouleau (FIG.4).

T3000

**LETTO PARTO
DELIVERY BED
LIT D'ACCOUCHEMENT**

- 6) Inserire il fermo lungo nella posizione D e i fermi corti nella posizione E e F con le apposite viti (FIG.5). Bisogna mantenere entrambe le leve arresto rivolte verso il centro del letto.
- 6) Insert the long rod into position D and the short rods into E and F position with the appropriate screws (FIG.5). You have to keep both levers directed towards the center of the bed.
- 6) Insérez la tige d'arrêt longue dans la position D et les tiges d'arrêt courte dans la position E et F avec les vis spéciales (FIG.6). Il faut maintenir les deux leviers d'arrets adressés vers le centre du divan.

FIG.5

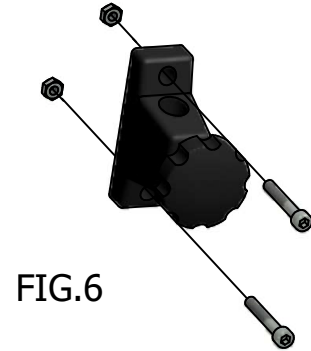
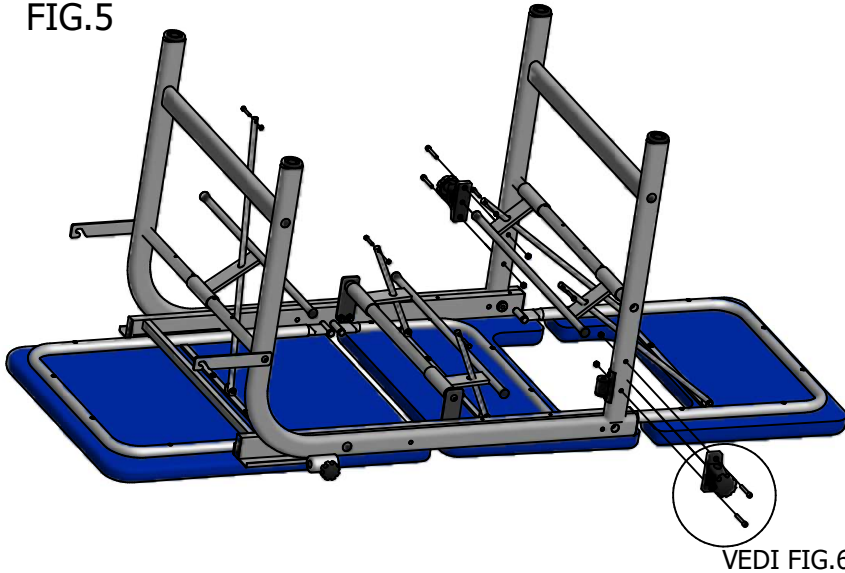


FIG.6

- 7) Fissare il supporto reggicoscia (FIG.6)
- 7) Fix the leg holder support (FIG.6)
- 7) Fixer le support de l'appui cuisse (FIG.6)

- 8) Girare il letto in posizione di lavoro. Sono necessarie due persone perchè l'art T2000 è pesante. Durante la rotazione, mantenere il letto in posizione longitudinale, per evitare che si apra.
- 8) Turn the bed in working position. Two persons are needed to put the examination couch in working position, because art T2000 is heavy. During the rotation, keep couch in longitudinal position, in order to avoid a sudden opening.
- 8) Tourner le divan en position de travail. Sont nécessaires deux personnes car l'article T2000 est lourd. Pendant la rotation, maintenir le divan en position longitudinale, pour éviter qu'il s'ouvre.

- 9) Fissare le viti.
- 9) Tighten the screws.
- 9) Visser les vis.

- 10) Fissare le maniglie e inserire col martello i 10 tappi coprifuco (FIG.7 - FIG.8).
- 10) Fix the handles and insert the 10 screw covers with a hammer (FIG.7 - FIG.8).
- 10) Visser les poignées et insérer les 10 bouchons couvre-trou avec le marteau (FIG.7 - FIG.8).

FIG.7

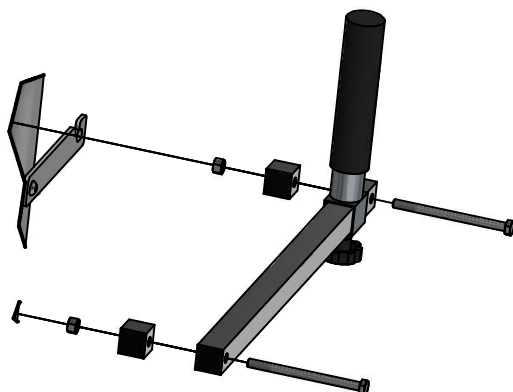


FIG.8

