



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
Italia: tel. 199 400 401 - fax 199 400 403  
Export: tel. +39 02 953854209/221/225 - fax +39 02 95380056  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

---

## **LETTINO VISITA KING**

## **EXAMINATION COUCH KING**

## **DIVAN D'EXAMEN KING**

## **CAMILLA VISITA KING**

**Manuale utente - User manual - Notice d'utilisation - Manual del usuario**

---

**ATTENZIONE:** *Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.*

**ATTENTION:** *The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.*

**AVIS:** *Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.*

**ATENCIÓN:** *Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.*



Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1  
20060 Gessate (MI) Italy

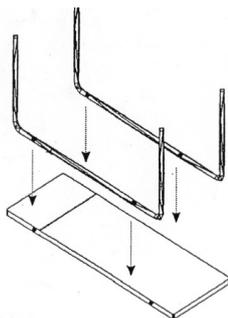


Fig. 1

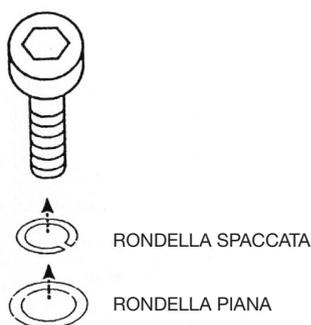


Fig. 2

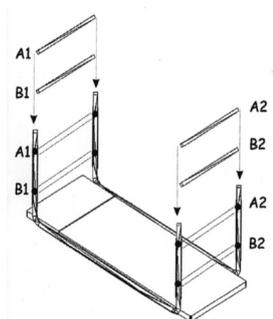


Fig. 3

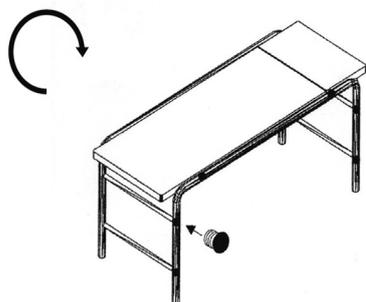


Fig. 4

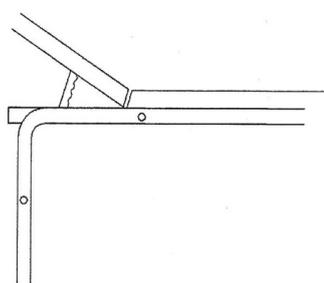


Fig. 5

**ITALIANO**

**Fig. 1**

- Estrarre dalla scatola le gambe e le traverse.
- Posizionare le gambe di fronte alle bussole filetate nel telaio del pianale imbottito tenendo il foro con diametro maggiore all'esterno del letto.

**Fig. 2**

- Procedere con l'inserimento delle viti (assicurandosi che le rondelle delle stesse siano a loro volta inserite correttamente nella brugola).

N.B. le viti vanno serrate energicamente a fine montaggio.

**Fig. 3**

- Inserire le traverse nel seguente ordine: B1, A1, B2, A2 come indicato in figura.
- Procedere con l'inserimento delle viti (Fig. 3).

A1/A2 Tubo ovale 50x25x1.5  
B1/B2 Tubo tondo 30x2

**Fig. 4**

N.B.: Per portare il lettino in posizione di lavoro è bene avvalersi dell'aiuto di una seconda persona poiché l'articolo è di notevole peso. Durante la rotazione mantenere in posizione longitudinale il cuscino testiera onde evitare una brusca apertura.

- Serrare energicamente le viti.
- Inserire i 12 copritesta in plastica con l'ausilio di un martello (Fig. 4).

**Fig. 5**

**MODO D'USO**

La testiera è regolabile per mezzo di una cremagliera.

Dopo aver portato il cuscino all'altezza desiderata, se lo si vuol riportare in posizione orizzontale è necessario che la cremagliera arrivi fino al termine della sua corsa (Fig. 5).

