

LETTINO ELETTRICO PER TRATTAMENTI

Manuale d'uso



ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) Italy

1. NOTE DI MONTAGGIO:

Il prodotto è fornito già montato.

Togliere il lettino dalla scatola e provvedere a togliere tutte le protezioni (film protettivo e pluriball su parte motore).

Inserire la presa di corrente e attraverso il comando a pedale alzare il lettino fino all'altezza desiderata.

2. USO PREVISTO

Lettino visita e trattamenti robusto e estremamente stabile. Altezza regolabile attraverso comando a pedale.

Sezione gambe fissa e testata con foro naso e bocca regolabile manualmente.

Imbottitura ignifuga. Capacità sollevamento: 140 kg, lunghezza: 193 cm.

Il costruttore declina ogni responsabilità conseguente ad un uso non corretto delle attrezzature fornite.

Il trasporto e le operazioni di scarico devono essere effettuate esclusivamente da personale specializzato e autorizzato.

3. LIMITAZIONI D'USO E AVVERTENZE

Il lettino NON deve essere utilizzato:

- In atmosfera a rischio d'incendio, esplosiva o corrosiva.
- Esposto alle intemperie.
- Con manomissioni e/o modifiche sul prodotto originale.
- Non inserire parti del corpo nelle parti soggette a movimento e/o regolazione.
- Il lettino deve essere utilizzato in situazione di buona stabilità e con i piedini di appoggio posti su di una superficie piana.
- Mantenere saldamente fermo il lettino durante la salita e discesa del paziente poiché esistono rischi di ribaltamento.
- Evitare che il paziente salga dalla parte dello schienale.



Attenzione:

Le lampade terapeutiche irradianti possono danneggiare le similpelle dell'imbottitura.

Prodotti detergenti corrosivi e/o abrasivi possono danneggiare la similpelle dell'imbottitura.



SMALTIMENTO:

Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per ulteriori informazioni sui luoghi di raccolta, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto. In caso di smaltimento errato potrebbero venire applicate delle penali, in base alle leggi nazionali.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Ci congratuliamo con Voi per aver acquistato un nostro prodotto. Questo prodotto risponde a standard qualitativi elevati sia nel materiale che nella fabbricazione. La garanzia è valida per il tempo di 12 mesi dalla data di fornitura GIMA. Durante il periodo di validità della garanzia si provvederà alla riparazione e/o sostituzione gratuita di tutte le parti difettose per cause di fabbricazione ben accertate, con esclusione delle spese di mano d'opera o eventuali trasferte, trasporti e imballaggi. Sono esclusi dalla garanzia tutti i componenti soggetti ad usura. La sostituzione o riparazione effettuata durante il periodo di garanzia non hanno l'effetto di prolungare la durata della garanzia. La garanzia non è valida in caso di: riparazione effettuata da personal non autorizzato o con pezzi di ricambio non originali, avarie o vizi causati da negligenza, urti o uso improprio. GIMA non risponde di malfunzionamenti su apparecchiature elettroniche o software derivati da agenti esterni quali: sbalzi di tensione, campi elettromagnetici, interferenze radio, ecc. La garanzia decade se non viene rispettato quanto sopra e se il numero di matricola (se presente) risulti asportato, cancellato o alterato. I prodotti ritenuti difettosi devono essere resi solo e soltanto al rivenditore presso il quale è avvenuto l'acquisto. Spedizioni inviate direttamente a GIMA verranno respinte.



REF 27633



GIMA S.p.A. Via Marconi, 1 – 20060 Gessate (MI) – Italy