



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

## DEAMBULATORE CON 2 RUOTE WALKING FRAME WITH 2 WHEELS DÉAMBULATEUR AVEC 2 ROUES ROLLATOR MED 2 HJUL

ITALIANO

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

### INTRODUZIONE

Lo scopo di questo manuale è di fornire le istruzioni per un normale e corretto uso dell'ausilio sia da parte del paziente che del suo eventuale assistente/accompagnatore.

### DESTINAZIONE D'USO

Il deambulatore è stato progettato e realizzato per essere utilizzato all'interno da pazienti con insufficiente uso/sostegno degli arti inferiori. Esso ha lo scopo di fornire al corpo un supporto che, utilizzato con entrambe le braccia, aiuti o consenta la mobilità altrimenti impossibile o ridotta.

**ATTENZIONE!** Il deambulatore è destinato prevalentemente ad uso interno e solo su superfici piane. Nel caso fosse necessario utilizzare questo deambulatore in ambienti esterni, si raccomanda il rispetto delle regole del codice stradale al pari di qualsiasi pedone.

Prima di ogni utilizzo assicurarsi che:

- Il deambulatore sia stato regolato all'altezza corretta.
- I puntali siano in buone condizioni. Nel caso sostituirli immediatamente se usurati o mancanti.
- Assicurarsi che le gambe del deambulatore siano state regolate alla stessa altezza.

### MANUTENZIONE

Il deambulatore non richiede cure particolari per la manutenzione ordinaria. Consigliamo comunque di effettuare regolarmente:

- verifica dell'integrità dei vari componenti
- controllo che viti e dadi risultino ben avvitati
- verifica delle parti meccaniche in movimento e, se è il caso, lubrificarle.
- pulire con detergente neutro (non utilizzare prodotti corrosivi o nocivi) e stoccarlo in un ambiente asciutto e ventilato.

### AVVERTENZE!

Non usare l'ausilio se si rilevano danni o parti mancanti. Non utilizzare per altri scopi diversi da quelli per i quali questo ausilio è stato progettato. Non superare ostacoli o utilizzare su pavimenti sconnessi o non in piano, bagnati o scivolosi. L'utilizzo del dispositivo è sconsigliato per persone con scarse funzionalità nelle mani o nelle braccia.

Usare solo accessori originali. L'uso di accessori non originali potrebbe causare il rischio di cadute e lesioni. Non utilizzare sulle scale. L'uso di deambulatori in acqua (docce, vasche da bagno, piscine, ecc.) può favorire l'ossidazione dei meccanismi di funzionamento causando danni al deambulatore e/o lesioni all'utente.

**Portata massima: 100kg**

### ASSEMBLAGGIO

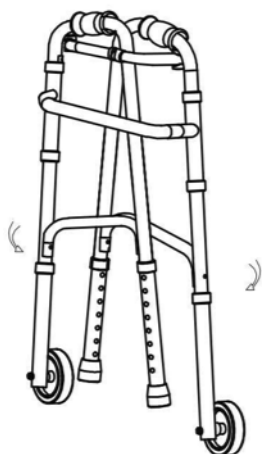


fig. 1

**Passaggio 1:** Estrarre il deambulatore dalla scatola. Il deambulatore risulta fissato quando ti sente un rumore di bloccaggio.

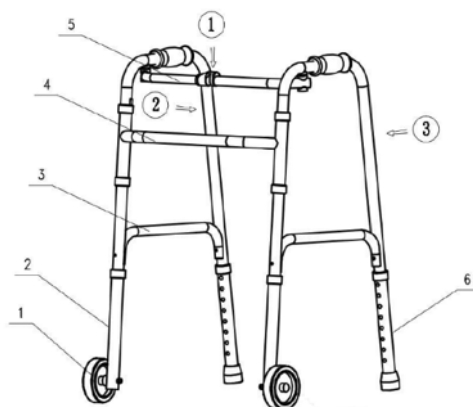


fig. 2

**Passaggio 2:** per chiudere il telaio, premere il pulsante ① come mostrato nella fig. 2, quindi piegare la parte sinistra e destra del telaio (vedi ② e ③).

N°	Parti	PZ
1	Ruote	2
2	Tubo della gamba	2
3	Connettore del telaio	2
4	Traversa	1
5	Telaio elastico	1
6	Gambe regolabili	2

	Fabbricante		Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Leggere le istruzioni per l'uso		Conservare al riparo dalla luce solare
<b>REF</b>	Codice prodotto	<b>CE</b>	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745
<b>LOT</b>	Numero di lotto		Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso
<b>MD</b>	Dispositivo medico	<b>EC REP</b>	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea
	Data di fabbricazione		

### CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

---

**REF** FS9125L (27723)



**Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory (LTD.)**  
5 Xingfu Road, Zone A, Shishan Industrial Park,  
Nanhai District, Foshan City, China, 528000  
Made in China



**MedNet EC-Rep GmbH**  
Borkstrasse 10. 48163 Muenster. Germany

Importato da / Imported by / Importé par / Importerad av:  
**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

