



GIMA


PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ITALIANO

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

Grazie! Avete acquistato un ausilio destinato ad essere utilizzato nei servizi igienici o bagni. Il suo scopo è di agevolare l'utenza disabile ad utilizzare

i servizi igienici. Qualsiasi altro utilizzo è vietato. Utilizzare solo in posizione seduta e non salire mai in piedi, per il montaggio fare riferimento alle immagini esplicative sotto. **NON** installare questo prodotto senza aver prima letto e compreso questo manuale di istruzioni. La mancata consultazione delle istruzioni potrebbe creare lesioni gravi.

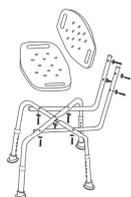


COD 27730




COD 27758




COD 27759

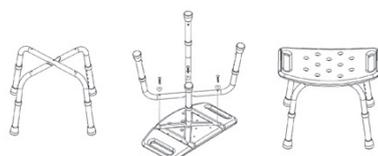


COD 42900 / 42903 (SEDILE ROTONDO)

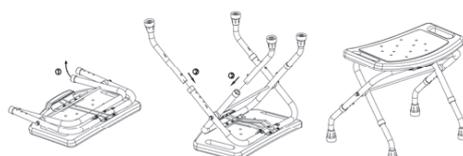


COD 42901

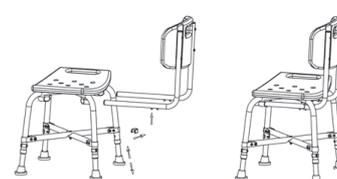

COD 42910

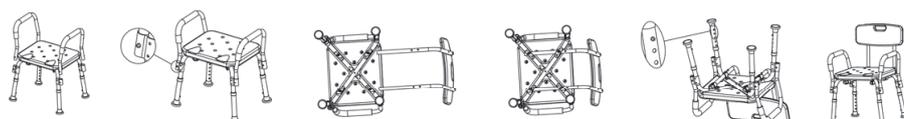

REF 42907

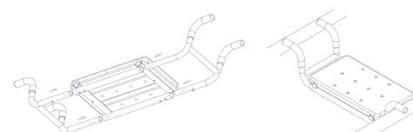

COD 42910



COD 42915

Pulizia

Utilizzare sempre un panno umido con detersivi neutri. Non immergere completamente il sedile in acqua. Dopo ogni utilizzo asciugare accuratamente le parti. Non utilizzare detersivi abrasivi in polvere o a base di candeggina.

Avvertenze

- Il sedile è raccomandato per persone con un peso massimo di 100 kg, per il codice 42906 150 kg.
- Il fabbricante e i distributori declinano ogni responsabilità per conseguenze derivanti da un uso improprio del prodotto.
- Verificare sempre che il prodotto sia integro, ben funzionante e in perfetto stato prima di usarlo.
- Evitare di tenere il prodotto all'esterno. Verificare periodicamente la stabilità del prodotto ed il corretto fissaggio delle viti, così come lo stato dei puntali in gomma.
- Aiutare sempre il paziente con difficoltà di deambulazione a posizionarsi sul sedile. Non salire in piedi, non usare con schiuma o sapone sul sedile.
- Evitare durante il posizionamento movimenti bruschi. Fare attenzione a pavimenti bagnati, umidi o scivolosi in genere, potrebbero rendere difficile il posizionamento del paziente.
- Il fabbricante non sarà in alcun modo responsabile per un uso improprio o imprudente del prodotto.
- Prima di ogni utilizzo verificare che tutte le giunzioni e raccordi a banco siano ben serrate.
- NON posizionare il prodotto su superfici irregolari.
- NON usare se traballante, instabile o non livellato.
- NON girarsi mentre si è seduti sul dispositivo, ciò potrebbe causare la piegatura del telaio.
- Verificare che i puntali siano in buone condizioni. Nel caso sostituirli immediatamente se usurati o mancanti.
- Aggiungere regolarmente l'olio lubrificante alle giunzioni.

Condizioni di esercizio

Temperatura: 5 ÷ 38°C
Percentuale umidità: 20÷ 90%
Pressione atmosferica: 800 ÷ 1060 hPa

Condizioni di conservazione e trasporto

Temperatura: - 10°C ÷ 50°C
Percentuale umidità: 20÷ 90%
Pressione atmosferica: 800 ÷ 1060 hPa

	Conservare in luogo fresco ed asciutto	REF	Codice prodotto
	Conservare al riparo dalla luce solare	LOT	Numero di lotto
	Leggere le istruzioni per l'uso	MD	Dispositivo medico
	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Fabbricante
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso		Data di fabbricazione
	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea	UDI	Identificativo Unico Dispositivo

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

**GIMA 27730 - 27758 - 27759 - 42900 - 42901 - 42903 - 42906
42907 - 42910 - 42915**



Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory (LTD.)
5 Xingfu Road, Zone A, Shishan Industrial Park,
Nanhai District, Foshan City, China, 528000
Made in China



**FS798L - FS7992LU - FS894L - FS797L - FS7963L - FS7972L
FS7981L - FS7985L - FS794L-1 - FS7962L**



MedNet EC-Rep GmbH

Borkstrasse 10. 48163 Muenster. Germany

Importato da / Imported by:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com

export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

