



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BASTONE ALLUMINIO REGOLABILE ADJUSTABLE ALUMINIUM WALKING STICK

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

INTRODUZIONE

Questo bastone, può essere regolato in altezza. Prodotto in alluminio il quale risulta essere leggero e resistente. La punta è ricoperta da una gomma antiscivolo.

Altezza Regolabile

COD. 27780 (da 71 a 94 cm)

COD. 27781 (da 67 a 90 cm)

COD. 27784 (da 77 a 100 cm): la lunghezza va regolata in base all'altezza dell'utente.

NORME DI SICUREZZA

Rivolgersi sempre al proprio rivenditore specializzato per regolare l'apparecchio e per imparare ad usarlo in modo adeguato. Non conservare all'esterno, non esporlo per periodi prolungati ai raggi solari. Prima dell'utilizzo verificare se tutti i collegamenti siano serrati correttamente.

Spostarsi sempre lentamente facendo piccoli passi per fare in modo che la distribuzione del peso sia regolare e la posizione sia stabile e sicura.

Non usare su superfici scivolose (pavimento bagnato, neve, ghiaccio.) né sulle scale.

Non usare per scopi diversi da quelli per cui questo prodotto è stato progettato.

Osservare sempre i limiti di peso indicati sull'etichetta o nelle istruzioni.

Usare solo parti originali per le riparazioni. Solo il personale qualificato è autorizzato a riparare questo articolo. In caso di lungo inutilizzo, far controllare l'apparecchio dal proprio rivenditore specializzato.

Prestare attenzione in caso di utilizzo su terreni imperfetti e dissestati. Controllare l'usura della gomma antiscivolo e sostituirla se necessario.

INSTALLAZIONE

La messa in servizio di questo prodotto deve essere effettuata solo da personale qualificato, un'errata regolazione potrebbe comportare un rischio di incidente.

Regolazione dell'altezza: allentare l'anello di serraggio. Premere il pulsante e far scivolare il tubo fino al foro di regolazione desiderato.

Far tornare il pulsante tornare in posizione di partenza. Avvitare l'anello di serraggio.

Per piegarlo, sganciare i tubi tra loro.

MANUTENZIONE

Il prodotto deve essere pulito regolarmente con uno straccio pulito e asciutto. L'impugnatura deve essere pulita con un detergente neutro (non usare prodotti corrosivi). Le estremità devono essere controllate e cambiate regolarmente in caso di usura.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

GIMA 27780 - 27781- 27784

Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory (LTD.)
5 Xingfu Road, Zone A, Shishan Industrial Park,
Nanhai District, Foshan City, China, 528000
Made in China

**FS920L - FS939L - FS938L(12)**

MedNet EC-Rep GmbH
Borkstrasse 10. 48163 Muenster.
Germany

Importato da / Imported by:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

