



TITANOX s.r.l. - via Canove 2/A - Loc. Canove dé  
Biazzì -26038 Torre dé Picenardi (CR) - Italy -  
www.titanox.it [info@titanox.it](mailto:info@titanox.it) MADE IN ITALY

## Manuale d'uso

Tutti i prodotti sono realizzati eliminando fonti di eventuale rischio per l'utente in caso di urto involontario, come bordi taglienti o spigoli vivi

Il prodotto è destinato all'uso esclusivo da parte di personale medico specializzato istruito su utilizzo e cura degli strumenti. Non è consentito l'utilizzo per scopi estranei alla sua destinazione. L'uso scorretto o la scarsa o non appropriata manutenzione possono far deteriorare rapidamente gli strumenti.

- Controllare il corretto serraggio di tutte le parti mobili prima e durante l'uso;
- Per la pulizia non utilizzare sostanze abrasive, acidi, alcool, detergenti a base di cloro, disinfettanti ed acetone: il fabbricante non sarà responsabile per il danneggiamento causato dall'utilizzo di materiali che possano deteriorare la superficie del prodotto o da corrosivi chimici utilizzati durante la pulizia.

### CONDIZIONI DI GARANZIA TITANOX

Si applica la garanzia Titanox di 12 mesi dalla data di fatturazione.

**È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.**



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>IT</b> Fabbricante <b>ENG</b> Manufacturer <b>FR</b> Fabricant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | <b>IT</b> Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso<br><b>ENG</b> Caution: read instructions (warnings) carefully<br><b>FR</b> Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>IT</b> Leggere le istruzioni per l'uso<br><b>ENG</b> Consult instructions for use<br><b>FR</b> Consulter les instructions d'utilisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <b>IT</b> Conservare al riparo dalla luce solare<br><b>ENG</b> Keep away from sunlight<br><b>FR</b> Á conserver à l'abri de la lumière du soleil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <b>IT</b> Conservare in luogo fresco ed asciutto<br><b>ENG</b> Keep in a cool, dry place<br><b>FR</b> Á conserver dans un endroit frais et sec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <b>IT</b> Codice prodotto <b>ENG</b> Product code <b>FR</b> Code produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <b>IT</b> Numero di lotto <b>ENG</b> Lot number <b>FR</b> Numéro de lot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <b>IT</b> Dispositivo medico <b>ENG</b> Medical Device <b>FR</b> Dispositif médical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | <b>IT</b> Il dispositivo è conforme ai requisiti del regolamento sui dispositivi medici (UE) 2017/745 ed è classificato come dispositivo medico di classe I<br><b>ENG</b> The product complies with the requirements of the regulation on medical devices (EU) 2017/745 and is classified as a Class I medical device<br><b>FR</b> Le produit est conforme aux exigences du règlement sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745 et est classé comme dispositif médical de classe I |

**REF** M600698/OL