







**01938 – SHOWER EXTENSION HOSE
PROLUNGA DOCCIA**

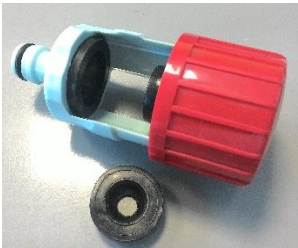

Costruttore	CHINESPORT S.P.A. , Via Croazia, 2-33100 Udine, Italia. Tel. +39 0432 621 621 – fax+39 0432 621 620 – sito internet: www.chinesport.it . L'azienda ha un sistema di qualità secondo la norma UNI EN ISO 13485:2012
Destinazione d'uso e descrizione dell'apparecchiatura	Tubo flessibile da 6 m completo di doccetta a pulsante e adattatore per rubinetto. Utilizzato per pulizia ed igiene di pazienti allettati.
Composizione	Plastiche
Immagazzinaggio	In caso di immagazzinamento si devono rispettare le seguenti condizioni ambientali: 1. umidità relativa 10% / 90 %; 2. temperatura -10°C / +50°C.
Limitazioni d'uso e avvertenze particolari	I sussidi non devono essere utilizzati: <ul style="list-style-type: none"> • Senza aver effettuato tutte le previste regolazioni e messe a punto dedicate. • Quando l'uso è controindicato o genera gravi disagi al paziente. • Con manomissioni e/o modifiche sul prodotto originale. • In configurazione impropria o quando ci sia il sospetto che possa arrecare danno al paziente.
Effetti collaterali	Non si riscontrano effetti collaterali. Utilizzare sempre l'apparecchiatura in maniera consona. È raccomandata la conoscenza del presente libretto di istruzioni.
Disimballaggio	Estrarre i sussidi dall'imballo senza utilizzare taglierino per evitare di danneggiarli e smaltire correttamente gli imballi. Eventuali danni dovuti al trasporto devono essere prontamente segnalati al trasportatore e al fornitore: i sussidi danneggiati non devono essere utilizzati.
Installazione ed utilizzo	<p>Inserire nell'adattatore del rubinetto la guarnizione della corretta dimensione (Fig. 1). Inserire l'adattatore a cavallo del rubinetto e stringerlo avvitando il cilindro rosso superiore (Fig. 2). Spingere l'attacco rapido per collegare il tubo all'adattatore (Fig. 3) e fare la stessa operazione per inserire la doccetta (Fig. 4 e 5). Per sganciare l'attacco rapido, tirare la porzione terminale verso il centro del tubo reggendo l'elemento connesso con l'altra mano (Fig. 6).</p>  <p style="text-align: center;">Fig. 7</p>  <p style="text-align: center;">Fig. 8</p>  <p style="text-align: center;">Fig. 9</p>  <p style="text-align: center;">Fig. 10</p>  <p style="text-align: center;">Fig. 11</p>  <p style="text-align: center;">Fig. 12</p>

01938 – SHOWER EXTENSION HOSE
PROLUNGA DOCCIA

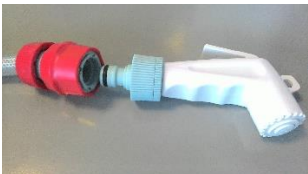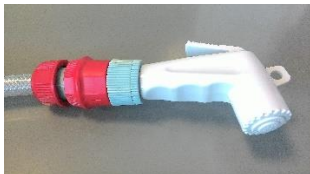

Manutenzione	<p>Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti da tecnici specializzati o persone con conoscenza del contenuto del presente libretto istruzioni.</p> <p>Verificare le condizioni di sicurezza dell'apparecchio dopo ogni situazione di "trattamento rude" (es.: caduta, urti violenti, versamento di liquidi, etc.) ed ogni qualvolta si abbiano dei dubbi sullo stato di sicurezza dell'apparecchio.</p> <p>Gli interventi di manutenzione ordinaria vanno eseguiti almeno una volta ogni sei mesi.</p> <p>Mantenere il dispositivo costantemente pulito e controllare lo stato dei componenti e delle guarnizioni.</p>
Lavaggio	<p>Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando con acqua. Asciugare evitando l'esposizione diretta alla luce del sole.</p> <p>Per le macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici, inchiostro, caffè, liquori, chewing-gum ecc.) si consiglia di seguire le seguenti istruzioni: disciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito (liquido incolore) in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente.</p>
Disinfezione	<p>Per la disinfezione delle superfici si consiglia l'utilizzo di prodotti disinfettanti quali AMUCHINA® 10% o equivalente con sodio ipoclorito allo 0,1.e neutro. Risciacquare bene.</p>
Ulteriori informazioni	<p>Visitare il sito www.chinesport.it</p>