

## BACINELLA SHAMPOO SHAMPOO BASIN

### Manuale d'uso - User manual

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

### USO PREVISTO

1. Per persone costrette a letto o immobili.

### CONTENUTO

1. Lavatesta con tubo di drenaggio collegato.
2. Sacca acqua con soffione e clip.
3. Tubo in plastica e cordicella per agevolare la manipolazione e per appendere la sacca acqua.
4. Kit di riparazione.



1. Lavatesta



2. Kit sacca acqua

3. Tubo  
in plastica  
e cordicella

### CARATTERISTICHE

1. Lavatesta di profondità 20 cm con doppia tubatura per una migliore resistenza e comodità.
2. È dotato di un tappo di scarico con un tubo collegato per l'evacuazione dell'acqua sporca durante o dopo l'uso.
3. Sacca acqua a parte, per un agevole trasporto dell'acqua, in caso di difficoltà ad accedere a riserve d'acqua. Il lavatesta è inoltre corredato di un soffione e da una clip regolabile per agevolare il controllo del flusso dell'acqua.

### ISTRUZIONI PER L'IMPOSTAZIONE

1. Gonfiare il lavatesta con la bocca o con una pompa (non in dotazione).  
**NOTA:** la valvola dell'aria è munita di una valvoletta unidirezionale all'interno che contribuisce ad evitare perdite di aria. Durante il gonfiaggio, schiacciare la valvola dell'aria sul suo collo permettendo l'apertura della valvoletta unidirezionale.
2. Collocare il lavatesta su una superficie piana e semi-rigida per un uso più agevole.
3. Collocare il tubo di scarico in un secchio per raccogliere l'acqua (non in dotazione).  
**NOTA:** il secchio deve essere collocato più in basso rispetto al lavatesta, facendo sì che l'acqua sporca fluisca verso il basso.
4. Aprire il tappo di scarico.



Tappo di scarico



Illustrazione di applicazione

5. Collocare il lavatesta sotto la zona del collo del paziente, regolando come necessario.

	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso		Codice prodotto		Leggere le istruzioni per l'uso
	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea		Numero di lotto		Data di fabbricazione
	Conservare al riparo dalla luce solare		Fabbricante		Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Dispositivo medico		

### CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

**REF** C00303 (28507)



Airflo (Xiamen) Medical Co., Ltd  
1F, 3F, 4F, No. 6, East Haijing Road,  
Haicang Xiamen, Fujian, China  
Made in China



Emergo Europe B.V.  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



Importato da / Imported by:

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

