

ITALIANO

## LINEA PREVENTIVA DECUBITO IN FIBRA CAVA SILICONATA

### AVVERTENZE

**In caso di incidente grave verificatosi in relazione all'utilizzo del dispositivo, si prega di segnalare l'accaduto al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito**

Prima di effettuare qualsiasi operazione controllare visivamente l'integrità del dispositivo. Qualora il prodotto presenti anomalie, contattare immediatamente il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto.

Erregi sas non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del dispositivo.

### DESCRIZIONE

Cuscini per la prevenzione del decubito in 100% cotone, con imbottitura in fibra cava siliconata racchiusa in una fodera in cotone con sistema di fissaggio a velcro. L'elevata resilienza e l'alta traspirabilità consentono un'efficace azione nella prevenzione dell'insorgenza delle lesioni da decubito.

### INDICAZIONI

Prevenzione del decubito per pazienti allettati allo scopo di diminuire i picchi di pressione, di ridurre le forze di taglio e frizione e favorire la circolazione di aria.

### PRECAUZIONI D'USO

Dispositivo medico indicato per la prevenzione del decubito, da usarsi a seguito di valutazione clinica effettuata da un medico specialista. Appoggiare il cuscino sulla seduta della carrozzina avendo cura che i fissaggi a velcro, dove presenti, risultino posizionati dalla parte dello schienale. Assicurare quindi il cuscino a una struttura rigida della carrozzina tramite i fissaggi a velcro. Si raccomanda di monitorare con regolarità la zona interessata, di effettuare una frequente mobilitazione del paziente e di porre particolare cura all'igiene. A tale scopo si consiglia di consultare i protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da decubito. Utilizzare il dispositivo sempre indossando un indumento a protezione della persona. Dispositivo non ignifugo.

### CONTROINDICAZIONI

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

### COMPOSIZIONE

Interno: Fibra cava siliconata.

Fodera: Cotone 100%.

### MODALITÀ DI LAVAGGIO



La Ditta produttrice non risponde di eventuali variazioni delle caratteristiche tecniche dell'ausilio in caso di mancata osservanza delle modalità di lavaggio.

### CONSERVAZIONE

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore, umidità.

### DISINFEZIONE

Utilizzare prodotti con presidio medico chirurgico.

### SMALTIMENTO

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

<b>REF</b>	Codice prodotto	<b>MD</b>	Dispositivo medico
<b>LOT</b>	Numero di lotto		Fabbricante
<b>CE</b>	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Leggere le istruzioni per l'uso
	Conservare al riparo dalla luce solare		Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Data di fabbricazione		Non prodotto con lattice di gomma naturale

NON rimuovere l'etichetta dal Dispositivo Medico, in quanto consente la rintracciabilità del prodotto fornito (Fabbricante, UDI, numero di lotto, codice prodotto).

### CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

---

**REF** 01/04 (GIMA 28550)  
05/04 (GIMA 28551)  
04/04 (GIMA 28552)

 **Erregi S.a.s.**  
Via Adua 40  
21040 Vedano Olona (Va)  
commerciale@erregiausilimedici.it  
www.erregiausilimedici.it  
MADE IN ITALY

