

## CUSCINO CON SCHIACCIAMENTO CENTRALE IN FIBRA CAVA SILICONATA - CODICE 28552

Dispositivo non invasivo di classe I (direttiva 93/42/CEE e D.Lgs. 46/1997 e s.m.i.)



### MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

**DESCRIZIONE:** Cuscino con schiacciamento centrale in fibra cava siliconata. La proprietà principale della fibra cava è la capacità di tornare alla forma originaria anche dopo forte sollecitazione e applicazione di pressione: ciò consente, nel tempo, la conservazione delle caratteristiche di morbidezza ed elasticità. Tali caratteristiche consentono l'equidistribuzione del peso corporeo evitando l'occlusione venosa che è la causa dell'insorgenza delle piaghe da decubito.

Lo schiacciamento centrale stabilizza la fibra e aumenta il comfort.

**COMPOSIZIONE:** • Esterno: tessuto di cotone 100%. • Interno: fibra cava di poliestere siliconata.

**INDICAZIONI:** Prevenzione delle piaghe da decubito.

**AVVERTIMENTI:** Nonostante la grande semplicità d'uso del dispositivo si raccomanda il suo utilizzo da parte di personale medico e paramedico adeguatamente formato.

**PRECAUZIONI:** Relativamente alla reazione al fuoco, il dispositivo non è ignifugo.

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ:** La ditta **GIMA S.p.A.** DICHIARA che il presente dispositivo non invasivo di classe I è conforme alla Direttiva Europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici (recepita dallo Stato italiano con D.Lgs. 46 del 24 Febbraio 1997 e s.m.i.).

**USO:** L'uso previsto del cuscino antidecubito è quello di essere posizionato su sedie a rotelle e altri supporti di seduta rigida per prevenire le piaghe da decubito. Si consiglia di fare accomodare e far sollevare il paziente sempre con la massima cautela e delicatezza.

**MANUTENZIONE:** Il dispositivo è lavabile con lavaggio delicato con saponi neutri a 30/40°C, è anche possibile effettuare un lavaggio a secco con percloroetilene, si sconsiglia invece il candeggiare. Si raccomanda di non stirare.

Relativamente all'invecchiamento dei dispositivi non si segnalano particolari fenomeni, se non la normale usura dovuta all'utilizzo protratto nel tempo. Un utilizzo corretto e lavaggi delicati possono determinare un tempo di vita maggiore del dispositivo.

La Ditta produttrice non risponde di eventuali variazioni delle caratteristiche tecniche dell'ausilio in caso di mancata osservanza delle modalità di lavaggio.



**DISINFEZIONE:** Utilizzare prodotti disinfettanti con presidio medico chirurgico.

**CONSERVAZIONE:** Conservare preferibilmente in posizione orizzontale, al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.

**SMALTIMENTO:** I dispositivi possono essere considerati come rifiuti non pericolosi e pertanto possono essere smaltiti in modo ordinario.

*La Ditta GIMA S.p.A. non assume alcuna responsabilità per danni a persone o a cose causati da un comportamento scorretto o da un uso improprio del dispositivo.*

*Eventuali suggerimenti riguardanti il prodotto possono essere resi noti alla nostra ditta, essi saranno sicuramente accolti se potranno portare un reale miglioramento.*



Prodotto da: **GIMA S.p.A.** - Via Marconi, 1 - Gessate (MI) - Italia - [www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)