



Borsa acqua calda bilamellata



Borsa acqua calda bilamellata

Istruzioni per l'uso

Per assicurare una lunga durata consigliamo di seguire le seguenti indicazioni. Non utilizzare acqua bollente e riempire la borsa solo al 1/3 della capacità. Prima di chiudere con il tappo fare fuoriuscire il vapore. Asciugare la borsa e tenere lontano da fonti di calore.

Indicazioni per un uso sicuro della borsa acqua calda

Riempiere con acqua a temperatura non superiore ai 45 gradi - Evitare di comprimere durante l'uso la borsa - La temperatura alla quale va conservata la borsa è tra i 10 e 27 gradi centigradi - Controllare sempre prima dell'utilizzo lo stato generale della gomma, avvertimento corretto del tappo e tenuta generale. Evitare di tenere la borsa a contatto diretto con la pelle, ma inserirla in un contenitore di stoffa. È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

MD

Dispositivo medico
Medical Device
Dispositif médical
Medizinprodukt
Isqornovoyeysko ppoibno
Producto sanitario
Dispositivo medico

Scadenza
Expiry
Date limite
Frist
Belele
Fecha tope
Prazo de entrega



28600-M-Rev.1.10.21

REF **28600**

LOT **000013**



8 023279 286007



Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China



05
PP



508489
Size 22x44,5 cm