



# GIMA

## **Borsa acqua calda bilamellata**

### **Istruzioni per l'uso**

Per assicurarne una lunga durata consigliamo di seguire le seguenti indicazioni. Non utilizzare acqua bollente e riempire la borsa solo ai  $\frac{3}{4}$  della capacità. Prima di chiudere con il tappo fare fuoriuscire il vapore. Asciugare la borsa e tenere lontano da fonti di calore. Vita utile 3 anni

### **Indicazioni per un uso sicuro della borsa acqua calda**

Riempire con acqua a temperatura non superiore ai 45 gradi - Evitare di comprimere durante l'uso la borsa - La temperatura alla quale va conservata la borsa è tra i 10 e 27 gradi centigradi - Controllare sempre prima dell'utilizzo lo stato generale della gomma, avvvitamento corretto del tappo e tenuta generale. Evitare di tenere la borsa a contatto diretto con la pelle, ma inserirla in un contenitore di stoffa. E' necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

**MD**

Dispositivo medico  
Medical Device  
Dispositif médical  
Medizinprodukt  
Ιατροτεχνολογικό προϊόν  
Producto sanitario  
Dispositivo médico

**REF 28601**    **LOT 000011**



Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
**www.gimaitaly.com**



Gima S.p.A - Via Marconi, 1  
20060 Gessate (MI) - Italy  
Made in China



S09293  
Size 22x44,5 cm