
BORSA DEL GHIACCIO

Manuale d'uso

ISTRUZIONI

- 1) Non usare acqua > 50°C, usare acqua fredda mista a ghiaccio.
- 2) Riempire fino ad un massimo di 2/3 della capacità totale.
- 3) Espellere l'aria dalla borsa prima di chiudere il tappo.
- 4) Avvitare il tappo sufficientemente per evitare fuoriuscite di acqua, non stringere troppo il tappo.
- 5) Controllare eventuali perdite tenendo la borsa del ghiaccio in posizione capovolta.

