

CE

MANUALE D'USO

# LS

## LAMPADA DA VISITA

LS LED | LS INFRA | LS INFRA TIMER

**MIMSAL**F3P34  
Rev. 01  
20.06.2022

Gentile utente, le consigliamo di leggere attentamente questo manuale prima di procedere all'utilizzo del prodotto.

Il produttore dichiara che questo prodotto è conforme alle direttive:

- 2014/35/EU (LVD) Low Voltage Directive Class II
- 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility (E.M.C)

Il contenuto del presente manuale può essere modificato, parzialmente o totalmente, senza preavviso da MIMSAL, al fine di apportare modifiche e miglioramenti.

MIMSAL ha un Servizio Clienti a sua disposizione.

Il suo team di:

**MIMSAL**

MIMSAL TRADE S.L.

C/ Mollet, 17

Polígono Industrial Palou Nord

08401 – Granollers (Barcelona) SPAIN

Tel. +34 930 139 860

[mimsal@mimsal.com](mailto:mimsal@mimsal.com)

[www.mimsal.com](http://www.mimsal.com)

# TABELLA DEI CONTENUTI

1. Istruzioni di sicurezza	5
2. Breve descrizione	6
3. Installazione e supporti	7
3.1 Trolley Stand	8
3.2 AH Table Clamp	9
3.3 Wall B Support	10
3.4 Rail Plus Bracket	11
3.5 Extension arm	12
4. Funzionamento dell'apparecchio di illuminazione	13
4.1 Controllare prima di ogni utilizzo	13
4.2 Funzionamento della testata dell'apparecchio di illuminazione	13
4.3 Dettaglio delle misure dei bracci articolati	13
5. Funzioni di sicurezza	14
5.1 Abbassamento di tensione	14
5.2 Interruzione di corrente	14
5.3 Difetto elettrico	14
6. Pulizia/Disinfezione	14
6.1 Istruzioni generali di sicurezza	14
6.2 Pulizia	14
6.3 Disinfezione	15
7. Manutenzione	15
7.1 Bracci di supporto dell'apparecchio di illuminazione	15
7.2 Testata dell'apparecchio di illuminazione	16
7.3 Riparazioni	16
7.4 Impostazioni	16
7.5 Risoluzione dei problemi	16
8. Riciclaggio	16
9. Dati tecnici	17
10. Missioni elettromagnetiche	18
11. Garanzia	19
12. Proprietà Industriale e Intellettuale	20
13. Riservatezza	20
14. Dichiarazione di Conformità	21
15. Certificato ISO 9001	23

## SIMBOLOGIA

	<b>ISTRUZIONI</b>
	<b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ</b>
	<b>CODICE DEL PRODOTTO</b>
	<b>NUMERO DELLA PARTITA</b>
	<b>DATA DI PRODUZIONE</b>
	<b>NOME E INDIRIZZO DEL PRODUTTORE</b>
	<b>RICICLAGGIO DEI RIFIUTI ELETTRONICI</b>
	<b>CLASSE DI ISOLAMENTO ELETTRICO</b> Classe II
	<b>DISTANZA MINIMA DALL'OGGETTO ILLUMINATO</b>
	<b>TEMPERATURA AMBIENTE</b> Mostra la temperatura ambiente consentita da -25°C a 70°C per il trasporto e lo stoccaggio.
	<b>UMIDITÀ</b> Mostra i valori di umidità consentiti dal 10% al 75% per il trasporto e lo stoccaggio.

## REGOLE DI SICUREZZA

	<b>AVVERTENZA</b> La mancata osservanza di queste indicazioni può causare lesioni gravi o addirittura mortali.
	<b>PRECAUZIONE</b> La mancata osservanza di queste indicazioni può causare danni o lesioni lievi o moderate.
	<b>NOTA   INFORMAZIONE</b> Fornisce consigli d'uso e informazioni utili.
	<b>CADUTA DELL'APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE</b> Avverte di un improvviso cedimento del sistema del braccio di supporto dovuto al superamento del carico utile massimo.
	<b>PERICOLO DI RIBALTAMENTO</b> I supporti sono progettati per sostenere solo il peso del corpo illuminante. Se viene aggiunto del peso supplementare l'unità può ribaltarsi, con conseguente rischio di lesioni di diverso tipo.

## RIFERIMENTO E MODELLO

REF	MODELLO
LS010316LED	LS LED
E020412	LS INFRA 150W
E02041250	LS INFRA 250W
E020412T	LS INFRA TIMER 150W
E02041250T	LS INFRA TIMER 250W

## 1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA



Controllare le istruzioni d'uso durante la manipolazione dell'apparecchiatura.

### AMBIENTE

1. Questo dispositivo non è progettato per funzionare in aree potenzialmente esplosive!
2. Non utilizzare in aree arricchite di ossigeno!
3. Non utilizzare gas anestetici infiammabili!
4. Non posizionarlo vicino a forti campi magnetici! Ad es. Sistemi di risonanza magnetica.
5. Non coprire la parte superiore del corpo illuminante della lampada! Rischio di surriscaldamento!

### SICUREZZA ELETTRONICA

1. Utilizzare solo l'alimentatore integrato!
2. L'apparecchio di illuminazione non include un alimentatore con sistema fail-safe o una batteria di emergenza! In caso di interruzione di corrente, l'apparecchio di illuminazione si spegnerà completamente!
3. È possibile che si verifichino brevi interruzioni dell'illuminazione in caso di interferenza esterna di EMC!
4. Per spegnere del tutto la lampada è necessario staccare la spina dalla presa o disattivare la presa attiva con un interruttore separato.

### MANUTENZIONE E RESPONSABILITÀ

1. I lavori di installazione o manutenzione elettrica devono essere eseguiti da personale qualificato!
2. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso improprio!
3. Le responsabilità per l'installazione del prodotto è dell'utente finale e MIMSAL non si assume responsabilità.
4. Il produttore è responsabile della sicurezza della lampada solo se le riparazioni e le modifiche vengono eseguite dal produttore stesso o da una ditta che garantisca il rispetto delle norme di sicurezza, utilizzando ricambi originali!

Prima di ogni utilizzo,  
assicurarsi che la lampada sia in perfette condizioni tecniche.

## 2. BREVE DESCRIZIONE

### GRUPPO DESTINATARIO

Queste istruzioni per l'uso sono destinate agli utenti che utilizzano, puliscono e disinfettano gli apparecchi di illuminazione MIMSAL.

### USO PREVISTO

Questo apparecchio di illuminazione è concepito per eseguire lavori molto meticolosi e di grande precisione con una buona illuminazione.

### INDICAZIONE

L'illuminazione viene utilizzata solo per una visibilità ottimale della superficie. L'illuminazione è esterna al corpo e l'apparecchio non entra in contatto con gli utenti.

### CONTROINDICAZIONE

I prodotti non devono essere utilizzati vicino a forti campi magnetici.

È vietato l'uso dell'apparecchio in atmosfere arricchite di ossigeno e in prossimità di gas anestetici infiammabili.

### RISCHI RESIDUI – RISCHIO IN CASO DI DANNI AL DISPOSITIVO

Proteggere l'apparecchio di illuminazione dagli urti. La collisione con altri oggetti può causare guasti all'apparecchio e/o danni al coperchio e al sistema del braccio di supporto, provocando la caduta di parti.

L'apparecchio di illuminazione non include un alimentatore a prova di interruzioni di corrente. Un'interruzione di corrente provocherà lo spegnimento dell'apparecchio.

Non puntare la sorgente luminosa direttamente verso gli occhi dell'utente.

La mancata osservanza di tali precauzioni potrebbe causare abbagliamenti e danni alla retina.

Non posizionare e/o appendere mai nulla all'apparecchio di illuminazione. Se questa precauzione non viene presa, il posizionamento sarà inaffidabile ed esiste il pericolo che tali oggetti cadano nell'area di lavoro.

Non appendersi mai all'apparecchio di illuminazione con il peso corporeo di una persona. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe danneggiare la struttura dell'apparecchiatura.

### 3. INSTALLAZIONE E SUPPORTI

Prima di iniziare l'installazione dell'apparecchio, è necessario verificare che il contenuto sia in buone condizioni e non abbia subito danni o deterioramenti durante il trasporto.

I reclami saranno presi in considerazione solo se il venditore o il vettore sono stati informati immediatamente. Tutti i reclami devono essere presentati per iscritto.

La merce viaggia sempre sotto la responsabilità e a rischio dell'acquirente.

Conservare l'imballo originale nel caso in cui il prodotto debba essere inviato di nuovo.

#### TIPI DI SUPPORTO

L'apparecchio di illuminazione può essere fornito con diversi tipi di supporto, selezionando quello più adatto al suo utilizzo.

Tutti gli accessori devono essere montati da un installatore autorizzato.

Non è consentito apportare modifiche al prodotto, se non quelle indicate nel presente manuale d'uso.

MODELLO	SUPPORTO
TROLLEY STAND	Base mobile con 5 ruote
AH TABLE CLAMP	Morsetto da tavolo
WALL B SUPPORT	Fissaggio a parete B rinforzato
RAIL PLUS BRACKET	Supporto di adattamento al binario U.C.I
EXTENSION ARM	Braccio di estensione + Fissaggio a parete B rinforzato

## 3.1 TROLLEY STAND

REF	MODELLO	DESCRIZIONE
09655	TROLLEY STAND 4 Kg	Base mobile di 4 Kg
09651	TROLLEY STAND 8,8 Kg	Base mobile di 8,8 Kg



Installare l'accessorio senza montare l'apparecchio di illuminazione.  
È responsabilità del cliente assicurarsi che la superficie di fissaggio sia sicura e sufficientemente robusta.



Controllare periodicamente che l'unità rimanga stabile per evitare un'eventuale caduta dell'apparecchio di illuminazione.




La base mobile è progettata per sostenere solo il peso dell'apparato di illuminazione. Se viene aggiunto del peso supplementare l'unità potrebbe ribaltarsi, con conseguente rischio di danni all'apparato di illuminazione e/o all'utente.

### 1. Installazione e assemblaggio

- Inserire completamente la parte (2) all'interno della base (3) esercitando pressione.
- Inserire i bracci con ruote (4) attraverso la fessura nella base (3) per incastrarli completamente, aiutandosi eventualmente con un martello di nylon.
- Incastrare la parte (5) nelle scanalature interne dei bracci (4).
- Far passare la vite (7) all'interno della rondella (6), ed inserire la vite attraverso il foro nella parte 5 attraversandolo interamente.
- Avvitare il palo (1) direttamente con la vite (7) evitando di stringerlo (1) alla parte (2) per evitare di danneggiare la vernice.
- Tenendo saldamente il palo (1) stringere la vite (7) con una chiave inglese finché il pezzo risulti perfettamente assemblato.
- Sistema di fissaggio di apparecchi di illuminazione. Allen numero 2.

### 2. Caratteristiche tecniche

- Lunghezza di palo: 75 cm
- Lunghezza totale: 92 cm
- Diametro di base: 60 cm
- Diametro di ruota: 50 mm
- Numero di ruote: 5
- Numero di freni: 3

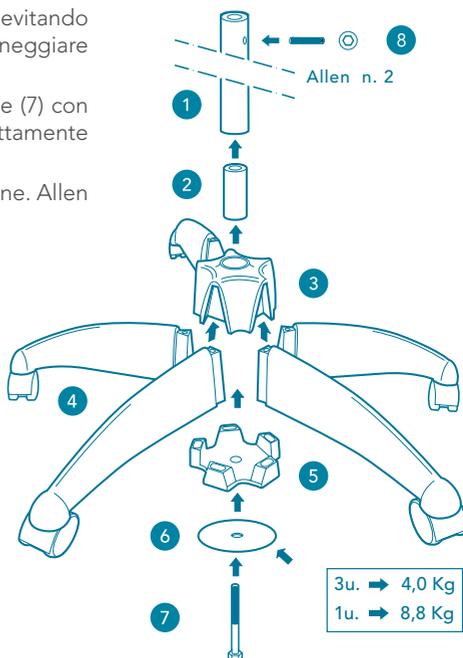

## 3.2 AH TABLE CLAMP

REF	MODELLO	DESCRIZIONE
B010190	AH TABLE CLAMP	Morsetto da tavolo



Installare l'accessorio senza montare l'apparecchio di illuminazione.  
È responsabilità del cliente assicurarsi che la superficie di fissaggio sia sicura e sufficientemente robusta.




Controllare periodicamente che l'unità rimanga stabile per evitare un'eventuale caduta dell'apparecchio di illuminazione.



Il supporto è progettato per sostenere solo il peso della lampada. L'aggiunta di peso supplementare può danneggiare l'apparecchio di illuminazione e/o l'utente.

### Installazione e assemblaggio

- Allentare la vite di regolazione con la manovella (1).
- Appoggiare la base del morsetto sulla superficie del tavolo (2).
- Regolare il corpo del morsetto (3) fino a farlo entrare in contatto con il bordo del tavolo.
- Girare la manovella (4) fino a quando il morsetto e il tavolo non siano saldamente fissati.
- Una volta fissato e assicurato il morsetto, posizionare la lampada attraverso il foro superiore (5).

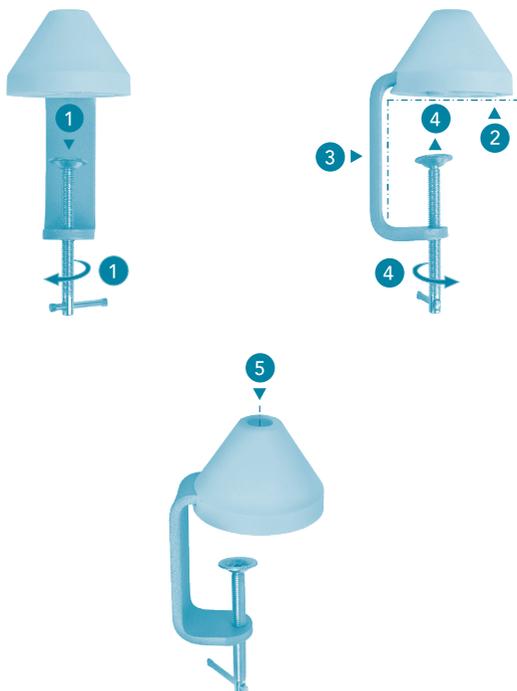

### 3.3 WALL B SUPPORT

REF	MODELLO	DESCRIZIONE
B0101800	WALL B SUPPORT	Fissaggio a parete B rinforzato. Separazione asse-parete 7 cm



Installare l'accessorio senza montare l'apparecchio di illuminazione.  
È responsabilità del cliente assicurarsi che la superficie di fissaggio sia sicura e sufficientemente robusta.




Controllare periodicamente che l'unità rimanga stabile per evitare un'eventuale caduta dell'apparecchio di illuminazione.



Il supporto è progettato per sostenere solo il peso della lampada. L'aggiunta di peso supplementare può danneggiare l'apparecchio di illuminazione e/o l'utente.

#### Installazione e assemblaggio

- Controllare che la parete sia sufficientemente resistente e piatta.
- Usare il supporto per segnare i fori sulla parete con una matita (1).
- Praticare i fori e inserire i tasselli nella parete (1).
- Posizionare il fissaggio a parete allineandolo con la posizione dei fori (2).
- Stringere le viti fino a quando l'assieme, il distanziatore di guida e la vite non risultino saldamente fissati (2).
- Una volta montato e assicurato il fissaggio, inserire la lampada attraverso il foro superiore (3).

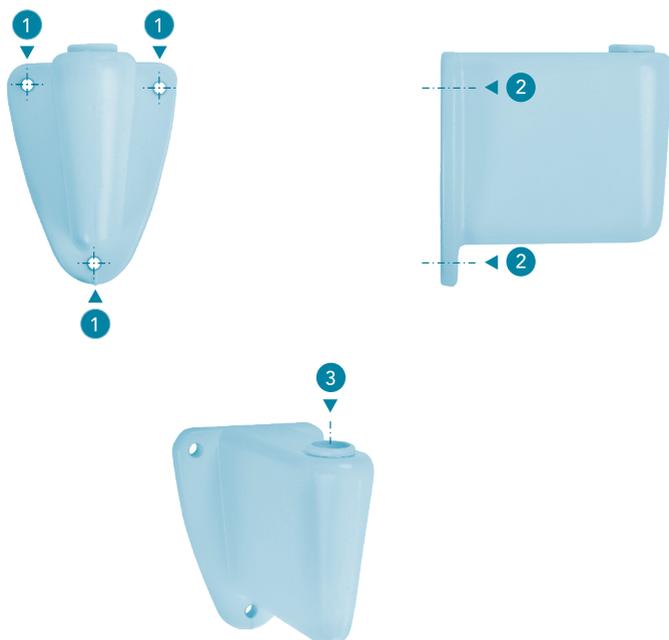

### 3.4 RAIL PLUS BRACKET

REF	MODELLO	DESCRIZIONE
82026	RAIL PLUS BRACKET	Supporto di adattamento al binario U.C.I



Installare l'accessorio senza montare l'apparecchio di illuminazione. È responsabilità del cliente assicurarsi che la superficie di fissaggio sia sicura e sufficientemente robusta.




Controllare periodicamente che l'unità rimanga stabile per evitare un'eventuale caduta dell'apparecchio di illuminazione.



Il supporto è progettato per sostenere solo il peso della lampada. L'aggiunta di peso supplementare può danneggiare l'apparecchio di illuminazione e/o l'utente.

#### Installazione e assemblaggio

- Allentare la vite di regolazione attraverso il galletto (1).
- Montare la parte superiore del supporto sul binario (2).
- Il corpo interno del supporto deve entrare in contatto con il binario (2).
- Stringere il galletto fino a quando il supporto e il binario non siano saldamente fissati (3).
- Una volta montato e assicurato il fissaggio, inserire la lampada attraverso il foro superiore (4).

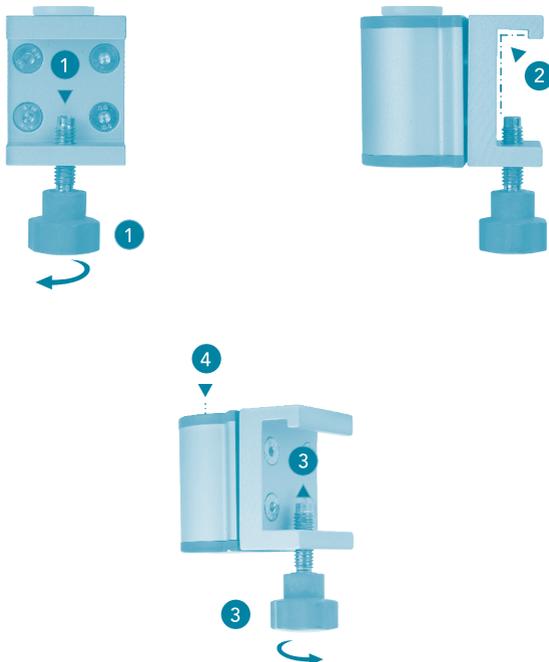

### 3.5 EXTENSION ARM

REF	MODELLO	DESCRIZIONE
B010150	EXTENSION ARM	Il braccio di estensione include il Wall B Support. Fornisce 40 cm aggiuntivi con rotazione orizzontale su entrambi gli assi.



Installare l'accessorio senza montare l'apparecchio di illuminazione.

È responsabilità del cliente assicurarsi che la superficie di fissaggio sia sicura e sufficientemente robusta.




Controllare periodicamente che l'unità rimanga stabile per evitare un'eventuale caduta dell'apparecchio di illuminazione.



Il supporto è progettato per sostenere solo il peso della lampada. L'aggiunta di peso supplementare può danneggiare l'apparecchio di illuminazione e/o l'utente.

#### Installazione e assemblaggio

- Controllare che la parete sia sufficientemente resistente e piatta.
- Usare il supporto per segnare i fori sulla parete con una matita (1).
- Praticare i fori e inserire i tasselli nella parete (1).
- Posizionare il fissaggio a parete allineandolo con la posizione dei fori (2).
- Stringere le viti fino a quando l'assieme, il distanziatore di guida e la vite non risultino saldamente fissati (2).
- Una volta fissato e assicurato il supporto a parete, inserire l'estremità del braccio nel foro superiore del fissaggio (3).
- Inserire l'asse della lampada nel foro all'altra estremità del braccio di estensione (4).
- Stringere la vite laterale del braccio di estensione per fissare la lampada (5).

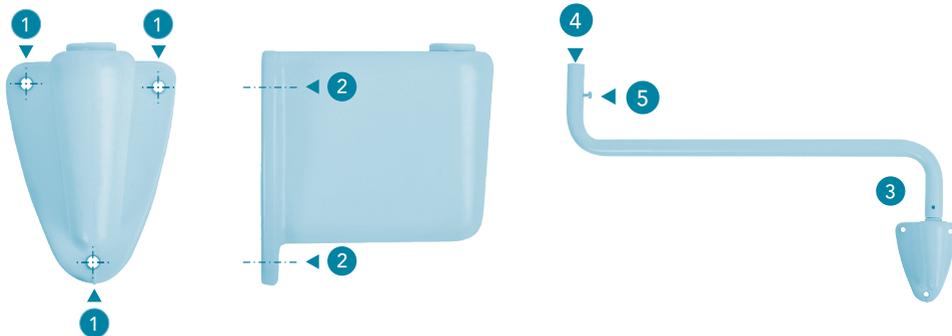

## 4. FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE

### 4.1 CONTROLLARE PRIMA DI OGNI UTILIZZO

1. Verificare la presenza di deformazioni visibili sull'unità. Se rilevate, contattare immediatamente il Servizio Clienti.
2. Assicurarsi che la lampada sia nello stato igienico richiesto per il suo utilizzo.
3. Prima di ogni avviamento, controllare il corretto funzionamento dell'intera unità. L'unità deve muoversi in ogni grado di movimento mentre si verifica la funzione principale e il sistema di controllo.



Non utilizzare l'unità in caso di dubbi sulla sua sicurezza elettrica o stabilità statica e dinamica.

### 4.2 FUNZIONAMENTO DELLA TESTATA DELL'APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE

Apparecchio di illuminazione d'uso semplice ed ergonomico che consente una manipolazione intuitiva.


Per **LS LED, LS INFRA**:

- L'interruttore di alimentazione è sul cavo di alimentazione.
- Selezionare la posizione dell'interruttore. I (On) | 0 (Off).
- Spostare la posizione del braccio cercando una distanza e un'illuminazione ottime.


Per **LS INFRA TIMER**:

- Il timer si trova sul cavo di alimentazione proprio all'inizio del braccio articolato.
- Per accendere la lampada, selezionare il tempo desiderato spostando il selettore in senso orario su una posizione superiore a 0 e fino a 15 min. 0 (Off).
- Per abbassare il tempo selezionato, muovere in senso antiorario. Evitare di passare da 15 a 0 in senso orario.
- Quando è trascorso il tempo e la tacca ha raggiunto lo 0, la lampada si spegne.

### 4.3 DETTAGLIO DELLE MISURE DEI BRACCI ARTICOLATI

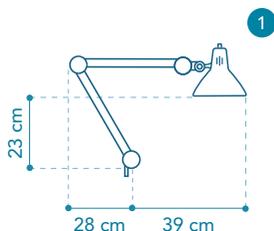

1. Lunghezza minima
2. Altezza massima
3. Lunghezza massima
4. Altezza minima

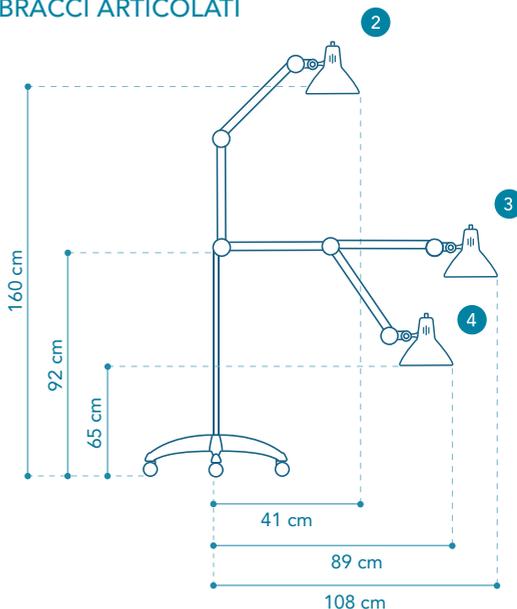

## 5. FUNZIONI DI SICUREZZA

### 5.1 ABBASSAMENTO DI TENSIONE



In caso di caduta della tensione di rete, la luce si spegne automaticamente.

### 5.2 INTERRUZIONE DI CORRENTE



In caso di interruzione totale di corrente, la luce si spegnerà. Non appena viene ripristinata la tensione di rete, può essere accesa di nuovo e riprende gli ultimi parametri impostati.

### 5.3 DIFETTO ELETTRICO



**NOTA:** Per questo tipo di errore contattare il servizio tecnico.

## 6. PULIZIA / DISINFEZIONE

### 6.1 ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

1. Scollegare il dispositivo dalla rete prima della disinfezione.
2. Non utilizzare in nessun caso un detergente e/o disinfettante in forma di aerosol.
3. Non spruzzare liquidi nei tappi o nelle fessure dell'unità e non consentire l'ingresso di liquidi.
4. Applicare il detergente inumidendo un panno, mai direttamente sull'apparecchiatura.



#### **AVVERTENZA: SCARICA ELETTRICA**

Gli apparecchi di illuminazione possono trasmettere elettricità e devono essere maneggiati con cura durante la pulizia e la disinfezione.

### 6.2 PULIZIA

#### SICUREZZA

Controllare le istruzioni generali di sicurezza.

#### PULIZIA CONSIGLIATA

1. Usare una soluzione di sapone neutro come detergente.
2. Pulire accuratamente le superfici con un panno leggermente umido, aggiungendo, se necessario, una piccola quantità di soluzione di sapone neutro.
3. Infine, asciugare bene la superficie esterna con un panno morbido e pulito (antistatico se necessario).



#### **AVVERTENZA: RISCHIO DI INFEZIONE E CONTAMINAZIONE DEI UTENTE**

I solventi possono corrodere la plastica. Gli acidi forti, gli alcali e gli agenti contenenti più del 60% di alcol possono indebolire la plastica. Le parti danneggiate possono cadere in ferite aperte.

## 6.3 DISINFEZIONE

### SICUREZZA

Controllare le istruzioni generali di sicurezza.

### PROCEDURA DI DISINFEZIONE

La procedura di disinfezione va eseguita con un panno. Le linee guida igieniche e le relative misure di sicurezza per le procedure di disinfezione da utilizzare devono essere definite dall'operatore.

Si consiglia l'uso del disinfettante MELISEPTOL, del produttore Braun Melsungen e/o "neoform MED rapid" del produttore Dr. Weigert. Rispettare le misure di protezione. Osservare le istruzioni del produttore e seguire le linee guida igieniche.



Contattare il proprio specialista in igiene per concordare il disinfettante e le procedure adatti alle proprie esigenze interne! Eseguire la disinfezione secondo il piano di disinfezione interna!



#### AVVERTENZA: DANNOSO PER LA SALUTE

I disinfettanti possono contenere sostanze nocive che possono causare lesioni alla pelle e agli occhi o danni agli organi respiratori se inalati.

## 7. MANUTENZIONE

I dispositivi devono essere sottoposti a cicli regolari di manutenzione e revisione. Ciò è essenziale per il rispetto delle misure di sicurezza.



**NOTA:** Scollegare sempre il dispositivo dall'alimentazione prima di eseguire qualsiasi lavoro di manutenzione o ispezione, per evitare riaccensioni accidentali dell'apparecchio.

### 7.1 BRACCI DI SUPPORTO DELL'APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE

Tutti i supporti devono essere controllati dall'operatore per i seguenti punti:

- Periodicità di 6 mesi:
  1. Deformazioni del sistema di supporto.
  2. Crepe delle parti in plastica.
  3. Danni alla vernice.
- Frequenza annuale:
  1. Controllo esteso del sistema di supporto, ad es. forza di bloccaggio del braccio a molla, controllo del bloccaggio del supporto.
  2. Prova di funzionalità estesa, come la facilità di movimento delle articolazioni.
  3. Prove di sicurezza elettrica.



#### AVVERTENZA: SCARICA ELETTRICA

Scollegare l'unità dall'alimentazione durante l'intera verifica.

## 7.2 TESTATA DELL'APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE

Devono essere eseguite le seguenti ispezioni/manutenzioni:

1. Verificare eventuali anomalie, crepe, deformazioni delle parti in plastica e delle diverse guarnizioni.
2. Realizzare prove di sicurezza elettrica.
3. Prova di funzionalità estesa.
4. Danni alla vernice.

## 7.3 RIPARAZIONI

È necessario rispettare le seguenti indicazioni:

- Il prodotto può essere aperto e riparato solo dal produttore. Contattare il Servizio Clienti se necessario.
  - È severamente vietato apportare modifiche al dispositivo.
- \* (Vedere la sezione Garanzia).

## 7.4 IMPOSTAZIONI

Il prodotto viene venduto completamente calibrato e non ha bisogno di alcuna regolazione aggiuntiva.

Se il prodotto diventa instabile nel tempo e non riesce a mantenere la posizione, contattare il Servizio Clienti.

## 7.5 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

È necessario contattare il Servizio Clienti nei seguenti casi:

- Il dispositivo non funziona.
- Il prodotto non mantiene la sua posizione
- La luce lampeggia.
- Il raggio di luce non è a fuoco.

## 8. RICICLAGGIO

Al termine della vita utile dell'unità, il dispositivo deve essere ritirato dal servizio, adeguatamente pulito e disinfettato per poter essere riciclato. Pertanto, per un corretto smaltimento, contattare un'azienda di riciclaggio autorizzata.



**NOTA:** Non smaltire il prodotto con i normali rifiuti domestici.



Al fine di evitare la contaminazione dell'ambiente, realizzare tutte le misure di disinfezione e/o sterilizzazione prima di smaltire il dispositivo.

## 9. DATI TECNICI

DATI FOTOMETRICI ED ELETTRICI	LS LED	LS INFRA	LS INFRA TIMER
Fonte di luce	LED 7,5W	IR E-27 150W / 250W	
Portalamпада	E-27 Ceramico		
Timer	NO		SI / 0 – 15 min
Classe di protezione	Classe II		
Voltaggio	220/240 V		
Frequenza	50/60 Hz		
Tipi di spine disponibili	F, G, I		

### CONDIZIONI AMBIENTALI PER IL FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	10 °C a 40 °C
Umidità relativa (senza condensa)	30% a 75%
Pressione atmosferica	700hPa a 1060hPa

### CONDIZIONI AMBIENTALI PER LO STOCCAGGIO E IL TRASPORTO

Temperatura ambiente	-25 °C a 70 °C
Umidità relativa (senza condensa)	10% a 75%
Pressione atmosferica	500hPa a 1060hPa

CARATTERISTICHE FISICHE	LS	LS INFRA	LS INFRA TIMER
Dimensioni scatola	280 x 270 x 500 mm		
Peso lordo	2,74kg	2,80kg	3,02kg
Peso netto apparecchio di illuminazione	1,80kg	1,88kg	2,08kg
Lunghezza braccio articolato	900mm (450 + 450)		
Dimensioni corpo illuminante	Ø210 mm x Altezza 190 mm		
Griglia di protezione in metallo	N/A	SI	
Colore insieme	Bianco		
Rotazione corpo illuminante	200°		

\* Tutti questi apparecchi di illuminazione includono l'accessorio di montaggio AH TABLE CLAMP di serie.

\* Il peso lordo dell'apparecchio di illuminazione comprende il peso netto dell'accessorio AH TABLE CLAMP.

REF	MODELLO	PESO LORDO	PESO NETTO	DIMENSIONES SCATOLA
B0101800	WALL B SUPPORT	0,25 KG	0,20 KG	91 x 221 x 122 mm
B010190	AH TABLE CLAMP	0,37 KG	0,29 KG	91 x 221 x 122 mm
82026	RAIL PLUS BRACKET	0,24 KG	0,19 KG	115 x 175 x 75 mm
09651	TROLLEY STAND 8,8 kg	9,18 KG	8,56 KG	160 x 160 x 780 mm
09655	TROLLEY STAND 4 kg	4,71 KG	4,10 KG	160 x 160 x 780 mm
B010150	EXTENSION ARM	0,74 KG	0,56 KG	160 x 520 x 90 mm

## 10. MISSIONI ELETTROMAGNETICHE

### LINEE GUIDA E DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE – EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE

I nostri dispositivi sono destinati all'uso in un AMBIENTE ELETTROMAGNETICO come specificato di seguito. L'utente deve assicurarsi che le unità possano funzionare in tale ambiente.

PROVA DELLE EMISSIONI STANDARD DI BASE EMC	CONFORMITÀ	AMBIENTE ELETTROMAGNETICO
Emissioni di RF condotte CISPR11	Gruppo 1	Il dispositivo utilizza energia di RF solo per il suo funzionamento interno. Pertanto, le sue emissioni di RF sono molto basse e non possono causare alcuna interferenza nelle apparecchiature elettroniche vicine.
Emissioni di RF irradiate CISPR11	Classe B	Il dispositivo è idoneo all'uso in tutte le strutture direttamente collegate alla rete di alimentazione pubblica a bassa tensione, ad eccezione degli ambienti domestici.
Distorsione armonica IEC (EN) 61000-3-2	Classe A	
Fluttuazioni di tensione e sfarfallio IEC (EN) 61000-3-3		

## 11. GARANZIA

L'Acquirente è tenuto a denunciare i danni visibili dei Prodotti entro un periodo massimo di quarantotto (48) ore dalla loro consegna. Trascorso tale periodo, MIMSAL non sarà responsabile per eventuali danni apparenti che non siano stati denunciati dall'Acquirente.

MIMSAL offre una garanzia sui difetti dei Prodotti per un periodo di cinque (5) anni dalla loro consegna.

Si considera che i Prodotti abbiano un difetto quando, senza aver subito alcun danno dopo la consegna, non siano idonei all'uso, oppure presentino una qualità o prestazioni inferiori a quelle indicate nelle loro specifiche tecniche. L'Acquirente dovrà dimostrare che il Prodotto non è conforme.

Per esercitare il diritto di garanzia, l'Acquirente dovrà informare MIMSAL per iscritto, inviando un'email all'indirizzo [mimsal@mimsal.com](mailto:mimsal@mimsal.com), indicando il difetto, il Prodotto, il numero di Lotto, il numero di RIF dell'ordine tramite il quale è stato acquistato e una fotografia del Prodotto. Tale email dovrà essere inviata entro un termine massimo di dieci (10) giorni dal momento dell'apparizione del difetto del Prodotto.

Dopo aver ricevuto questa email, MIMSAL proverà a vedere se è possibile risolvere l'incidente da remoto, nel qual caso risponderà all'Acquirente con le istruzioni su come procedere o, al contrario, se è necessario che il Prodotto sia inviato a MIMSAL per poterlo esaminare e, se del caso, ripararlo o sostituirlo. La spedizione dei Prodotti (compreso smontaggio, trasporto, spese, ecc.) sarà a carico dell'Acquirente.

La garanzia consisterà nella riparazione o sostituzione dei Prodotti, dei loro elementi e/o installazione difettosi, o nel rimborso dell'importo del prezzo a discrezione di MIMSAL.

L'Acquirente perderà la garanzia concessa da MIMSAL nei seguenti casi:

- Quando i Prodotti non sono stati utilizzati, immagazzinati, conservati, installati, trattati, ecc. secondo le istruzioni impartite da MIMSAL.
- Quando i Prodotti sono stati manipolati, alterati o modificati da terzi.
- Quando l'origine dei difetti non è dovuta a problemi legati alla fabbricazione o a difetti di qualità dei componenti.
- Danni e/o difetti subiti a causa dell'usura dovuta al normale utilizzo dei Prodotti.

I prodotti e/o i materiali difettosi sostituiti da altri rimarranno di proprietà di MIMSAL. La garanzia di cui alla presente clausola è esclusiva e sostituisce tutte le altre garanzie relative ai Prodotti.

## 12. PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

L'Acquirente riconosce e accetta che tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi ai Prodotti, nonché i disegni, i testi, le etichette, le immagini, la grafica, i marchi, la documentazione tecnica, i manuali, ecc. sono di proprietà esclusiva di MIMSAL. In ogni caso, tali diritti sono tutelati dalle norme che regolano la Proprietà Intellettuale e Industriale, pertanto è vietata la loro riproduzione, modifica, distribuzione e/o manipolazione.

Allo stesso modo, l'Acquirente collaborerà con MIMSAL al mantenimento dei suddetti diritti di proprietà intellettuale e industriale, notificando immediatamente a MIMSAL qualsiasi atto o circostanza che possa violarli, e rispettandoli a sua volta.

L'Acquirente si impegna ad astenersi dal registrare a proprio nome o in nome di terzi, marchi o denominazioni commerciali identici o simili a quelli utilizzati da MIMSAL o che possano indurre i clienti a confusione circa l'identità o il carattere di MIMSAL o dei Prodotti.

È proibito l'uso dei Prodotti o di qualsiasi elemento di Proprietà Industriale o Intellettuale relativa ai Prodotti di proprietà di MIMSAL che possa costituire una violazione dei diritti tutelati dalla legge e in particolare dalla normativa in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale.

MIMSAL si riserva ogni azione in tutela dei propri interessi e diritti.

## 13. RISERVATEZZA

L'Acquirente riconosce e accetta che tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi ai Prodotti, nonché i disegni, i testi, le etichette, le immagini, la grafica, i marchi, la documentazione tecnica, i manuali, ecc. sono di proprietà esclusiva di MIMSAL. In ogni caso, tali diritti sono tutelati dalle norme che regolano la Proprietà Intellettuale e Industriale, pertanto è vietata la loro riproduzione, modifica, distribuzione e/o manipolazione.

## 14. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ


**MIMSAL**

n° 2104

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DECLARATION OF CONFORMITY

FABBRICANTE PRODOTTO  
PRODUCT MANUFACTURER

MIMSAL TRADE S.L.

Indirizzo  
Address

C. Mollet 17, Polígono Industrial Palou Nord  
08401 Granollers (Barcelona)  
Spain

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE IL PRODOTTO  
DECLARE UNDER THEIR RESPONSIBILITY THAT THE PRODUCT

Nome del prodotto  
Product name

**LS**

Referenza - Modello  
Reference - Model

LS010316LED - LS LED

Direttive  
Directives

2014/35/EU (LVD) Low Voltage Directive Class II  
2014/30/EU Electromagnetic Compatibility (E. M. C)

Prove e misurazioni - Norme  
Test and measurements - Standards

UNE-EN 60598-1:2015+A1:2018  
Electric Safety. Luminary

UNE-EN 60100-3-2:2019  
Harmonic current emissions AC. Mains. ≤16A

UNE-EN 60100-3-3:2013+A1:2020  
Voltage Fluctuations and Flicker AC. Mains.≤16A

Data e luogo  
Location and date

Granollers (Barcelona) Spagna, 11 FEBBRAIO 2022  
Granollers (Barcelona) Spain, February 11th, 2022

Nome e carica  
Name and position

Xavier Codina Jané  
Direttore Generale  
General Manager


**MIMSAL**

n° 2107

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DECLARATION OF CONFORMITY

FABBRICANTE PRODOTTO  
PRODUCT MANUFACTURER

MIMSAL TRADE S.L.

Indirizzo  
Address

C. Mollet 17, Polígono Industrial Palou Nord  
08401 Granollers (Barcelona)  
Spain

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE IL PRODOTTO  
DECLARE UNDER THEIR RESPONSIBILITY THAT THE PRODUCT

Nome del prodotto  
Product name

**LS INFRA**

Referenza - Modello  
Reference - Model

E020412 - LS INFRA 150  
E02041250 - LS INFRA 250  
E020412T - LS INFRA 150 TIMER  
E02041250T - LS INFRA 250 TIMER

Direttive  
Directives

2014/35/EU (LVD) Low Voltage Directive Class II  
2014/30/EU Electromagnetic Compatibility (E. M. C)

Prove e misurazioni - Norme  
Test and measurements - Standards

UNE-EN 60598-1:2015+A1:2018  
Electric Safety. Luminary

UNE-EN 60100-3-2:2019  
Harmonic current emissions AC. Mains. ≤16A

UNE-EN 60100-3-3:2013+A1:2020  
Voltage Fluctuations and Flicker AC. Mains. ≤16A

Data e luogo  
Location and date

Granollers (Barcelona) Spagna, 11 FEBBRAIO 2022  
Granollers (Barcelona) Spain, February 11th, 2022

Nome e carica  
Name and position

Xavier Codina Jané  
Direttore Generale  
General Manager

## 15. CERTIFICATO ISO 9001



# MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate no.:  
283445-2019-AQ-IBE-ENAC

Initial certification date:  
20 April 2016

Valid:  
21 April 2022 – 20 April 2025

This is to certify that the management system of

**MIMSAL TRADE, S.L.**

Calla Mollet 17, Pol. Ind Palou Nord, 08401, Granollers, Barcelona, Spain

has been found to conform to the Quality Management System standard:

**ISO 9001:2015**

This certificate is valid for the following scope:

**Manufacturing and distribution of medical devices for the lighting market.**

Place and date:  
**Barcelona, 28 February 2022**

For the issuing office:  
**DNV - Business Assurance**  
Gran Via de les Corts Catalanes 130-136, Pl. 9,  
08038, Barcelona, Spain



**Ana del Rio Salgado**  
Management Representative

Lack of fulfillment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.

ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance España, S.L.U., Gran Via de les Corts Catalanes 130-136, Pl. 9, 08038 Barcelona, Spain - TEL: +34 93 479 26 00.  
[www.dnv.es/assurance](http://www.dnv.es/assurance)

The logo for MIMSAL, featuring the word "MIMSAL" in a bold, blue, sans-serif font. The letters are closely spaced, and the 'M' and 'S' have a distinctive, slightly slanted design.

MIMSAL TRADE S.L.

C/ Mollet, 17  
Polígono Industrial Palou Nord  
08401 – Granollers (Barcelona) SPAIN

Tel. +34 930 139 860

mimsal@mimsal.com  
www.mimsal.com

F3P34  
Rev. 01  
20.06.2022