



INFRA 150 PLUS

IMPORTANTE.-

Uso y tiempo de aplicación bajo supervisión y responsabilidad médica.

IMPORTANT.-

Use and time of application under medical responsibility and supervision.

IMPORTANT.-

L'utilisation et le temps d'application sous surveillance et responsabilité médicale.

IMPORTANTE.-

Uso e tempi di applicazione sotto la supervisione e la responsabilità medica.

IMPORTANTE.-

Usar e tempo de aplicação sob supervisão e responsabilidade médica.

MIMSAL

MIMSAL TRADE S.L.

C. Mollet 17, Pol. Ind. Palou Nord - 08401 Granollers (Barcelona) - Spain
Tel. +34 930 139 860 - mimsal@mimsal.com - www.mimsal.com

INFRA PLUS



MIMSAL

INFRA PLUS - Istruzioni**ITALIANO****INFRA 150 PLUS**

cod. E020412

INFRA 250 PLUS

cod. I0103512

Lampada a infrarossi per uso di tipo terapeutico in trattamenti di estetica, fisioterapia e in ambienti sportivi.

Il calore viene distribuito in modo omogeneo

1. Installazione

- Necessita di supporto MIMSAL, da installare prima della collocazione della lampada.
- Si fornisce un supporto a morsetto da tavolo AH e, come accessori opzionali, eventualmente anche supporti da parete, soffitto o una base girevole.
- MIMSAL non può garantire la durata e la funzionalità in caso di utilizzo di accessori di terzi.

2. Precauzioni

- Scollegare la lampada dall'alimentazione elettrica ogniqualvolta si realizzano operazioni di pulizia o manutenzione.
- Pulire la lampada a secco o utilizzando una miscela delicata di acqua e sapone normale. Evitare l'utilizzo di alcol, acidi o qualsiasi tipo di solventi organici.
- Non lasciare la lampada accesa per oltre 8 ore consecutive.

3. Risoluzione dei problemi e manutenzione

- **Manutenzione:** Deve essere realizzata esclusivamente da installatori qualificati o altro personale qualificato.
- **Per la sostituzione della sorgente luminosa:**
 - Scollegare la lampada dall'alimentazione elettrica.
 - Sostituire la sorgente luminosa con connessione a vite.

In caso di qualsiasi altro problema, contattare il rappresentante locale MIMSAL.

MIMSAL è responsabile unicamente della manutenzione, riparazione o sostituzioni realizzate utilizzando parti di ricambio originali e attraverso personale MIMSAL.

Il fabbricante si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei propri prodotti senza preavviso.

	INFRA 150 PLUS	INFRA 250 PLUS
Sorgente luminosa	IR E-27 150W	IR E-27 250W
Diametro della testa	21 cm	30 cm
Ghiera	E-27 in ceramica	E-27 in ceramica
Lunghezza del braccio	105 cms (50+55cm)	105 cms (50+55cm)
Classe di protezione elettrica	Classe II	Classe II
Colore	Bianco	Bianco
Potenza	220/230V	220/230V